

# 全球多國許可、認證、使用的高層次消毒擦拭巾系統

適用於無管腔醫療器械的高層次消毒，包括：

- 鼻咽鏡
- 經陰道和經直腸超音波探頭
- 經食道心臟超音波 (TOE) 探頭
- 喉頭鏡
- 測壓導管
- 眼科器材



 可於 30 秒  
殺滅 HPV  
16 型及 18 型\*

\*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) 'The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jmv.25666.

## 雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統用法簡單！



預清洗擦拭巾是浸泡了含酵素清洗劑的不織布擦拭巾，給予器械表面徹底的預清洗，有效去除污漬和有機物。



### 高層次消毒 殺芽孢擦拭巾和活化起泡劑

兩者混合揉搓15秒後產生二氧化氯，一種高效的殺菌劑，可在30秒內去除醫療器械表面的細菌、病毒、真菌、分枝桿菌和芽孢。



### 沖洗 沖洗擦拭巾

包裝內有一張無菌的不織布擦拭巾，浸有去離子水且含低劑量抗氧化劑；用於去除器械表面的化學殘留物。



### 可追蹤性 3T數位合規平台 或者品質審核紀錄本

廣泛使用的品質審核紀錄本以紙筆形式記錄每一次消毒過程。3T將這項流程數位化，以實現更有效率、更準確、更智慧的紀錄。

**Tristel Trio**<sup>™</sup>  
**Wipes System**

有關完整說明，請參閱雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統使用手冊。



## 高效

根據 BS EN 14885 和最新發布的測試要求，雀艾斯達殺孢子擦拭巾在可於 30 秒內完成高層次消毒。該產品的快速作用和統一的接觸時間沒有任何懷疑或錯誤的餘地。



## 便攜

雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統可靈活運用在門診或消毒室。由於攜帶運輸方便，其減少了醫療器械必須送往集中滅菌中心的需要，確實節省了寶貴的時間。



## 相容性

雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統經相容性測試與 40 多家製造商的醫療器械兼容，包括：

- Advanced Tactile Imaging
- Airtraq\*
- Arthrex
- ATMOS MedizinTechnik
- BD (Bard Access, CareFusion)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- DWL Compumedics
- Echosens
- Ecleris
- Esaote
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- FUJIFILM Healthcare
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Haag-Streit\*
- Happersberger Otopront
- Karl Storz
- Koelis
- Laborie
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orvision
- Pentax
- Philips
- Polydiagnost
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- Southern Scientific / Care Wise
- Tic Medizintechnik
- SonoScape\*
- Verathon
- Xion Medical

\*使用了雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統中的殺孢子擦拭巾進行相容性測試。



## 快速

整個消毒流程，包括紀錄，只需幾分鐘。



## 性價比

雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統不需要購買昂貴的設備或簽署服務合約。



## 安全

雀艾斯達殺孢子擦拭巾對胚胎無毒，因此可用於生殖醫學/不孕症中心。



## 智能追蹤

雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統包括紙本或數位紀錄。廣泛使用的品質審核紀錄本以紙筆形式記錄每一次消毒過程。3T 將這項流程數位化，以實現更有效率、更準確、更智慧的紀錄。

雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統為無管腔醫療器械提供了完整的去污解決方案。得益於預清洗、高層次消毒和沖洗的概念，通過簡單且快速的三步驟即可完成去污。



## 微生物檢測報告

	歐洲規範 (EN)	一致的接觸時間
細菌	EN 13727	 30 秒
	EN 14561	
	EN 16615	
酵母菌/真菌	EN 13624	
	EN 14562	
	EN 16615	
病毒	EN 14476	
分枝桿菌	EN 14348	
	EN 14563	
細菌芽孢	EN 17126	

## 雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統<sup>50</sup>

- 1 盒執行 50 次的高層次消毒，並可選擇附有或不附有品質審核紀錄本。
- 可額外提供 3T 數位合規平台。



更多關於雀艾斯達 Trio 消毒擦拭巾系統的資訊，例如安全資料表、報告及研究資料，請聯繫我們或登錄 [www.tristel.com/asia-en](http://www.tristel.com/asia-en) 獲取。

## 醫療器械運送

Tristel Protect 專為醫療器械的運送與短期存放而設計，同時提供智能追蹤。

### Tristel Protect

- 每盒 50 個袋子。
- 提供小型 (21 公分 x 34 公分) 適用於喉頭鏡與大型 (31 公分 x 71 公分)，適用於鼻咽喉鏡。

