


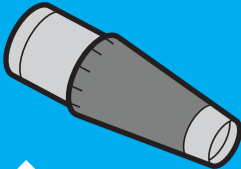
Die Komplettlösung für die Aufbereitung von ophthalmologischen Medizinprodukten

 Beachten Sie vor Benutzung die detaillierte Gebrauchsanleitung.

Hinweise:

- Folgen Sie den Standardarbeitsanweisungen und beachten Sie die Angaben des Instrumentenherstellers.
- Desinfizieren Sie Ihre Hände und tragen Sie geeignete PSA, wenn Sie mit Desinfektionsmitteln oder Medizinprodukten hantieren.
- Eine erste Vorreinigung sollte unmittelbar nach Benutzung des Medizinprodukts gemäß Standardarbeitsanweisung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, nicht übermäßige Kraft auf das Medizinprodukt auszuüben und achten Sie besonders auf Unebenheiten.
- Nehmen Sie zur Vorbereitung der Aufbereitung je ein Tuch und die Aktivatorschaumflasche aus dem Karton.
- Verwenden Sie Tücher oder Aktivatorschaum nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist und/oder die Tücher trocken sind.
- Bewahren Sie die Tuchverpackungen bis zum Ende der Aufbereitung auf, um das Protokollbuch auszufüllen.
- Entsorgen Sie Tücher und Handschuhe gemäß lokaler Vorgaben.
- Nur für den professionellen Gebrauch.

FÜR WIEDERVERWENDBARE TONOMETERKÖPFCHEN



SCHRITT 1: REINIGUNG



Nehmen Sie ein Pre-Clean Wipe aus der Tuchverpackung und breiten Sie es auf Ihrer Handfläche aus.

Reinigen Sie das Medizinprodukt gründlich. Stellen Sie sicher, dass sämtliche sichtbaren Verunreinigungen entfernt werden. Achten Sie insbesondere auf Unebenheiten.

Entsorgen Sie das genutzte Tuch.

Führen Sie einen Handschuhwechsel durch.

SCHRITT 2a + 2b: AKTIVIERUNG



Nehmen Sie ein Sporicidal Wipe aus der Tuchverpackung und breiten Sie es auf Ihrer Handfläche aus.

Geben Sie zwei vollständige Hübe des Aktivatorschaums auf das Tuch.

Falten Sie die Ecken des Tuchs zur Mitte in den Schaum und drücken Sie das Tuch für **15 Sekunden** zusammen, so dass es vollständig mit Schaum bedeckt ist.

SCHRITT 2: HIGH-LEVEL-DESINFEKTION



Wischen Sie gründlich über die Oberfläche des Medizinprodukts, um den Schaum zu übertragen, und stellen Sie eine vollständige Benetzung sicher.

Achten Sie insbesondere auf Unebenheiten. Massieren Sie ggf. den Schaum ein oder drücken Sie etwas Flüssigkeit aus dem Tuch auf die Stelle.

Stellen Sie eine Einwirkzeit von mindestens **30 Sekunden** sicher.

Entsorgen Sie das genutzte Tuch.

SCHRITT 3: SPÜLUNG



Nehmen Sie ein Rinse Wipe aus der Tuchverpackung und breiten Sie es auf Ihrer Handfläche aus.

Wischen Sie das Medizinprodukt gründlich ab, um Schaumrückstände zu entfernen.

Entsorgen Sie das genutzte Tuch.

SCHRITT 4: DOKUMENTATION



Nutzen Sie die benutzen Tuchverpackungen, um den Aufbereitungsprozess zu protokollieren.

Für weitere Informationen nutzen Sie die Anleitung im Protokollbuch.