


# Tristel Duo™

# ULT

VOOR NIET-INVASIEVE  
ULTRASONE PROBES

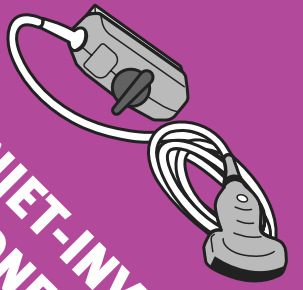

## High-level desinfecterend schuim

### Opmerking:

- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
- Wanneer Tristel Duo ULT voor de eerste keer na opening gebruikt wordt, druk dan 2 tot 4 maal om de pomp te vullen.
- Gebruik Tristel Duo ULT op oppervlakken die vrij zijn van ultrasound gel.
- Wanneer het oppervlak zichtbaar vuil is, volg dan het reinigingsprotocol van het ziekenhuis op.
- Alleen voor professioneel gebruik.
- Dit protocol moet gebruikt worden in combinatie met de gebruiksaanwijzingen, het productlabel, de veiligheidsinformatiebladen en de instructies van de fabrikant van het apparaat.

### STAP 1



De pomp twee keer indrukken om het schuim op een niet-absorberend doekje, bij voorkeur Duo Wipes, aan te brengen.

### STAP 2



Gebruik het doekje om het schuim over het gehele oppervlak van de probe te verspreiden en zorg ervoor dat alles goed is bedekt. Herhaaldelijk wrijven over het oppervlak is niet nodig en moet worden vermeden om scheuren van het doekje te voorkomen.

**Opmerking:** Gooi het gebruikte doekje weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis. Niet laten inwerken. Niet hergebruiken.

### STAP 3



Laat het oppervlak drogen om een minimale contacttijd van **30 seconden** te garanderen.

**Opmerking:** Berg het medisch instrument op in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol om schade en herbesmetting te voorkomen.

**Tristel™**

Created by: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY  
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Nederland: Tristel B.V., Binderij 7R 1185, Amstelveen  
T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com

For Tristel patent information please visit: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions  
Mkt-Wal-1223-1  
May 2020