

Tristel Duo™

ORL

VOOR FLEXIBELE
NASENOSCOPEN

High-level desinfecterend schuim

Opmerkingen:

- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Desinfecteer de handen en draag geschikte beschermingsmiddelen tijdens het werken met desinfectiemiddelen en medische hulpmiddelen.
- Indien Tristel Duo ORL voor de eerste maal wordt gebruikt, druk dan de pomp twee tot viermaal in om deze te vullen.
- Voor de reinigingsstap raden we Tristel Clean (tri-enzymatisch schuim) aan dat compatibel is met Tristel Duo ORL. Hierdoor is spoelen tussen de twee stappen niet nodig (2 doses schuim Tristel Clean om een oppervlak van 50 cm x 20 cm te reinigen).
- Veeg de sonde droog met een doekje naar keuze wanneer de sonde visueel schoon is.
- Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- De vervaldatum blijft ongewijzigd bij gebruik.
- Deze gebruikershandleiding dient te worden gebruikt in combinatie met het productlabel, het veiligheidsinformatieblad (SDS) en de instructies van de fabrikant.



Breng Tristel Clean aan op een neutraal doekje (bij voorkeur Duo Wipes) om het medisch hulpmiddel te reinigen.

Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Tristel Clean voor de reinigingsstap.




Breng twee doses Tristel Duo op een droog doekje aan (Duo Wipes worden aanbevolen).




Gebruik het doekje om het schuim over het oppervlak van het medisch hulpmiddel te verspreiden en zorg ervoor dat het gehele oppervlak bedekt is. Het voortdurend wrijven over de oppervlakte is niet nodig en dient vermeden te worden om te voorkomen dat het doekje scheurt.


Opmerking: Gooi het doekje weg in overeenstemming met lokale regelgeving. Niet in een vermaler werpen. Niet hergebruiken.

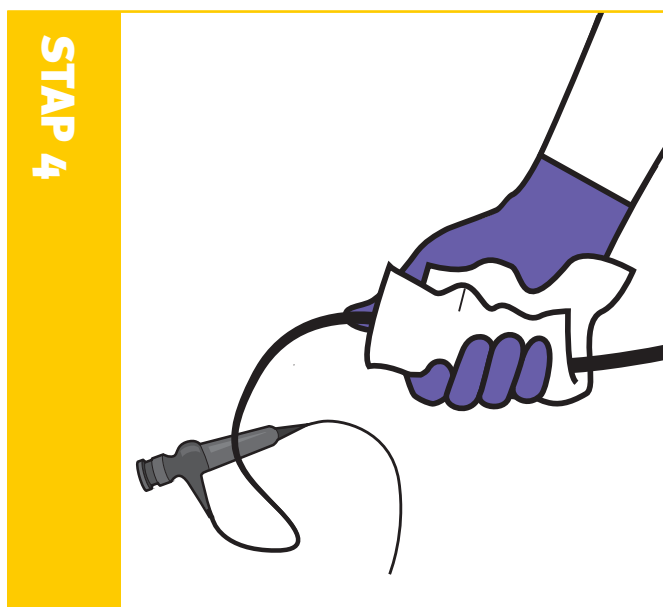

Gebruik Tristel Duo ORL voor een high-level desinfectie van oppervlakken die in contact komen met de sonde, zoals de sondehouder, kabels en stekkers.

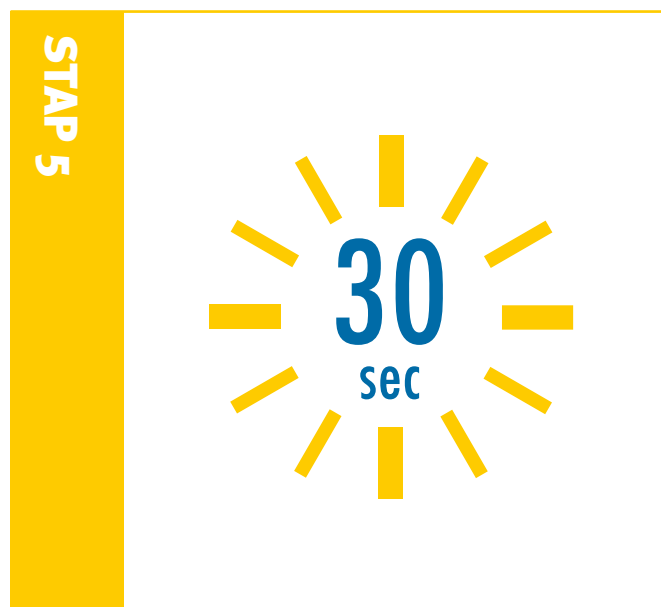

Respecteer de contacttijd van minimaal **30 seconden**.

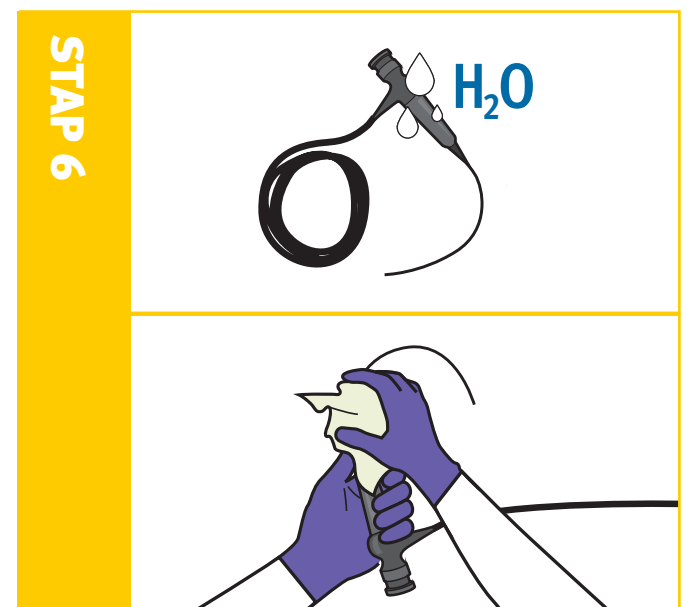

Spoel het medisch hulpmiddel met bacteriologisch gecontroleerd water.

Opmerking: Bewaar het instrument in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol om schade of herbesmetting te voorkomen.

Tristel

Ontwikkeld door: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

België: Tristel NV, Smalldaan 14B, 2660 Antwerpen - T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com
Nederland: Tristel B.V., Binderij 7 R, 1185 ZH Amstelveen, Nederland - T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com

Voor informatie over de octrooien : <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-1442-3
23 NOV 2021