



EEN ClO_2 SPORICIDE FOAM VOOR DE DESINFECTIE VAN NIET-POREUZE MEDISCHE OPPERVLAKKEN EN NIET-INVASIEVE MEDISCHE HULPMIDDELEN.

NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK MET ECHOSONDES OF INVASIEVE MEDISCHE HULPMIDDELEN.

HOE TE GEBRUIKEN



1 Om JET te assembleren, neemt u een spraykop, schroeft u de afsluitdoppen van de flessen los en plaatst u, volgens de rode A- en blauwe B-indicator op het etiket van de fles, de buisjes in de respectieve flessenhalzen.



2 Bevestig de hendels linksom aan beide zijden om uw spraykop te vergrendelen. Zorg ervoor dat het mondstuk is uitgelijnd met de bovenste lijn op de spraykop. JET is nu klaar voor gebruik.



3 Breng ten minste 2 doses aan op een doekje.



4 Veeg uit over het oppervlak.



5 Zorg ervoor dat het oppervlak vochtig blijft gedurende de contacttijd van één minuut. Aan de lucht laten drogen.



6 Als u niet kunt recycleren, gebruik het dan opnieuw! Lees het gedeelte 'GROTE IMPACT' hieronder voor meer informatie.

CONTROLES VOOR GEBRUIK

Een paar belangrijke geheugensteuntjes es vóór we beginnen:

- Lees voor gebruik altijd het productetiket, de veiligheidsinformatiebladen (VIB) en de productinformatie.
- Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- JET is alleen voor professioneel gebruik.
- Niet aanbrengen op oppervlakken zoals messing, koper, aluminium, zacht staal of zilver.
- Reinig, spoel en droog de oppervlakken zorgvuldig voordat u het product gebruikt.



Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de volledige instructies.

GROTE IMPACT

Uw JET trekker kan opnieuw gebruikt worden met de tweede JET fles.

Om de trekker te verwijderen draait u de hendels met de klok mee los.

Voordat u de bovenstaande montage-instructies volgt, spoelt u de dompelbuizen grondig af met kraanwater en droogt u ze met een papieren doekje.

Na gebruik kunnen lege JET flessen en doppen voor recycling worden opgestuurd.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

JET is 2 jaar houdbaar alvorens te worden gebruikt en moet rechtop worden bewaard op een koele, droge plaats, buiten direct zonlicht, tussen 10°C - 35°C.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor volledige instructies.

cache[™]
Sporicide
Oppervlakedesinfectie



Tristel Solutions Ltd

Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T: +44 (0) 1638 721500 - E: mail@tristel.com - W: www.thecachecollection.com



Tristel NV, Smallandlaan 14B, 2660 Antwerp, Belgium
T: +32 3 889 26 40 - E: belgium@tristel.com