

Tristel Trio™

Wipes System


De complete oplossing voor een high-level desinfectie van invasieve medische hulpmiddelen zonder werkkanaal.

 Raadpleeg de gebruikershandleiding voor volledige instructies.

Opmerkingen:

- Volg altijd de ziekenhuisprotocollen en de instructies van de fabrikant op.
- Ontsmet de handen en draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het hanteren van ontsmettingsmiddelen en medische hulpmiddelen.
- Onmiddellijk na gebruik van het medisch hulpmiddel moet een eerste voorreiniging worden uitgevoerd in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol.
- Zorg ervoor dat u het medisch hulpmiddel niet schaaft of plooit en let in het bijzonder op randen, ribbels, inkepingen en gebieden waar verschillende materialen met elkaar verbonden zijn.
- Bereid het ontsmettingsproces voor door elk van de doekjes en het Activatorschuim uit de doos te nemen.
- Niet gebruiken na de vervaldatum. Zie voor de vervaldatum en het lotnummer de buitenkant van de doos.
- Niet gebruiken als het zakje van het doekje beschadigd is, of als het doekje verkleurd, beschadigd of droog is.
- Gebruik indien nodig meer doekjes om ervoor te zorgen dat het medische hulpmiddel zichtbaar schoon is.
- Bewaar de zakjes van de gebruikte doekjes zodat de details kunnen worden ingevuld in het Tristel Quality Audit Trail Record Book.
- Alleen voor professioneel gebruik.

VOOR FLEXIBELE
CYSTOSCOPEN ZONDER WERKKANAAL

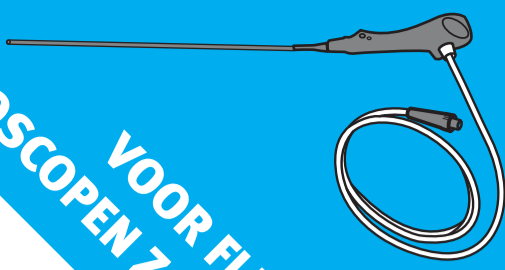

STAP 1 : REINIGEN



Neem het Reinigingsdoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Veeg het medisch hulpmiddel schoon om al het zichtbare vuil te verwijderen.

Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg overeenkomstig de lokale voorschriften.

Ontsmet de handen en draag nieuwe handschoenen.

STAP 2a + 2b : ACTIVEREN



Neem het Sporicide doekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Neem het Activatorschuim en breng twee doses aan op het sporicide doekje.

Vouw het doekje weer op en kneed het zachtjes gedurende **15 seconden** om chloordioxide te activeren.

Zorg ervoor dat het doekje gelijkmatig bedekt is met schuim.

Gebruik het geactiveerde doekje onmiddellijk.

STAP 2 : HIGH-LEVEL DESINFECTIE



Ontsmet het medisch hulpmiddel zodat alle oppervlakken bedekt zijn met schuim.

Gooi het gebruikte doekje weg overeenkomstig de lokale voorschriften.

Observeer een minimum contacttijd van **30 seconden**.

STAP 3 : SPOELEN



Neem het Spoeldoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Gebruik het Spoeldoekje om het overtollig schuim te verwijderen van het medisch hulpmiddel.

Gooi het gebruikte doekje weg overeenkomstig de lokale voorschriften.

STAP 4 : TRACEREN

The record book contains two pages of forms. The left page shows two entries for 'Flexible nasendoscope' with details like date (01 September 2014), time (10:15 am and 2:25 pm), and patient name (Mr. John Smith 250004). The right page shows a similar form with a 'Confirmation by patient' section. A Tristel pen is placed on the bottom right of the forms.

Verwijs naar de gebruikte zakjes van de Tristel doekjes en het Activatorschuim om het Record Book in te vullen.