


Tristel Duo™

OPH

High-level desinfecterend schuim

VOOR TONOMETERS

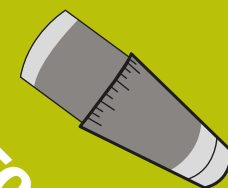

Opmerking:

- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Desinfecteer de handen en draag geschikte beschermingsmiddelen tijdens het werken met desinfectiemiddelen en medische instrumenten.
- Indien Tristel Duo OPH voor de eerste maal wordt gebruikt, druk dan de pomp twee tot viermaal in om deze te vullen.
- Als de oppervlakte zichtbaar vuil is, volg dan het ziekenhuisprotocol voor instructies m.b.t. reiniging.
- Voor professioneel gebruik.
- Deze gebruikershandleiding dient te worden gebruikt in combinatie met het productlabel, het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en de instructies van de fabrikant.

STAP 1



Breng twee doses Tristel Duo aan op een Duo Wipe of meteen op het instrument.

STAP 2



Gebruik het doekje om het schuim over het gehele oppervlak van het instrument te verspreiden en zorg ervoor dat alles goed is bedekt. Herhaaldelijk wrijven over het oppervlak is niet nodig en moet worden vermeden om scheuren van het doekje te voorkomen.


Opmerking: Gooi het gebruikte doekje weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis. Niet laten inwerken. Niet hergebruiken.

STAP 3



Respecteer de contacttijd van minimaal **30 seconden**.

STAP 4

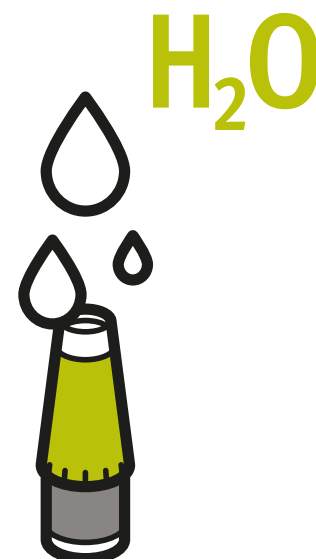

Spoel het instrument na met steriel water. Tristel Rinse Wipes worden aanbevolen.

Opmerking: Berg het medisch instrument op in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol om schade en herbesmetting te voorkomen.

Tristel™

Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Voor informatie over de octrooien: <http://www.our-patents.info/tristel>

België: Tristel NV, Smalldlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com
Nederland: Tristel B.V., Binderij 7 R, 1185 ZH Amstelveen, Nederland
T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-426-3
February 2020