



Tristel Duo™

ULT

Point of Care Ultrasound (POCUS) is aanwezig in verschillende gebieden voor verschillende toepassingen.

POCUS wordt in toenemende mate gebruikt voor zowel invasieve als niet-invasieve procedures. Echoprobes worden gebruikt voor het helpen plaatsen van centraal veneuze katheters (CVC). Ook bij het begeleiden van perifeer-ingebrachte centrale katheters (PICC), locoregionale anesthesieprocedures, premature atriale contractie (PAC) en bij musculoskeletale procedures (MKS) worden echoprobes ingezet.

LICHT - SIMPEL - EFFECTIEF

Tristel Duo ULT is een schuim op basis van chloordioxide, geschikt voor de desinfectie van niet-invasieve echoprobes die gebruikt worden tijdens POCUS procedures. Dankzij zijn formaat en eenvoud is Tristel Duo ULT eenvoudig te implementeren in een breed scala aan gebieden waar POCUS wordt uitgevoerd.

Deze gebieden zijn:

- Emergency services
- Radiologie
- Intensieve zorgen
- Fysiotherapie
- Algemene draagbare echografie
- Oncologie
- Dialyse

TRISTEL DUO ULT IS EENVOUDIG IN GEBRUIK: AANBRENGEN, VEGEN, WACHTEN!



1 BRENG TRISTEL DUO ULT AAN OP EEN DROOG DOEKJE.

Bij voorkeur Duo Wipes



2 VERSPREID HET SCHUIM OVER HET OPPERVAK EN ZORG ERVOOR DAT ALLES GOED BEDEKT IS.



3 LAAT HET OPPERVAK DROGEN OM EEN MINIMALE CONTACTTIJD VAN 30 SECONDEN TE GARANDEREN.



EFFECTIEF

Tristel Duo ULT is sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide, bactericide en vernietigt DNA en RNA in een contacttijd van 30 seconden. Het is uitvoerig getest volgens de laatste Europese Normen en is volledig conform EN 14885:2018. Tristel Duo ULT is werkzaam tegen een breed spectrum van micro-organismen zoals:

- *Bacillus subtilis*
- *Bacillus cereus*
- *Candida albicans*
- *Staphylococcus aureus*
- *Escherichia coli*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Gardnerella vaginalis*
- Methicilline – resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA)
- Carbapenemase resistente Enterobacteriën (CRE)
- *Klebsiella pneumoniae*
- Vancomycine – resistente Enterokokken (VRE)
- *Enterococcus faecium*
- **Humaan Papillomavirus (HPV)**
- Human Immunodeficiëntie-virus (HIV)
- Hepatitis B Virus (HBV)
- Herpes Simplex virus



COMPATIBEL

Tristel Duo ULT is getest en compatibel verklaard door toonaangevende fabrikanten, zoals:

- Alpinion Medical Systems
- Bard
- BK Ultrasound
- Butterfly Network
- Canon (Toshiba)
- Carestream
- Esaote
- Fujifilm Sonosite
- GE Healthcare
- Healcerion
- Hitachi
- Mindray
- Philips
- Quantel Medical
- Samsung
- SonoScape Medical Corp
- SuperSonic
- Imagine
- Verathon

Duo Wipes zijn speciaal ontwikkeld om Tristel Duo ULT aan te brengen.

Duo Wipes zijn gemaakt van 100% niet-geweven, laag-pluizend polypropyleen (18gsm) en zijn voorgesneden, om scheuren te vermijden.

Het gebruik van Duo Wipes garandeert een optimale verspreiding van het desinfectans op het oppervlak.



DUO WIPES

- 200 doekjes per bus / 6 bussen per karton

TRISTEL DUO ULT

- 125ml Tristel basis oplossing (citroenzuur) + 125ml Tristel Activator oplossing (natriumchloriet)
- Door het indrukken van de pomp, worden beide oplossingen gemengd en wordt de gepatenteerde Tristel chloordioxide-chemie gegenereerd.
- 310 doses per flacon / 6 flacons per karton

DUO DOK

- Ontworpen om Tristel Duo ULT makkelijk op te hangen.
- 5 per pak.

TristelTM
WE HAVE CHEMISTRY.

Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY

T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Nederland: Tristel B.V., Binderij 7R, 1185 Amstelveen

T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com

België: Tristel NV, Smallandlaan 14B, 2660 Antwerpen

T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com

Voor informatie over de octrooien: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Bro-1327-2
08/SEP/2022

Page 2 of 2