

Tristel Duo™

OPH

POUR LES LENTILLES
DE DIAGNOSTIC



Mousse de désinfection de haut niveau

Notes:

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Désinfectez-vous les mains et portez des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Si Tristel Duo OPH est utilisé pour la première fois, appuyez sur la pompe deux à quatre fois pour l'amorcer.
- Si la surface est visiblement sale, suivez les consignes de nettoyage du protocole de l'hôpital.
- Uniquement pour utilisation professionnelle.
- Ce protocole doit être utilisé conjointement avec le guide d'utilisation, l'étiquette du produit, la Fiche de Données de Sécurité (FDS) et les instructions du fabricant de l'appareil.

ÉTAPE 1



Appliquez deux doses de Tristel Duo OPH sur une lingette sèche (de préférence Duo Wipes) ou directement sur la lentille.

ÉTAPE 2



Utilisez la lingette pour étaler la mousse sur la surface de la lentille et assurez-vous que toutes les zones soient couvertes. L'essuyage continu de la surface n'est pas nécessaire et est même à éviter afin que la lingette ne peluche pas.


Note: jetez la lingette utilisée conformément aux consignes locales. Ne pas faire macérer. Ne pas réutiliser.

ÉTAPE 3



Laissez sécher le produit sur la surface pendant au moins **30 secondes**.

ÉTAPE 4

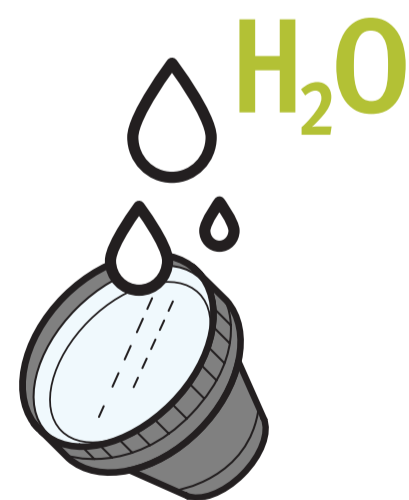

Rincez la lentille avec de l'eau bactériologiquement contrôlée ou stérile.

Note: conservez le dispositif médical conformément aux protocoles de l'hôpital afin d'éviter tout endommagement ou recontamination.