

# garrot hygiénique réutilisable



## 1. application

Enroulez le garrot autour du bras du patient et fixez-le à l'aide du fermoir aimanté en le faisant cliquer.



## 2. serrage

Placez un doigt entre la bande et la peau pour éviter tout pincement. Tirez la bande près du fermoir à un angle de 45° - sans tirer à partir de l'extrémité distale (la queue).



## 3. insertion d'un cathéter/ prélèvement de sang

Desserrez le garrot daisygrip dès que l'aiguille est dans la veine.



## 4. desserrage

Glissez un doigt sous le fermoir et soulevez-le en direction de la bande enroulée pour desserrer le garrot et libérer la stase.



## 5. retrait

Une fois desserré, faites glisser la partie supérieure du fermoir sur le côté avec votre pouce tout en maintenant la partie inférieure du fermoir avec vos doigts ou votre paume.



## 6. retraitement

Nettoyez et désinfectez le fermoir et la bande après chaque utilisation, en suivant les recommandations locales. Assurez-vous que la bande est bien sèche avant toute réutilisation.

Distribué par :

**Tristel**™

Belgique et GD de Luxembourg : Tristel SA, Smallandlaan 14 B, 2660 Anvers  
T 03 889 26 40 - E [belgium@tristel.com](mailto:belgium@tristel.com) - W [www.tristel.com/be-fr/](http://www.tristel.com/be-fr/)

France : Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille  
T 03 66 88 01 84 - E [france@tristel.com](mailto:france@tristel.com) - W [www.tristel.com/fr-fr/](http://www.tristel.com/fr-fr/)



Suivez toujours les  
instructions d'utilisation.

Copyright © Tristel Solutions Limited  
Mkt-Wal-2878 - 17/SEP/2024 - V1