

SURFACES

Solution désinfectante de haut niveau
pour grandes surfaces



1 Versez 5 litres d'eau du robinet dans un seau ou dans un récipient équivalent.

Note: ne pas utiliser d'eau chaude.



2 Prenez un sachet, pliez-le à la moitié et pressez fortement un des côtés pour faire passer le contenu vers le centre du sachet et éclater le joint central. Le contenu prendra une couleur jaune.



3 Déchirez ou coupez le sachet avec une paire de ciseaux.



4 Versez le contenu du sachet dans les cinq litres d'eau.



5 Appliquez le désinfectant avec une serpillière ou avec un chiffon microfibre et laissez sécher.



6 Respectez un temps de contact de 5 minutes.

Notes:

- Préparez la solution dans un endroit bien ventilé.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés. Suivez toujours les protocoles hospitaliers et les instructions de la fiche de données de sécurité.
- Stockez dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, sans exposition directe au soleil.
- Après dilution, la solution peut être conservée pendant 24 heures dans un récipient hermétiquement fermé.
- Éliminez l'emballage vide conformément aux directives locales et nationales.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Le contact avec le désinfectant peut causer des irritations. Lavez, si nécessaire, avec beaucoup d'eau et du savon.
- Après utilisation, rincez le matériel avec de l'eau.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Uniquement pour utilisation professionnelle.
- Ce protocole doit être utilisé conjointement avec le guide d'utilisation, l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.

La disponibilité des produits est soumise à l'approbation réglementaire sur les différents marchés.