



DIOXYDE DE CHLORE (ClO₂) DÉSINFECTANT SPORICIDE




VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION


Quelques rappels importants avant de commencer :

- ✓ Utilisez les désinfectants avec précaution.
- ✓ Lisez toujours l'étiquette et les informations relatives au produit avant utilisation.
- ✓ Portez l'équipement de protection individuelle approprié (EPI).
- ✓ **FUSE** est réservé à un usage professionnel.
- ✓ Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de basse qualité.
- ✓ Préparez **FUSE** dans un endroit bien ventilé et assurez-vous que la surface est exempte de souillures avant utilisation.

MODE D'EMPLOI

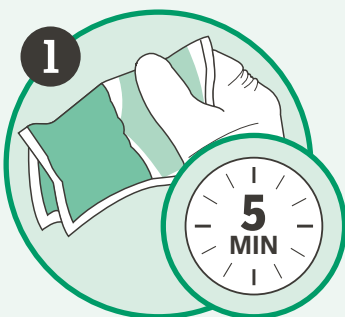


Prenez un sachet. Pliez le sachet en deux, puis pressez un côté pour faire éclater le joint central entre les deux solutions. Attendez 5 minutes pour que les deux solutions se mélangent et que le contenu devienne jaune.

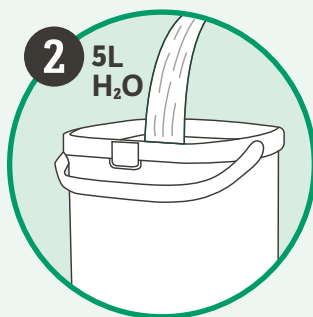

Pendant ce temps, versez 5 litres d'eau à température ambiante dans un contenant. N'utilisez pas d'eau chaude.



Déchirez ou coupez le sachet et versez son contenu dans les 5 litres d'eau, en prenant soin de maintenir le sachet sous la surface de l'eau pour éviter les éclaboussures.

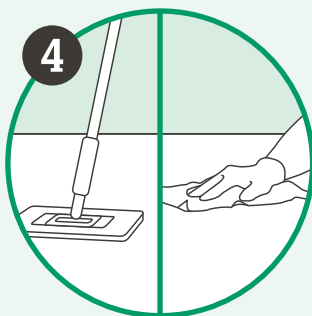

Appliquez sur la surface à l'aide d'un bandeau pour les sols ou d'un support d'essuyage pour les autres surfaces.



Veillez à ce que la surface reste humide pendant 5 minutes. Appliquez plus de solution si nécessaire. Laissez sécher.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Les sachets **FUSE** peuvent être conservés pendant 3 ans avant d'être utilisés et doivent être stockés dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, entre 10°C et 35°C. Une fois mélangée à l'eau, la solution peut être conservée pendant 24 heures dans un contenant hermétique. Éliminez la solution et l'emballage selon les directives locales.



Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le guide utilisateur.