

PRÊT À UTILISER LE DÉTERGENT- DÉSINFECTANT JET LUX ? C'EST PARTI.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Quelques rappels importants avant de commencer :

- ✓ Lisez toujours l'étiquette et les informations relatives au produit avant utilisation.
- ✓ Portez l'équipement de protection individuelle approprié (EPI).
- ✓ Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- ✓ **JET LUX** est réservé à l'usage des professionnels de santé.
- ✓ Ne pas appliquer sur des surfaces en laiton, en cuivre, en aluminium, en acier doux ou en argent.

MODE D'EMPLOI



Pour assembler **JET LUX**, prenez le pulvérisateur, dévissez les bouchons des flacons, puis, en suivant les repères **A (rouge)** et **B (bleu)** figurant sur l'étiquette du flacon, insérez le tube rouge dans le côté du flacon marqué d'un **A rouge** et le tube bleu dans le côté du flacon marqué d'un **B bleu**.



Serrez les loquets dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de chaque côté du pulvérisateur pour les bloquer. Assurez-vous que l'embout est aligné avec la ligne supérieure sur la tête du pulvérisateur. **JET LUX** est désormais prêt à l'emploi.



Appliquez au moins 2 doses sur une lingette.



Essuyez sur la surface.



Veillez à ce que la surface reste humide pendant une minute de temps de contact. Laissez sécher à l'air libre.



Si vous ne pouvez pas recycler, réutilisez ! Consultez la rubrique « IMPORTANT » ci-dessous pour en savoir plus.

IMPORTANT

Votre pulvérisateur **JET LUX** doit être réutilisé avec le deuxième flacon **JET LUX**. Pour ce faire, desserrez les leviers dans le sens des aiguilles d'une montre afin de retirer le pulvérisateur. Avant de suivre les instructions de montage ci-dessus, rincez les tubes plongeurs à l'eau du robinet et séchez-les avec un essuie-tout. Après utilisation, les bouteilles et bouchons **JET LUX** vides peuvent être rincés à l'eau du robinet et envoyés au recyclage.

 Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le guide utilisateur.

CONDITIONS DE CONSERVATION

JET LUX se conserve 2 ans et doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre 10 °C et 35 °C. Vérifiez la date de péremption sur l'étiquette du flacon.

Une fois ouvert, **JET LUX** se conserve 6 mois. Vous pouvez suivre cette durée en notant la date d'ouverture de **JET LUX** sur l'étiquette du flacon (à l'aide d'un stylo à encre indélébile).

 _ _ / _ _ / _ _ _