

## NOTES

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Désinfectez-vous les mains et portez des gants adaptés ainsi qu'un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de nettoyeurs, de désinfectants et de dispositifs médicaux. Les recommandations relatives au port de l'EPI peuvent varier selon l'établissement. Veuillez suivre les consignes locales.
- Lors de la première utilisation de Tristel DUO ORL ou de Tristel CLEAN, appuyez deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de qualité inférieure.
- Des cotons-tiges peuvent être utilisés pour appliquer Tristel DUO ORL sur les zones difficiles d'accès, telles que les creux ou les rainures.
- Ce poster doit être utilisé conjointement avec la notice d'utilisation (IFU), l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
- Réservé à l'usage des professionnels de santé.

## MODE D'EMPLOI



Appliquez Tristel CLEAN sur une lingette sèche.

*Remarque : Les lingettes DUO WIPES sont recommandées.*



Utilisez suffisamment de mousse pour recouvrir toute la surface du dispositif et essuyez **jusqu'à ce qu'il soit visiblement propre**. Portez une attention particulière aux bords, aux arêtes, aux rainures et aux jonctions entre différents matériaux. Utilisez davantage de mousse et de lingettes si nécessaire.



*Remarque : Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux règles locales. Ne les réutilisez pas.*



*Remarque : Lavez-vous les mains et enflez des gants neufs.*



Déposez **deux doses** de Tristel DUO ORL sur une lingette sèche.




Utilisez Tristel DUO ORL pour la désinfection de haut niveau du câble et de la source lumineuse, le cas échéant.

*Remarque : Jetez la lingette usagée conformément aux règles locales. Ne la réutilisez pas.*



Veillez à ce que le dispositif reste humide pendant au moins **30 secondes de temps de contact**.

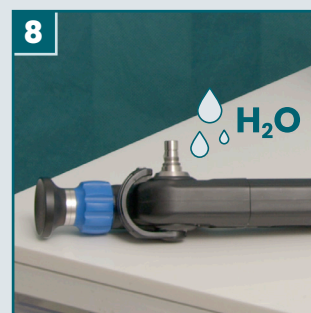

Rincez le dispositif médical à l'eau de qualité appropriée.

*Remarque : Séchez et rangez le dispositif médical conformément aux protocoles de l'établissement afin d'éviter tout dommage ou toute recontamination.*