

Tristel **VISICLEAN** est un détergent non enzymatique doté d'une technologie colorante. Il offre une confirmation visuelle claire du nettoyage tout en éliminant efficacement les souillures.

Associé à la mousse de dioxyde de chlore Tristel, Tristel **VISICLEAN** permet de mettre en place des protocoles **reproductibles** de traitement des dispositifs médicaux échographiques.



L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE

Le traitement des sondes échographiques dépend d'une étape cruciale : le nettoyage manuel. Cette étape permet d'éliminer les souillures visibles et les matières organiques qui peuvent compromettre la désinfection et permettre aux micro-organismes de survivre. Chaque protocole doit commencer par un nettoyage manuel minutieux indépendamment du fait que la désinfection de haut niveau soit manuelle ou automatisée.

LE POUVOIR DE VISICLEAN

Tristel VISICLEAN est un détergent non enzymatique doté d'une technologie colorante innovante offrant une confirmation visuelle claire du nettoyage. Son colorant souligne l'importance de cette étape et renforce la confiance dans l'élimination effective des matières organiques avant la désinfection de haut niveau.

VISICLEAN DÉPOSE UN COLORANT ROSE D'ORIGINE ORGANIQUE QUI EST OXYDÉ PAR LE ClO_2 TRISTEL.

COMMENT COMMANDER ?

Tristel **VISICLEAN** est disponible dans le Tristel **VISI Combination Pack** qui permet de réaliser 155 procédures.



Tristel **VISI Combination Pack**

Tristel **DUO ULT**
Mousse désinfectante de haut niveau

Tristel **VISICLEAN**
Détergent non enzymatique avec technologie colorante

Tristel **DRY WIPES**
Lingettes peu pelucheuses, douces et durables

Code Produit: TSL025001

Tristel **VISICLEAN** et Tristel **DRY WIPES** sont classés comme dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement EU MDR.

Tristel **DUO ULT** est classé comme dispositif médical de classe IIb conformément au règlement EU MDR.

Compatibilité des matériaux

Tristel **VISICLEAN** a été soumis à des tests rigoureux sur des dispositifs échographiques représentatifs, en effectuant 2 500 cycles de nettoyage à l'aide de lingettes sur chaque dispositif.

Même lors d'essais d'exposition continue, les dispositifs ne présentaient aucune décoloration, tache ou détérioration.



France



Belgique

Copyright © Tristel Solutions Limited - Mkt Broc 0502 - 01/04/2024 - V2

Tristel™

RENDRE L'INVISIBLE VISIBLE

Couverture visible.
Désinfection fiable.



LA MOUSSE COLORÉE PERMET DE VISUALISER LE PROTOCOLE ET D'ASSURER QUE LA SONDE EST PARFAITEMENT NETTOYÉE ET DÉSINFECTÉE.



COMMENT ÇA FONCTIONNE?

VISICLEAN transforme la désinfection manuelle en un processus **reproductible, validé et vérifiable** garantissant que chaque étape est effectuée correctement, **à chaque fois.**

01

TRISTEL VISICLEAN



Nettoie et colore la surface de la sonde pour visualiser instantanément les surfaces nettoyées.

02

TRISTEL DUO ULT



Permet de réaliser la désinfection de haut niveau et oxyde VISICLEAN, faisant disparaître la couleur.

03

3T CONFORMITÉ DIGITALE



Traçabilité digitale pour chaque cycle de désinfection et formation pour chaque produit Tristel.

Consulter le guide d'utilisation pour obtenir les instructions complètes.

Couleur qui disparaît.
CONFIANCE QUI PERDURE.



Essuyage manuel reproductible



Allie nettoyage et technologie colorante



Colorant d'origine naturelle



Mousse détergente non enzymatique

LA MAÎTRISE DU GESTE : QUAND LA CONFIANCE GUIDE LE SOIN.



TRISTEL FAIT CONFIANCE À LA FIABILITÉ DES MAINS HUMAINES

Dans les soins de santé, tout commence par un geste. Un geste sûr, précis, humain. Celui qu'aucune machine ne peut imiter. Les mains soignent, protègent, préviennent. Elles ressentent, évaluent, décident. Qu'il s'agisse d'une injection ou d'une chirurgie délicate, la maîtrise humaine reste irremplaçable.

RÉINVENTER L'ESSUYAGE ET LA DÉSINFECTION MANUELLE

VISICLEAN est conçu pour accompagner les professionnels de santé en apportant clarté, contrôle et confiance au processus de désinfection manuelle.

En rendant chaque étape visible, intuitive et reproductible, il permet aux utilisateurs de nettoyer et de désinfecter avec précision, assurance et reproductibilité.

VISICLEAN renforce l'expertise humaine et permet aux professionnels de santé de conserver ce qui a toujours fait la différence : la force et la précision de leurs mains.


95 % des cliniciens déclarent que VISICLEAN renforcerait leur confiance dans leurs procédures de désinfection.*

APPLICATIONS


Tristel VISICLEAN est adapté aux procédures échographiques, y compris les échographies réalisées au point d'intervention (point-of-care), où la rapidité, la visibilité et la fiabilité sont essentielles.



Sondes endovaginales

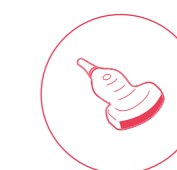

Sondes percutanées

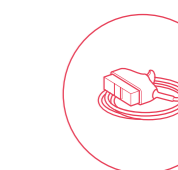

Prises et câbles

*Basé sur les retours recueillis lors de sessions de groupes de discussion et d'évaluations pratiques du produit.