



EEN DRIEVOUDIG ENZYMATISCH REINIGINGSSCHUIM VOOR INVASIEVE EN NIET-INVASIEVE ECHOSONDES

Desinfectie is alleen werkzaam als de sonde aan een grondige reiniging is onderworpen. Tristel Clean is een reinigingsschuim met een driedovoudige enzymwerking, speciaal ontwikkeld voor invasieve en niet-invasieve echosondes.

Bij gebruik van Tristel Clean voor reiniging van de sonde en Tristel Duo ULT voor high-level desinfectie is er geen tussenspoeling nodig.



**DRIEVOUDIGE
ENZYMWERKING**
VOLDOET AAN DE
REINIGINGSNORMEN



COMPATIBEL
GOEDGEKEURD DOOR
GROTE FABRIKANTEN



MOBIEL
LICHT EN PRAKTISCH



**LANGE
HOUDBAARHEID**
TWEË JAAR
HOUDBAAR



PRAKTISCH
INWEKEN
NIET NODIG



SCHUIM
GEEN SPIJTBUSSEN

ONGEËVENAARDE COMPATIBILITEIT

De Tristel Clean-formule wordt al meer dan twintig jaar toegepast bij de Tristel Pre-Clean Wipe. Geen enkel andere reinigingsmiddel voor ultrasone sonden is, op het vlak van compatibiliteit, zo vaak goedgekeurd door de fabrikanten.


- Advanced Tactile Imaging
- Arthrex
- Bard
- BK Ultrasound
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Echosens
- Exact Imaging
- Fujifilm/Sonosite
- GE Healthcare
- Hitachi
- Medcom
- Mindray
- Philips
- Siemens Healthcare
- Toshiba/Canon

Tristel™
Clean


TOEPASSINGEN

Tristel Clean is speciaal ontworpen voor het reinigen van invasieve en niet-invasieve sondes.

Twee eenheden schuim volstaan voor een oppervlak van 20cm x 50cm (0.1m²).

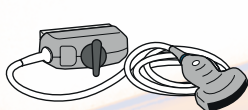

NIET-INVASIEVE
SONDE

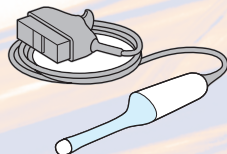

ENDOCAVITAIRE
SONDE

HIGH-LEVEL DESINFECTIE MET TRISTEL DUO ULT

Tristel Clean is, als complementair product voor Tristel Duo ULT en Duo Wipes, ontworpen voor gebruik als onderdeel van een uitgebreide ultrasonische desinfectieprocedure.

Na het verwijderen van vuil en organisch materiaal van de sonde met Tristel Clean, kan met Tristel Duo ULT vervolgens worden overgegaan tot high-level desinfectie (HLD). Er is geen tussen- of naspoeling nodig.

Tristel Duo ULT is chloordioxide in schuimvorm, speciaal ontworpen voor high-level desinfectie van invasieve en niet-invasieve sondes. Tristel Duo biedt snelheid, veiligheid, werkzaamheid en een uitstekende materiaalcompatibiliteit.



AANBRENGEN

Breng Tristel Clean aan op een droog doekje.



REINIGEN

Reinig het apparaat zodat geen vuil en organisch materiaal meer te zien is. Herhaal het proces bij sterke vervuiling.



VOER EEN HIGH-LEVEL DESINFECTIE UIT

van het apparaat met Tristel Duo ULT. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor volledige instructies.

PRODUCTOPTIES EN TOEBEHOREN



DUO WIPES

200 doekjes per bus / 6 bussen per doos

TRISTEL CLEAN

310 eenheden per flacon / 6 flacons per doos

TRISTEL DUO ULT

310 eenheden per flacon / 6 flacons per doos



DUO DOK

Met Duo Dok houdt u de flacon Duo steeds binnen handbereik



Bezoek www.tristel.com/resources voor recent materiaal of www.tristel.com/news voor het meest recente, wetenschappelijke nieuws van Tristel