

HOOG-NIVEAU DESINFECTIEMIDDEL VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN ZONDER WERKKANAAL GEBRUIKT BIJ NKO

Tristel Duo ORL is een schuim op basis van chloordioxide (ClO_2) voor de **hoog-niveau desinfectie** van medische hulpmiddelen zonder werkkanaal in de NKO.


Tristel Duo ORL is binnen 30 seconden doeltreffend tegen risicovolle micro-organismen zoals tuberculose (TB), *Staphylococcus aureus*, adenovirus, coronavirussen zoals SARS-CoV-2 en *Candida auris*.

Tristel Duo ORL bevat een tensio-actieve stof waardoor het ook een werkzame **reiniger** is.



Tristel Duo™
ORL

SIMPEL IN GEBRUIK: AANBRENGEN, 30 SEC LATEN INWERKEN !

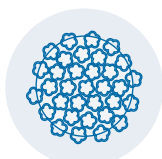

Vernietigt HPV op echte medische hulpmiddelen¹




Actieve oplossing geclassificeerd als niet-gevaarlijk volgens de CLP



Lage concentratie (200 ppm tijdens het gebruik)



Weinig- & minder corrosief dan chloor, perazijnzuur en waterstofperoxide

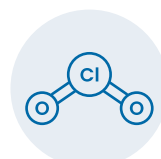

Geen antimicrobiële resistentie mogelijk tegen ClO_2



Duurzaamheid: ClO_2 vervalt in zouten

HOOG-NIVEAU DESINFECTIE DANKZIJ TRISTELS ClO_2



CITROENZUUR



NATRIUMCHLORIET



ClO_2



NATRIUMCITRAAT



ZOUT

TRISTEL DUO ORL IS SPORICIDE, MYCOBACTERICIDE, VIRUCIDE, FUNGICIDE EN BACTERICIDE BINNEN EEN UNIFORME CONTACTTIJD VAN 30 SECONDEN

Humaan Papillomavirus (HPV)

HPV-types 16 en 18 vormen de belangrijkste oorzaken ter wereld van de toename in kankers in de oropharynx, het hoofd en de nek.

Mycobacteriën

Tuberculose (TB) kan voorkomen in de neus-, keel- en oorzone en kan potentieel patiënten met een verzwakt immuunsysteem doden.

Staphylococcus aureus

Een micro-organisme dat resistent kan worden tegen medicatie, het veroorzaakt infecties die de huid en zacht weefsel verwoesten.

Coronavirus

SARS-CoV-1 en SARS-CoV-2 zijn virussen die via ademhalingsdruppels door de lucht verspreid worden. Ze zijn verantwoordelijk voor een wereldwijde toename in luchtweg-gerelateerde overlijdens.

Pseudomonas aeruginosa en Adenovirus

Twee van de meest voorkomende oorzaken van otitis media, oftewel een ontsteking van het middenoor.

Aspergillus brasiliensis

De meest voorkomende oorzaak van otomycose, een schimmelinfectie van het oor.

Candida albicans

De meest voorkomende oorzaak van schimmel-infecties in de mens, waaronder otomycose.

CONFORM

Tristel Duo ORL is getest in overeenstemming met de Europese norm EN 14885 en de meest recente wettelijke vereisten voor de werkzaamheid van desinfectiemiddelen gebruikt in de medische sector. Dit hoog-niveau desinfectiemiddel is gevalideerd aan de hand van suspensietests (fase 2, stap 1) en tests op een substraat en/of oppervlak waarbij de reële gebruiksomstandigheden werden gesimuleerd. (fase 2, fase 2).

MOBIEL


Tristel Duo ORL is altijd bij de hand. Het is het enige hoog-niveau desinfectiemiddel dat met het medisch hulpmiddel en de dokter meereist. Het kan direct worden meegenomen naar de patiënt elke keer er verzorging vereist is.

SNELLE WERKING


De hoog-niveau desinfectiestap met Tristel Duo ORL duurt slechts 30 seconden om te voltooien. Uw medische hulpmiddelen zijn sneller terug beschikbaar, waardoor u meer patiënten kunt ontvangen.

TOEPASSINGEN

Tristel Duo ORL is speciaal ontworpen voor de hoog-niveau desinfectie van medische hulpmiddelen zonder werkkanal in de neus-, keel- en oorziekten (NKO).

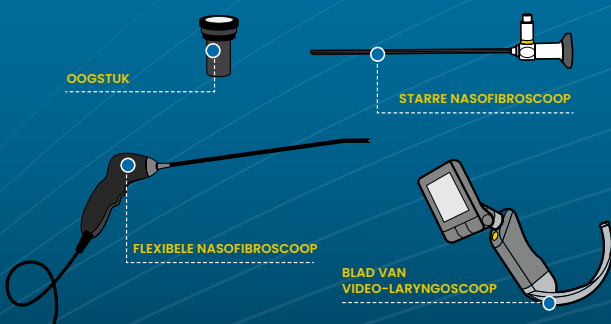

TEST OVERZICHT

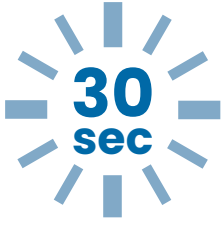	Europese Normen	Uniforme Contacttijd
Bacteriën	EN 13727 (F2 - S1)	
	EN 14561 (F2 - S2)	
	EN 16615 (F2 - S2)	
Gisten/ Schimmels	EN 13624 (F2 - S1)	
	EN 14562 (F2 - S2)	
	EN 16615 (F2 - S2)	
Virussen	EN 14476 (F2 - S1)	
Mycobacteriën	EN 14348 (F2 - S1)	
	EN 14563 (F2 - S2)	
Bacteriële Sporen	EN 17126 (F2 - S1)	

F = Fase - S = Stap

Duo Wipes zijn speciaal ontworpen voor het aanbrengen van Tristel Duo ORL

Duo Wipes droge doekjes zijn gemaakt van 100% pluisarm, niet-geweven polypropyleen (18g/m²), en zijn voorgesneden om verspilling te voorkomen wanneer ze uit de verpakking worden gehaald.

Ze worden gebruikt met Tristel Duo ORL om medische hulpmiddelen te desinfecteren.

Tristel Duo ORL : bevat geen alcohol, noch ammoniumchloriden.

Medisch hulpmiddel klasse IIb.



DUO DOK

- Ontworpen om Tristel Duo ORL binnen handbereik te houden/5 Duo DOK per doos (TSL023401)

TRISTEL DUO ORL

- 125 ml Tristel basis-oplossing (citroenzuur) + 125 ml oplossing Tristel activeringsmiddel (natriumchloriet)
- Tristel ClO₂ chemie wordt gegenereerd door deze twee oplossingen met één druk op de pomp te mengen (0,8 ml schuim per dosis)
- 310 dosissen, of 155 procedures, per flacon
- 2 flacons per doos (TSL023801)
- 6 flacons per doos (TSL022801)

DUO WIPES

- 200 doekjes per verpakking, 6 verpakkingen per doos
- 6X200 Duo Wipes (TSL031601)

Tristel™

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

België: Tristel NV, Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-nl/

Geproduceerd door: Tristel Solutions Limited, Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell Cambridgeshire, UK, CB8 7NY - T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

I. Meyers, C. Milici, J. Robison, R. (2020) 'The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jmv.25666.

Informatie over de octrooien op: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Bro-1786-3
25/APR/2024

Pagina 2 van 2