



CHLOORDIOXIDE (ClO₂) REINIGEND EN DESINFECTEREND SPORICIDE

CONTROLES VOOR GEBRUIK

Enkele belangrijke aandachtspunten voordat u begint :

- ✓ Gebruik desinfectiemiddelen op een veilige manier.
- ✓ Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
- ✓ Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- ✓ **FUSE** is uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgprofessionals.
- ✓ Niet gebruiken op zachte metalen of roestvrij staal van lage kwaliteit.
- ✓ Bereid **FUSE** in een goed geventileerde ruimte en zorg ervoor dat het oppervlak vrij is van vervuiling voor gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Neem een zakje. Vouw het zakje dubbel en druk vervolgens op één zijde om de centrale verzegeling tussen de twee oplossingen te breken. Wacht 5 minuten totdat de twee oplossingen zich mengen en de inhoud geel wordt.



2. Giet ondertussen 5 liter water op kamertemperatuur in een emmer. Gebruik geen warm water.



3. Scheur of knip het zakje open en giet de inhoud in de emmer met 5 liter water. Houd het zakje daarbij onder de waterlijn om spatten te voorkomen.



4. Breng de oplossing aan op het oppervlak met behulp van een dweil voor vloeren of een geschikte reinigingsdoek voor andere oppervlakken.



5. Zorg ervoor dat het oppervlak gedurende 5 minuten nat blijft. Breng indien nodig extra oplossing aan. Laat drogen.

BEWAARVOORSCHRIFTEN

De **FUSE**-zakjes zijn voor opening 3 jaar houdbaar en moeten worden bewaard op een koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht, bij een temperatuur tussen 10 °C en 35 °C. Na vermenging met water kan de oplossing 24 uur bewaard worden in een hermetisch afgesloten container. Verwijder de oplossing en de verpakking volgens de lokale voorschriften.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.