

KLAAR OM HET REINIGEND EN DESINFECTEREND MIDDEL JET LUX TE GEBRUIKEN? HIER GAAN WE.

CONTROLES VOOR GEBRUIK

Enkele belangrijke aandachtspunten voordat u begint :

- ✓ Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
- ✓ Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- ✓ Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- ✓ **JET LUX** is uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgprofessionals.
- ✓ Niet aanbrengen op oppervlakken uit messing, koper, aluminium, zacht staal of zilver.

GEBRUIKSAANWIJZING



Om **JET LUX** te monteren, neemt u de spuitkop, schroeft u de doppen van de flessen los en volgt u vervolgens de markeringen **A (rood)** en **B (blauw)** die op het etiket van de flessen staan. Plaats de rode buis in de zijde van de fles gemarkeerd met een **rode A** en de blauwe buis in de zijde van de fles gemarkeerd met een **blauwe B**.



Draai de vergrendelingen aan beide zijden van de spuitkop tegen de klok in om deze te vergrendelen. Controleer of de spuitkop uitgelijnd is met de bovenste markering op de kop van de verstuiver. **JET LUX** is nu klaar voor gebruik.



Breng minstens 2 doses aan op één doekje.



Veeg het oppervlak schoon.



Zorg ervoor dat het oppervlak gedurende één minuut contacttijd nat blijft. Laat drogen aan de lucht.



Indien recyclage niet mogelijk is, hergebruik het dan ! Raadpleeg de rubriek « BELANGRIJK » hieronder voor meer informatie.

BELANGRIJK

Uw **JET LUX**-spuitkop moet worden hergebruikt met de tweede **JET LUX**-fles. Om dit te doen, draait u de vergrendelingen met de klok mee los om de spuitkop te verwijderen. Voordat u de bovenstaande montage-instructies volgt, spoelt u de buisjes met stromend kraanwater en droogt u deze af met een papieren doek.

Na gebruik kunnen de lege **JET LUX**-flessen en -doppen worden afgespoeld met kraanwater en vervolgens worden gerecycleerd.

 Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

BEWAARVOORSCHRIFTEN

JET LUX is voor opening 2 jaar houdbaar en moet worden bewaard op een koele en droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht, bij een temperatuur tussen 10 °C en 35 °C. Controleer de vervaldatum op het etiket van de fles.

Na opening blijft **JET LUX** 6 maanden houdbaar. U kunt deze termijn opvolgen door de openingsdatum van **JET LUX** op het etiket van de fles te noteren (met een watervaste pen).

