




VERNIEUWDE SPORICIDE DESINFECTIE

JET LUX is een sporicide chloordioxideschuim. Met elke schuimdosis kan je oppervlakken behandelen waar microben een risico vormen, zoals patiëntenbedden, toetsenborden en schermen.


JET LUX is Tristel's vernieuwde en uitermate gebruiksvriendelijke **JET**-formule.



**GEEN GEVAREN-
PICTOGRAM
GEBRUIKS-
VRIENDELIJK**

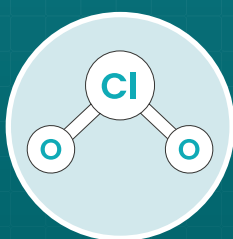

**SPORICIDALE
DESINFECTIE MET
TRISTEL ClO₂**

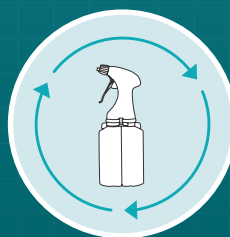

**HERBRUIKBARE
SPUITKOPPEN**



**UNIFORME
CONTACTTIJD
VOLLEDIG
EFFECTIEF IN
1 MINUUT**

TRISTEL CHLOORDIOXIDE (ClO₂)

JET LUX is gebaseerd op dezelfde chloordioxide (ClO₂)-chemie als de Tristel-producten voor het desinfecteren van medische hulpmiddelen.

JET LUX bestaat uit twee afzonderlijke compartimenten die respectievelijk een basisoplossing (citroenzuur) en een activatoroplossing (natriumchloriet) bevatten. Wanneer deze worden gemengd door de spuitkop van **JET LUX** in te duwen, ontstaat er ClO₂-chemie.



- ✓ Voorkomt anti-microbiële resistentie (AMR)
- ✓ Bevat geen alcohol of quaternaire ammoniumverbindingen (QAC's)
- ✓ Afbreekbaar in zouten en water
- ✓ Getest op zijn werkzaamheid tegen zowel natte als droge biofilm
- ✓ Reinigende eigenschappen

BEWEZEN EFFECTIEF IN 1 MINUUT TEGEN:


SPORICIDE	EN 17126
MYCOBACTERICIDE	EN 14348
VIRUCIDE	EN 14476
GISTDODEND/FUNGICIDE	EN 13624
	EN 16615
BACTERICIDE	EN 13727
	EN 16615

<i>Clostridioides difficile</i>	<i>Enterococcus hirae</i>
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Bacillus cereus</i>	Carbapenem-resistent Enterobacteriaceae (CRE) <i>Klebsiella pneumoniae</i>
Adenovirus Type 5	Breedspectrum Beta-Lactamase <i>Klebsiella pneumoniae</i> (BSBL)
Murine Norovirus	Methicillin-resistent <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)
Poliovirus Type 1	
Bovine Coronavirus	Multidrug-resistent <i>Acinetobacter baumannii</i> (MDRAB)
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	
<i>Candida albicans</i>	Vancomycin-resistent Enterococci (VRE) <i>Enterococcus faecium</i>
<i>Candidozyma auris</i> (Vroeger <i>Candida auris</i>)	

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Elke fles **JET LUX** bevat 570 doses sporicide chloordioxide-schuim.

**Simpelweg aanbrengen, wipen
en 1 minuut laten inwerken!**

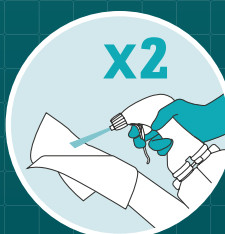

JET LUX is een gebruiksklaar sporicide desinfectiemiddel dat is geclassificeerd als biocide.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

cacheTM

België:
Tristel NV, Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerpen
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-nl/

Aangeboden door TristelTM

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Registratienummer BE-REG-01505.

Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Bro-2393 - 24/JUN/2025 - V2