


stella™


met Pulse & Reinigingssysteem

Reiniging met Tristel Clean voor Stella

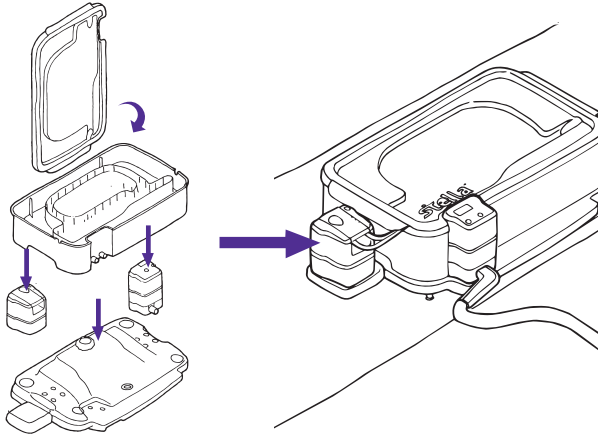

Stap 1


Plaats Stella op een gelijkmatige op een gelijkmatige oppervlakte in de nabijheid van een wasbak of waterafvoer.

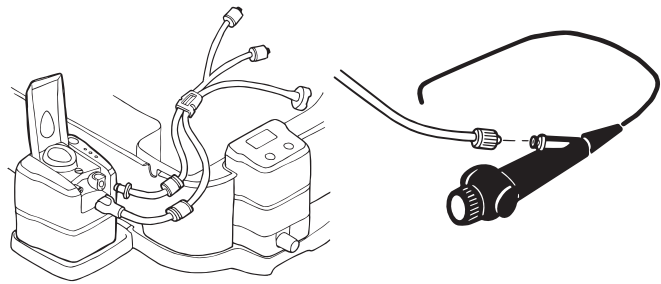

Stap 4


Verbind de buisjes met Pulse en verbind dan de luer sluiting met het kanaal van het instrument. Monteer de buisjes in de zijkant van de Stella container zodat het zuigbuisje in het binnenvak van de Stella container terecht komt.

Let op: Kabels en andere onderdelen van het instrument die niet ondergedompeld kunnen worden dienen buiten de Stella container te blijven via de inkepingen in de zijkant van de container. Als het volledige instrument ondergedompeld kan worden, laat dan de sluitingen op hun plaats.

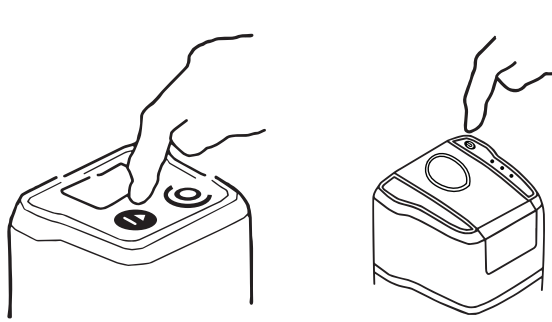


Stap 2

Druk op de “AAN” knop op Stella IQ en Stella Pulse, totdat een geluid hoorbaar is. Stella IQ en Stella Pulse verbinden via Bluetooth. Volg de instructies op het Stella IQ scherm.

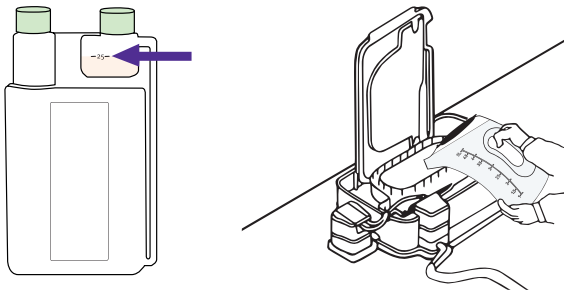


Stap 5

Verdun 25ml van Tristel Clean voor Stella in vijf liter water (kamertemperatuur). Giet dan deze oplossing in het binnenvak van de Stella container.

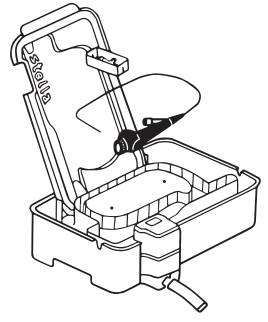

Stap 3

Plaats het voorgereinigde instrument en het bakje voor kleine onderdelen in het binnenvak van de Stella container.

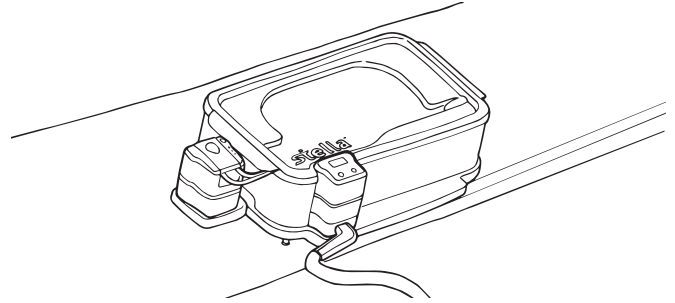

Stap 6


Pas het deksel op de Stella container. Stella IQ telt de contacttijd van de detergent af. Zodra het reinigingsproces compleet is, voert Stella de vloeistof automatisch af.

Hoog-niveau ontsmetting met Tristel Fuse for Stella



Stap 7


Zodra Stella leeg is en klaar is voor het desinfectieproces klinkt er een geluid.

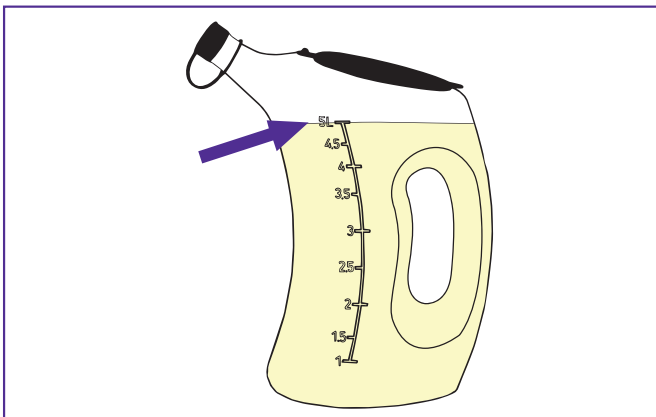

Stap 8

Bereid vijf liter Tristel Fuse voor Stella voor. Verwijs naar de gebruikershandleiding.

Let op: Geen heet water gebruiken.

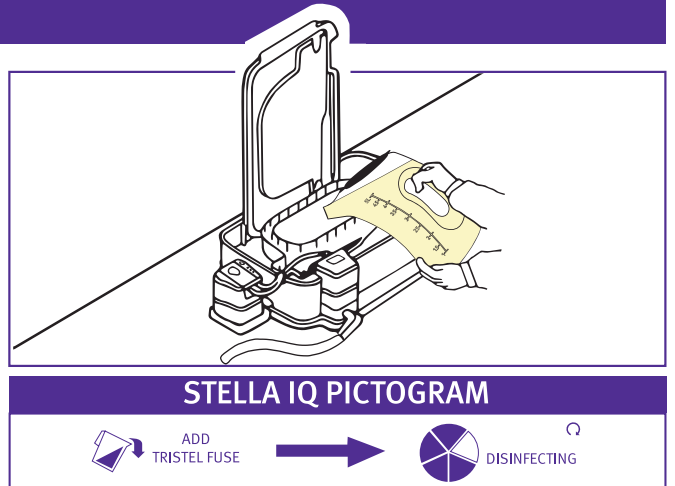


STELLA IQ PICTOGRAM




Stap 9

Giet de Tristel Fuse voor Stella oplossing (vijf liter) in het binnenvak van de Stella container totdat de vloeistof overloopt in het buitenvak van de Stella container. Een piep bevestigt de start van het vijf minuten durende desinfectieproces.

Let op: Als Tristel Fuse niet binnen 10 minuten in Stella wordt gegoten, dan breekt Stella IQ het proces automatisch af.

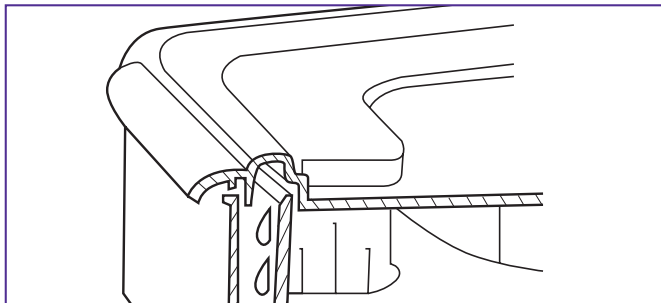

STELLA IQ PICTOGRAM

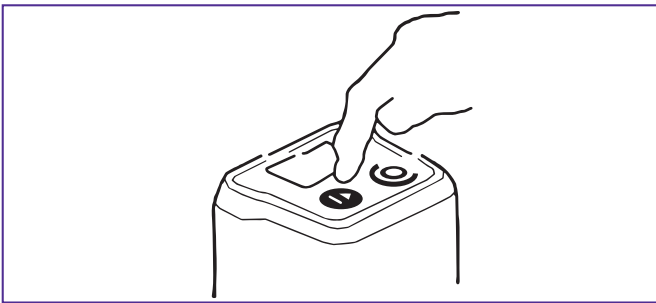


STELLA IQ PICTOGRAM



Stap 11

Druk op de “OK” knop om te bevestigen dat het gedesinfecteerde instrument uit de container verwijderd is alsook om te bevestigen dat het proces compleet is.

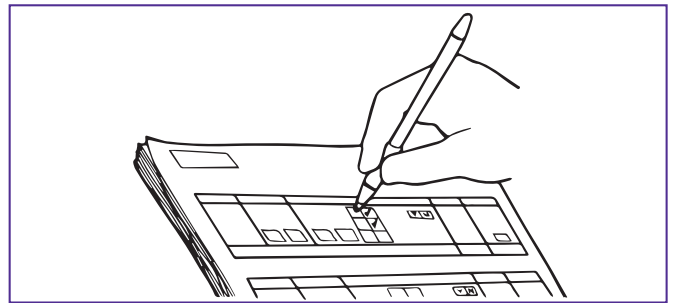

STELLA IQ PICTOGRAM



Stap 12

Neem de bevestigingscode op in de patiëntgegevens of in het Stella Audit Trail Record Book. Stella IQ slaat alle informatie op om op ieder moment te worden gedownload naar een computer. Een nieuw proces can onmiddellijk in gang worden gezet door op de “OK” knop te drukken. Druk op de “UIT” knop om Stella uit te schakelen.

Tristel™

Geproduceerd door: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Voor Tristel octrooi-informatie kunt u terecht op <http://www.our-patents.info/tristel>

ecoméd
Innovatie in medische infectie risico

Exclusieve verdeler Benelux en Frankrijk:
Ecomed NV, Smalldlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België - T 3 889 26 40
Ecomed Nederland bv, Binderij 7 R, 1185 Amstelveen, Nederland - T 020 808 51 34
E info@ecoméd.eu - W www.ecomed.eu

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-483-1
April 2018