

REINIGING EN HIGH-LEVEL DESINFECTIE VAN ECHOGRAFISCHE HULPMIDDELEN

OPMERKINGEN

- Gebruik Tristel CLEAN en Tristel DUO ULT niet als de fles beschadigd of per ongeluk geopend is.
- Desinfecteer uw handen en draag handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het gebruik van desinfectiemiddelen en medische hulpmiddelen. Aanbevelingen met betrekking tot het dragen van PBM kunnen per instelling verschillen. Volg de lokale richtlijnen.
- Als u Tristel CLEAN of Tristel DUO ULT voor de eerste keer gebruikt, druk dan twee tot vier keer op de pomp om deze te activeren.
- Niet gebruiken op zachte metalen of roestvrij staal van mindere kwaliteit.
- Wattenstaafjes kunnen gebruikt worden om Tristel CLEAN en Tristel DUO ULT aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals holtes en groeven.
- Sluit het deksel van de Tristel DRY WIPES-verpakking na elk gebruik. Vul de verpakking niet bij en gebruik deze niet voor andere doeleinden.
- Deze poster moet gebruikt worden in combinatie met de gebruiksaanwijzing (IFU), het productetiket, de veiligheidsinformatiebladen (SDS) en de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel.
- Uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgprofessionals.

GEBRUIKSAANWIJZING



1
x2
Was uw handen en trek schone handschoenen aan. Breng vervolgens minstens **2 doses** Tristel CLEAN aan op een Tristel DRY WIPES-doekje.



2
Reinig het volledige oppervlak van het hulpmiddel **totdat deze zichtbaar schoon is**. Besteed bijzondere aandacht aan de groeven en verbindingen van het hulpmiddel. Gebruik indien nodig extra schuim en doekjes.



3
Plaats het hulpmiddel in de **sondehouder** terwijl u zich voorbereidt op de volgende stap. Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken.



4
Was uw handen en trek nieuwe handschoenen aan.



5
x2
Breng **twee doses** Tristel DUO ULT aan op een Tristel DRY WIPES-doekje.



6
Gebruik het doekje om het schuim over het oppervlak van de **sonde en sondehouder** te verdelen en zorg ervoor dat alle zones volledig bedekt zijn. Gebruik indien nodig een wattenstaafje om het schuim in de groeven aan te brengen. Gebruik indien nodig extra schuim en doekjes.



7
Plaats het hulpmiddel inde sondehouder om de **contacttijd van 30 seconden** te respecteren en zorg ervoor dat het hulpmiddel gedurende de volledige contacttijd nat blijft. Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken.



8
Laat aan de lucht drogen en bewaar het medisch hulpmiddel overeenkomstig de ziekenhuisprotocollen om schade of herbesmetting te voorkomen.