

OPMERKINGEN

- Niet gebruiken als de fles beschadigd is.
- Desinfecteer uw handen en draag handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het gebruik van desinfectiemiddelen en medische hulpmiddelen. Aanbevelingen met betrekking tot het dragen van PBM kunnen per instelling verschillen. Volg de lokale richtlijnen.
- Als u Tristel DUO ULT of Tristel CLEAN voor de eerste keer gebruikt, druk dan twee tot vier keer op de pomp om deze te activeren.
- Niet gebruiken op zachte metalen of roestvrij staal van mindere kwaliteit.
- Wattenstaafjes kunnen gebruikt worden om Tristel DUO ULT en Tristel CLEAN aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals holtes of groeven.
- Deze poster moet gebruikt worden in combinatie met de gebruiksaanwijzing (IFU), het productetiket, de veiligheidsinformatiebladen (SDS) en de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel.
- Uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgprofessionals.

GEBRUIKSAANWIJZING



Breng Tristel CLEAN aan op een droog doekje.


Opmerking: DUO WIPES-doekjes worden aanbevolen.



Gebruik voldoende schuim om het volledige oppervlak van het hulpmiddel te bedekken en **veeg totdat deze zichtbaar schoon is**. Besteed bijzondere aandacht aan randen, hoeken, groeven en verbindingen tussen verschillende materialen. Gebruik indien nodig extra schuim en doekjes.



Plaats het hulpmiddel in de **sondehouder** terwijl u zich voorbereidt op de volgende stap.

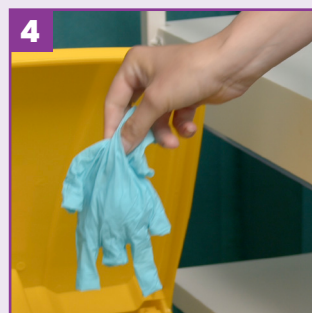

Opmerking: Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken.



Opmerking: Was uw handen en trek nieuwe handschoenen aan.




Breng twee doses Tristel DUO ULT aan op een droog doekje.

Opmerking: DUO WIPES-doekjes worden aanbevolen.



Gebruik het doekje om het schuim over het oppervlak van het hulpmiddel te verdelen en zorg ervoor dat alle zones volledig bedekt zijn. Gebruik indien nodig een wattenstaafje om het schuim in de groeven aan te brengen.

Opmerking: Gooi het gebruikte doekje weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken.

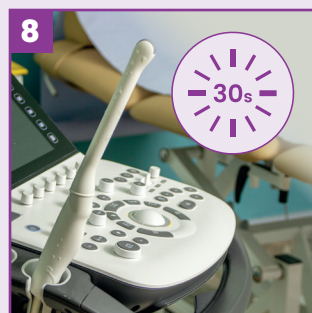

Zorg ervoor dat het hulpmiddel gedurende een minimale **contacttijd van 30 seconden nat blijft**. Laat aan de lucht drogen.

Opmerking: Bewaar het medisch hulpmiddel overeenkomstig de ziekenhuisprotocollen om schade of herbesmetting te voorkomen.