

HIGH-LEVEL DESINFECTIEMIDDEL VOOR SEMI-KRITISCHE OFTALMOLOGISCHE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Dankzij de innovatieve schuimformulering op basis van ClO_2 verzekert Tristel Duo OPH een **high-level desinfectie** van semi-kritische medische hulpmiddelen gebruikt in de oogheelkunde, op slechts 30 seconden tijd.

Tristel Duo OPH bevat een tenso-actieve stof waardoor het schuim ook als **reiniger** werkt.



Tristel Duo™
OPH

SIMPEL IN GEBRUIK: AANBRENGEN, 30 SEC WACHTEN & SPOELEN!



High-level desinfectieschuim voor oogheelkundige medische hulpmiddelen




Actieve oplossing geassocieerd als niet-gevaarlijk volgens de CLP



Lage concentratie (200 ppm tijdens het gebruik)



Weinig- & minder corrosief dan chloor, perazijnzuur en waterstofperoxide

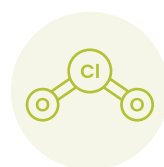

Geen antimicrobiële resistentie mogelijk tegen ClO_2



Duurzaamheid: ClO_2 vervalt in zouten

HIGH-LEVEL DESINFECTIE DANKZIJ TRISTELS ClO_2



CITROENZUUR



NATRIUMCHLORiet



ClO_2



NATRIUMCITRAAT



ZOUT

DOELTREFFEND

Dankzij de unieke ClO_2 chemie van Tristel is het high-level desinfectiemiddel Tristel Duo OPH binnen 30 seconden werkzaam tegen risicovolle micro-organismen zoals :

- *Acanthamoeba castellanii*
(een van de organismen die verantwoordelijk zijn voor *Acanthamoeba keratitis*)
- Adenovirus type 5
- Coronavirus
- *Aspergillus brasiliensis*
- *Candida albicans*
- *Candida auris*
- *Fusarium solani*
- *Staphylococcus aureus*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- Carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE)
Klebsiella pneumoniae
- Vancomycine-resistente enterokokken (VRE)
Enterococcus faecium

TEST OVERZICHT

	Europese Normen	Uniforme contacttijd
Bacteriën	EN 13727 (F2 - S1)	 30 sec F = Fase - S = Stop
	EN 14561 (F2 - S2)	
	EN 16615 (F2 - S2)	
Gisten/ Schimmels	EN 13624 (F2 - S1)	
	EN 14562 (F2 - S2)	
	EN 16615 (F2 - S2)	
Virussen	EN 14476 (F2 - S1)	
Mycobacteriën	EN 14348 (F2 - S1)	
	EN 14563 (F2 - S2)	
Bacteriële sporen	EN 17126 (F2 - S1)	
	EN 17846 (F2 - S2)	

TRACEERBAAR

Inclusief papieren of digitale traceerbaarheid. 3T digitaliseert traceerbaarheid voor een efficiëntere, nauwkeurigere en intelligenter aanpak.

ECONOMISCH

Door het gebruik van Tristel Duo OPH zijn er geen tonometers voor eenmalig gebruik meer nodig, wat leidt tot aanzienlijke besparingen.

SIMPEL

Tristel Duo OPH is gemakkelijk in gebruik. Breng twee dosissen schuim aan op een droog doekje, veeg, wacht 30 seconden en spoel af.

TRAINING

Training en certificering maken deel uit van onze dienstverlening. Gebruik ons online trainingsportaal om te leren waar en wanneer u maar wilt. Lees meer op onze website.

COMPATIBEL


De compatibiliteit van Tristel Duo OPH is getest en bevestigd door belangrijke fabrikanten van medische hulpmiddelen, waaronder:

- DGH Technologies
- Ellex
- Haag-Streit
- Keeler Accutome
- Laboratoires Thea
- Natus Medical
- Nidek
- Quantel Medical
- Reichert Technologies
- Takagi
- Tomey
- Volk

TOEPASSINGEN

Tristel Duo OPH is speciaal ontworpen voor de high-level desinfectie van oogheelkundige medische hulpmiddelen, zoals :

- Diagnostische lenzen
- Herbruikbare tonometerprisma's
- Oogheelkundige ultrasone sondes (A-scan en B-scan sondes)
- Spleetlampen
- Pachymeters

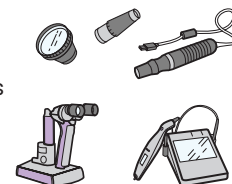

Duo Wipes zijn speciaal ontworpen voor het aanbrengen van Tristel Duo OPH

Duo Wipes droge doekjes zijn gemaakt van 100% pluïarm, niet-geweven polypropyleen ($18\text{g}/\text{m}^2$), en zijn voorgesneden om verspilling te voorkomen wanneer ze uit de verpakking worden gehaald.

Ze kunnen worden gebruikt met Tristel Duo OPH om medische hulpmiddelen te desinfecteren.

Tristel Duo OPH : Bevat geen alcohol, noch ammoniumchloriden.

Medisch Hulpmiddel klasse IIa.



DUO DOK

- Ontworpen om Tristel Duo OPH bij de hand te houden/5 Duo DOK per doos (TSL023401)

TRISTEL DUO OPH

- 125 ml Tristel basis-oplossing (citroenzuur) + 125 ml oplossing Tristel activeringsmiddel (natriumchloriet)
- Tristel ClO_2 chemie wordt gegenereerd door deze twee oplossingen met één druk op de pomp te mengen (0,8 ml schuim per dosis)
- 310 dosissen, of 155 procedures, per flacon
- 2 flacons per doos (TSL023901)
6 flacons per doos (TSL022701)

DUO WIPES

- 200 doekjes per verpakking, 6 verpakkingen per doos
- 6X200 Duo Wipes (TSL031601)

Tristel™



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

België: Tristel NV, Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-nl/

Nederland: Tristel B.V., Wattstraat 4, 4004 JS Tiel, Nederland
T +31 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com - W www.tristel.com/nl-nl

Geproduceerd door: Tristel Solutions Limited, Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK - T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Informatie over de octrooien op:
<http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Bro-732-6
02/MAR/2026

Pagina 2 van 2