


TristelTM

Protect

Voor de opslag en bewaring van uw medische hulpmiddelen.

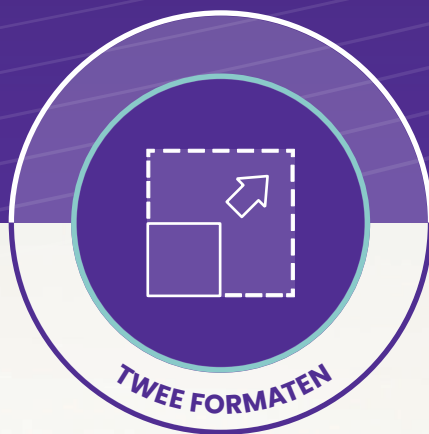

Dé draagbare oplossing voor 72 uur opslag met traceerbaarheid.

Waarom Protect?


Tristel Protect is een opslag- en transportsysteem voor medische hulpmiddelen. Elke Protect-zak is verzegeld met een gepatenteerd, onvervalsbaar etiket, dat duidelijk aangeeft of het medisch hulpmiddel klaar is voor gebruik of opnieuw gedesinfecteerd moet worden. Het label bevat tevens een uniek hersluitbaar vakje waarin traceerbaarheidsgegevens kunnen worden vermeld zonder de decontaminatie van het hulpmiddel in de Protect zak aan te tasten.

Eenmaal verzegeld, kan het medisch apparaat 72 uur lang veilig bewaard worden. Protect garandeert de integriteit van het medisch hulpmiddel en zorgt voor gemoedsrust bij zowel patiënt als de professional.


Protect is verkrijgbaar in twee maten voor een breed scala van gedecontamineerde hulpmiddelen.

Het grootste formaat, **Large Protect**, meet 30 cm bij 70 cm en is ontworpen voor nasendoscopen, intubatie-endoscopen, transvaginale en transrectale ultrasound probes en andere medische hulpmiddelen van gelijke grootte.


Ons kleinste formaat, **Small Protect**, meet 23 cm bij 33 cm en is ontworpen voor apparaten zoals laryngoscoopbladen, manometrie catheters, pachymeters, tonometerprisma's en andere medische hulpmiddelen van gelijke grootte.

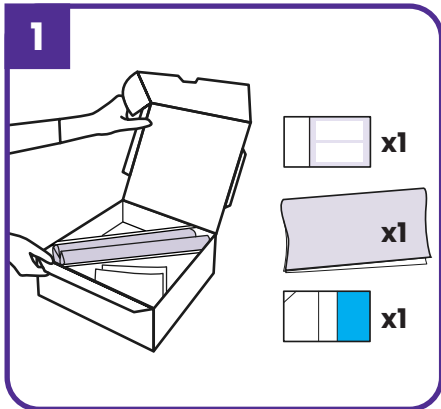


1. Neem uit de doos één Tristel Protect zak, één Protect label en één Protect etiket om de datum en tijd te registreren.

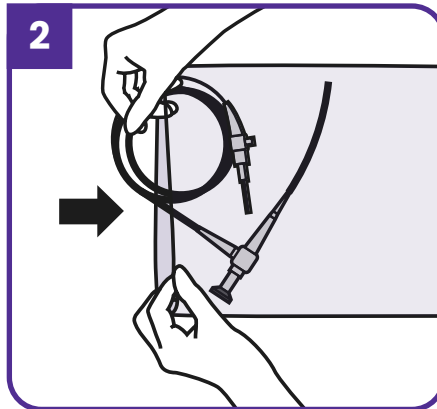


2. Plaats het gedecontamineerde apparaat in de Protect zak.

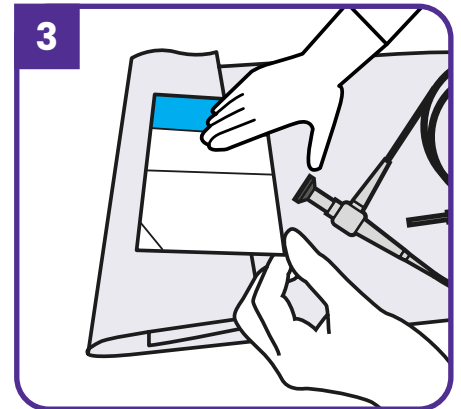


3. Vouw de bovenkant van de Protect zak dubbel en verzegel met het grote Protect label. Kleef het kleinere etiket op de zak en registreer datum en tijd.

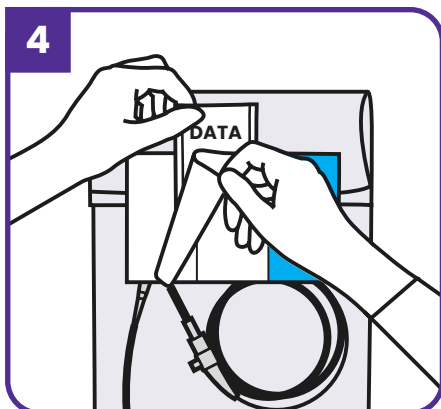

4. Trek de bovenste laag van het Protect label een stukje open en bewaar de traceerbaarheidsgegevens in de aangegeven ruimte.

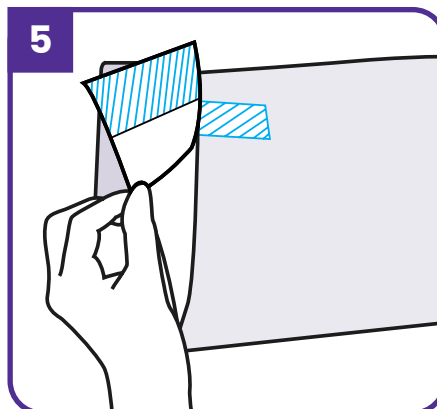

5. Wanneer u het apparaat wilt gebruiken, open Protect maar gooi nog niet weg!

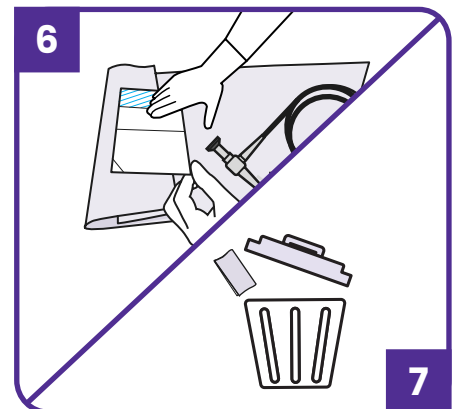

6. Plaats het apparaat na gebruik terug in de Protect zak en hersluit.

Van zodra het apparaat gedesinfecteerd is, kan Protect worden weggegooid.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor volledige instructies.

Tristel

België: Tristel NV/SA
Smallandlaan 14B, 2660 Antwerpen
T +32 (0)3 889 26 40 E belgium@tristel.com
W www.tristel.com/be-nl/

Nederland: Tristel B.V.
Wattstraat 4, 4004 JS Tiel
T +31 (0)20 808 51 34 E nederland@tristel.com
W www.tristel.com/nl-nl/

Scan
voor meer
info over
Protect!

