


OPMERKINGEN

- Gebruik Tristel VISICLEAN of Tristel DUO ULT niet wanneer één van beide flacons beschadigd of per ongeluk geopend is.
- Ontsmet uw handen en draag geschikte handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren van desinfectiemiddelen en medische hulpmiddelen.
- Niet gebruiken op zachte metalen of roestvrij staal van lage kwaliteit.
- Wattenstaafjes kunnen worden gebruikt om Tristel VISICLEAN en Tristel DUO ULT aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen zoals inkepingen of spleten.
- Sluit de dop van de Tristel DRY WIPES na elk gebruik, vul de verpakking niet bij en gebruik het niet voor andere doeleinden.
- Uitsluitend voor professioneel gebruik in de gezondheidszorg.
- Deze gebruikershandleiding dient gebruikt te worden in combinatie met het productlabel, het veiligheidsinformatieblad en de instructies van de fabrikant.
- Tristel VISICLEAN en Tristel DUO ULT kunnen ook gebruikt worden op de kabel en stekker van de probe. Herhaal gebruiksinstructies met een nieuwe Tristel DRY WIPE.


HOE TE GEBRUIKEN

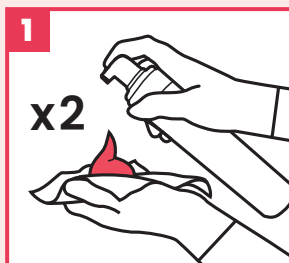

Pomp, met schone handschoenen, **2 doses** Tristel VISICLEAN op een Tristel DRY WIPE.




Bestrijk het hele oppervlak van de probe, zorg ervoor dat alle zichtbaar vuil verwijderd is en dat het gehele oppervlak van het hulpmiddel gelijkmatig gekleurd is. Let goed op bestaande inkepingen en spleten in de probe. Let goed op inkepingen en spleten in het medische hulpmiddel. Gebruik indien nodig extra schuim en doekjes.

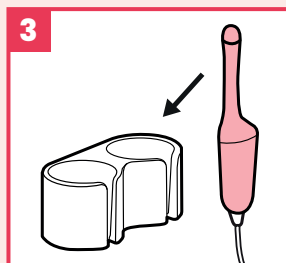


Plaats het apparaat in de **probehouder** terwijl u de volgende stap voorbereidt. Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg volgens de voorschriften van het ziekenhuis. Gebruik ze niet opnieuw.




Reinig uw handen en trek nieuwe handschoenen aan.

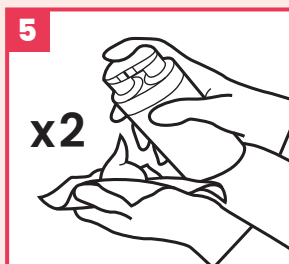


Breng **twee doses** Tristel DUO ULT aan op een Tristel DRY WIPE.

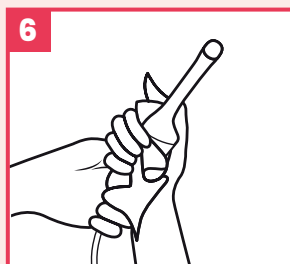

Gebruik het doekje om het schuim over het oppervlak van **de probe en de probehouder** te verdelen en zorg ervoor dat alle kleur verdwenen is. Gebruik indien nodig een wattenstaafje om het schuim ook in de inkepingen te krijgen. Gebruik indien nodig extra schuim en doekjes.

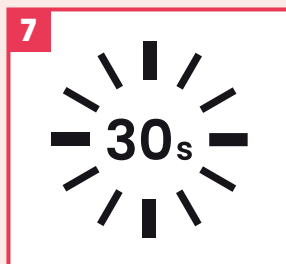

Plaats het apparaat in de probehouder om de contacttijd van **30 seconden** te waarborgen en zorg ervoor dat het medische hulpmiddel gedurende de hele contacttijd nat blijft. Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg volgens de plaatselijke voorschriften. Niet opnieuw gebruiken.

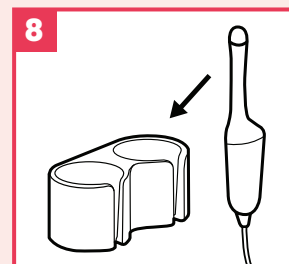

Laat het medische hulpmiddel opdrogen en bewaar het volgens de ziekenhuisprotocollen om schade of herbesmetting te voorkomen.