



stellaTM

met Pulse & Reinigingssysteem


Reiniging met Tristel Clean voor Stella

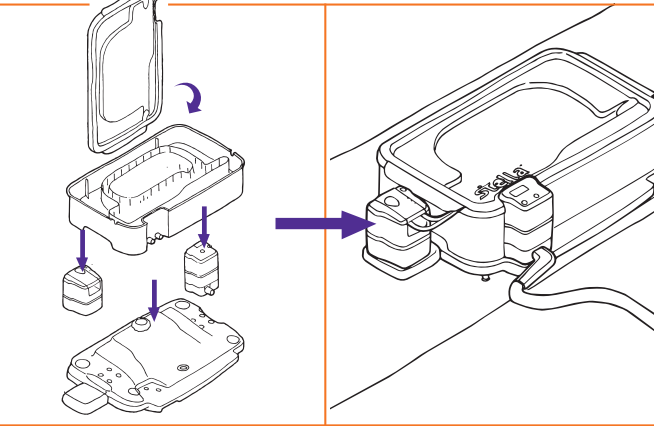

Stap 1
Plaats Stella op een gelijkmatige op een gelijkmatige oppervlakte in de nabijheid van een wasbak of waterafvoer.

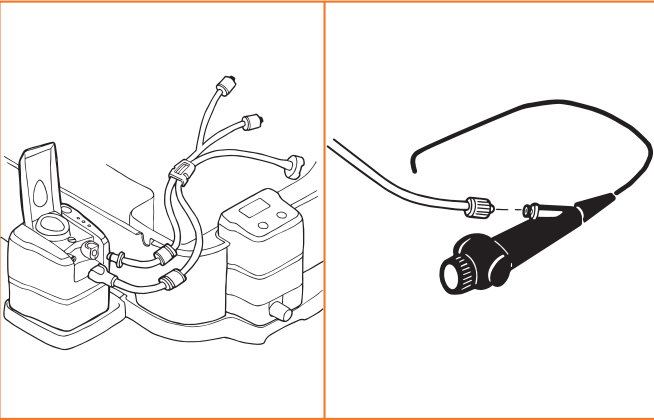


Stap 4
Verbind de buisjes met Pulse en verbind dan de luer sluiting met het kanaal van het instrument. Monteer de buisjes in de zijkant van de Stella container zodat het zuigbuisje in het binnenvak van de Stella container terecht komt.
Let op: Kabels en andere onderdelen van het instrument die niet ondergedompeld kunnen worden dienen buiten de Stella container te blijven via de inkepingen in de zijkant van de container. Als het volledige instrument ondergedompeld kan worden, laat dan de sluitingen op hun plaats.

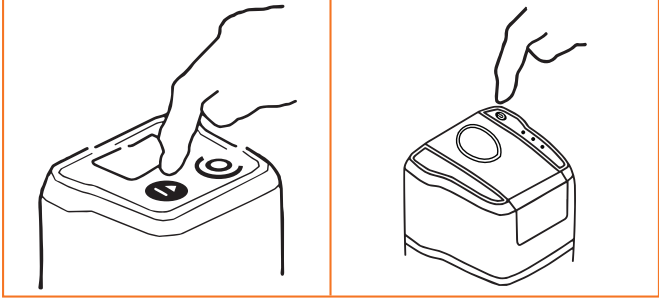


STELLA IQ PICTOGRAM
READ INSTRUCTIONS
BLUETOOTH CONNECTED
stella
PULSE

Stap 2
Druk op de “AAN” knop op Stella IQ en Stella Pulse, totdat een geluid hoorbaar is. Stella IQ en Stella Pulse verbinden via Bluetooth. Volg de instructies op het Stella IQ scherm.

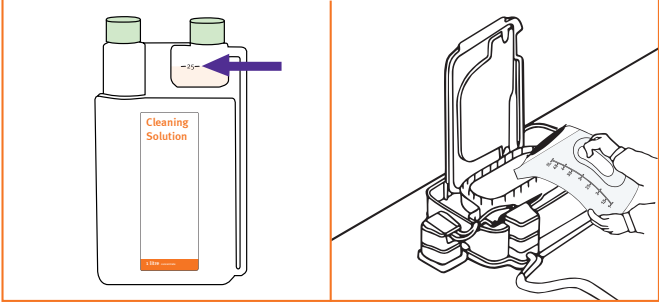


STELLA IQ PICTOGRAM
ADD TRISTEL CLEAN

Stap 5
Verdun 25ml van Tristel Clean voor Stella in vijf liter water (kamertemperatuur). Giet dan deze oplossing in het binnenvak van de Stella container.

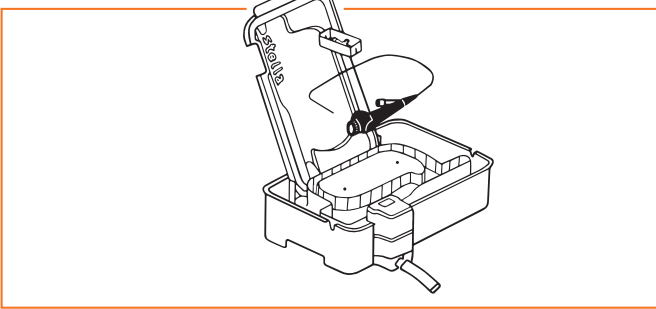

STELLA IQ PICTOGRAM
ADD CLEANED INSTRUMENT


Stap 3
Plaats het voorgereinigde instrument en het bakje voor kleine onderdelen in het binnenvak van de Stella container.

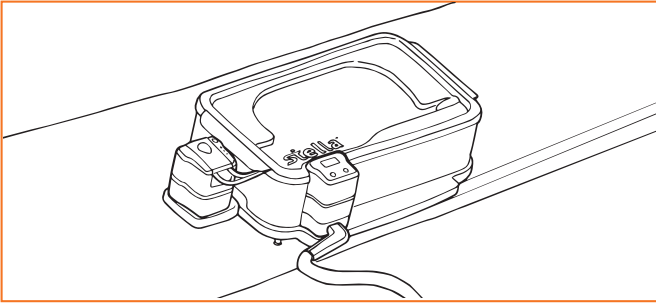


STELLA IQ PICTOGRAM
CLEANING
STELLA DRAINING

Stap 6
Pas het deksel op de Stella container. Stella IQ telt de contacttijd van de detergent af. Zodra het reinigingsproces compleet is, voert Stella de vloeistof automatisch af.


Hoog-niveau ontsmetting met Tristel Fuse for Stella

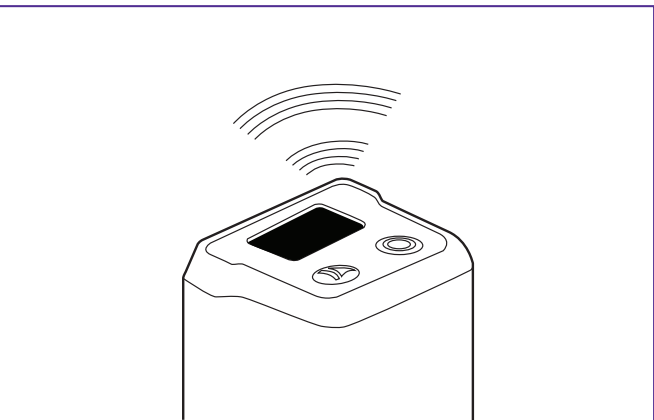

Stap 7
Zodra Stella leeg is en klaar is voor het desinfectieproces klinkt er een geluid.

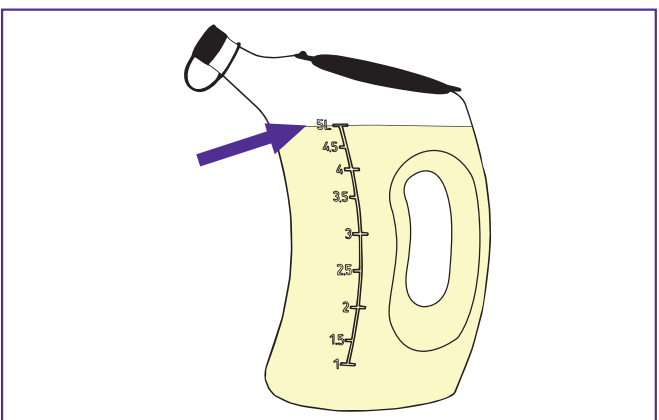


Stap 8
Bereid vijf liter Tristel Fuse voor Stella voor. Verwijs naar de gebruikershandleiding.
Let op: Geen heet water gebruiken.

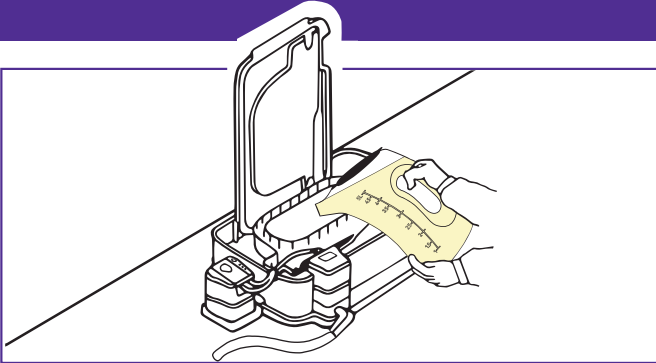


STELLA IQ PICTOGRAM
ADD TRISTEL FUSE
DISINFECTING

Stap 9
Giet de Tristel Fuse voor Stella oplossing (vijf liter) in het binnenvak van de Stella container totdat de vloeistof overloopt in het buitenvak van de Stella container. Een piep bevestigt de start van het vijf minuten durende desinfectieproces.
Let op: Als Tristel Fuse niet binnen 10 minuten in Stella wordt gegoten, dan breekt Stella IQ het proces automatisch af.

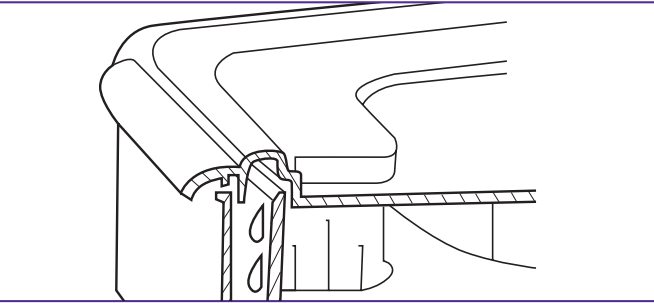


STELLA IQ PICTOGRAM
DISINFECTING
STELLA DRAINING

Stap 10
Plaats het deksel op de Stella container. Dit dwingt de vloeistof tot overlopen in het buitenvak van de container en zorgt voor een volledige afdichting. Stella IQ telt de contacttijd van het desinfectieproces af. Stella IQ instrueert Stella Pulse om gedurende een minuut desinfectiemiddel door het kanaal van het instrument te pompen. Zodra het desinfectieproces compleet is, voert Stella de vloeistof automatisch af.

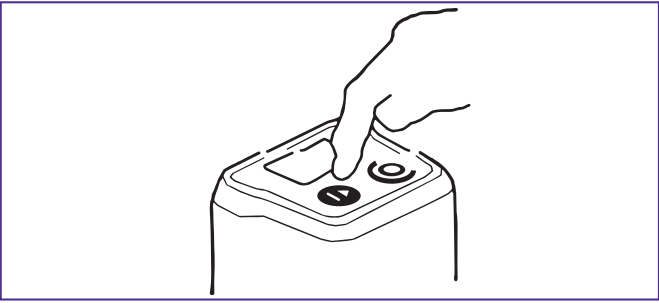

STELLA IQ PICTOGRAM
CONFIRM REMOVAL OF INSTRUMENT
COMPLETE

Stap 11
Druk op de “OK” knop om te bevestigen dat het gedesinfecteerde instrument uit de container verwijderd is alsook om te bevestigen dat het proces compleet is.

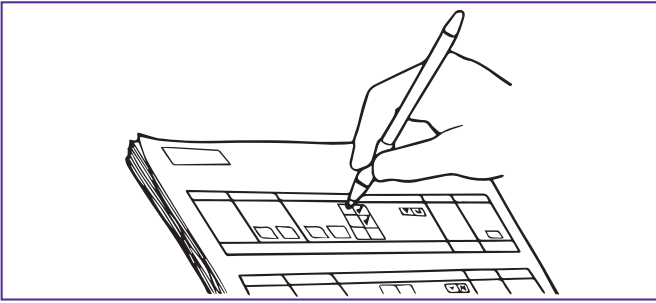

STELLA IQ PICTOGRAM
RESTART CYCLE
VALIDATION CODE FMQP-56

Stap 12
Neem de bevestigingscode op in de patiëntgegevens of in het Stella Audit Trail Record Book. Stella IQ slaat alle informatie op om op ieder moment te worden gedownload naar een computer. Een nieuw proces can onmiddellijk in gang worden gezet door op de “OK” knop te drukken. Druk op de “UIT” knop om Stella uit te schakelen.