


Tristel Duo™

OPH

High-Level-Desinfektionsschaum

FÜR WIEDERVERWENDBARE
TONOMETERKÖPFCHEN

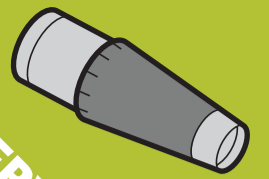

Hinweise:


- Benutzen Sie den Schäumer nicht, wenn dieser beschädigt ist.
- Desinfizieren Sie die Hände und tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn Sie mit Desinfektionsmitteln und Medizinprodukten hantieren.
- Bei erstmaliger Benutzung drücken Sie den Schäumer zwei- bis viermal, um ihn zu justieren.
- Reinigen Sie Medizinprodukte vor der Desinfektion gründlich. Eine verbleibende Kontamination mit organischen Verschmutzungen verringert die Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels. Befolgen Sie für die Reinigung die Standardarbeitsanweisungen und die Anweisungen des Medizinprodukteherstellers.
- Nur für den professionellen Gebrauch.
- Diese Gebrauchsanleitung sollte in Verbindung mit dem Produktetikett, dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) und den Anweisungen des Medizinprodukteherstellers verwendet werden.

SCHRITT 1



Geben Sie 2 vollständige Hübe Tristel Duo auf ein trockenes Tuch (empfohlen werden Duo Wipes) oder direkt auf das Tonometerköpfchen.

SCHRITT 2

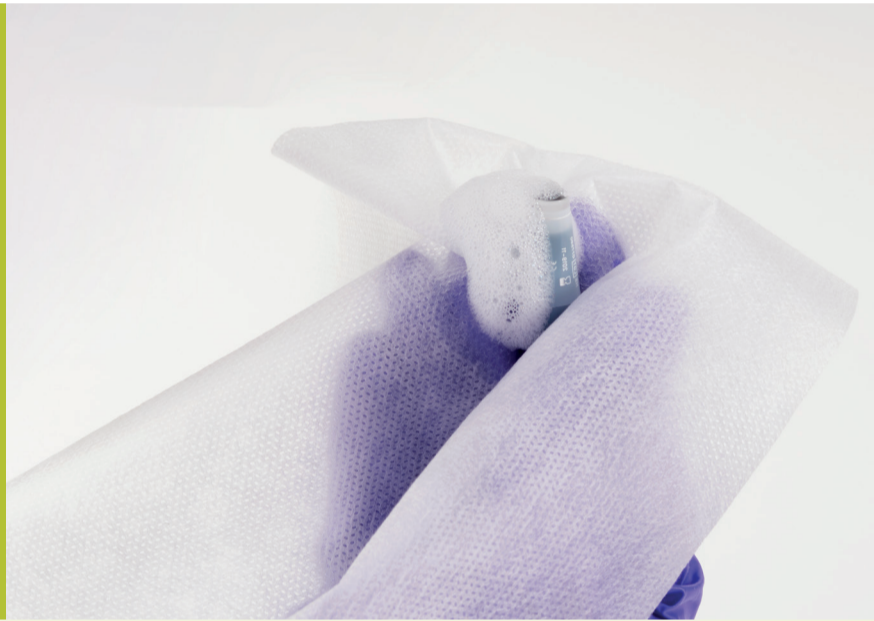

Stellen Sie sicher, dass alle Flächen des Tonometerköpfchens ausreichend benetzt werden. Nutzen Sie ggf. weitere Hübe Duo.

Hinweise: Anhaltendes Wischen der Oberfläche ist nicht erforderlich und sollte unterlassen werden, um ein Auseinanderreißen des Tuches zu vermeiden. Führen Sie genutzte Tücher gemäß den lokalen Bestimmungen dem Abfall zu. Sie sind nicht zur mehrmaligen Verwendung geeignet.

SCHRITT 3



Lassen Sie die Oberfläche trocknen, um eine Mindesteinwirkzeit von **30 Sekunden** sicherzustellen.

SCHRITT 4



Spülen Sie das Instrument mit Wasser geeigneter Qualität.

Hinweise: Lagern Sie das Medizinprodukt gemäß der Standardarbeitsanweisung, um Beschädigungen oder Rekontaminationen zu vermeiden.

Tristel™
WE HAVE CHEMISTRY.

Erstellt von:
Tristel Solutions Limited
T +44 (0)1638 721500
E email@tristel.com

Deutschland & Österreich:
Tristel GmbH
T + 49 (0)30 54844226
E vertrieb@tristel.com

Schweiz:
Tristel AG
T + 49 (0)30 54844226
E schweiz@tristel.com

Informationen zu Tristels Patenten unter: <http://www.our-patents.info/tristel>
Copyright © Tristel Solutions - Mkt-Wal-465-5 - Nov 2021