

TRISTEL 3T IST EIN DIGITALES DOKUMENTATIONSSYSTEM, WELCHES ENTWICKELT WURDE, UM DIE SCHULUNG, DOKUMENTATION UND NACHVERFOLGUNG DES AUFBEREITUNGSPROZESSES EFFIZIENT, SICHER UND PRÄZISE ZU GESTALTEN




## DAS 3T PORTAL

PASSWORTGESCHÜTZTES PORTAL ZUR EINRICHTUNG VON 3T SOWIE ZUR DATENVERWALTUNG UND BERICHTERSTELLUNG

ERFASST ALLE AUFBEREITUNGS-AUFZEICHNUNGEN ZUM EXPORT IN CSV

ERMÖGLICHT 3T-ADMINISTRATOREN EINE ZENTRALE UND SICHERE DATENORGANISATION UND ÜBERBLICK AUF KNOPFD RUCK

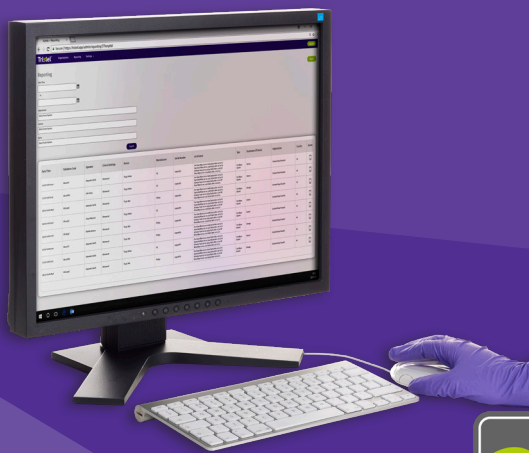

## DIE 3T APP

ERFASST BENUTZER DER 3T-APP, DESINFEKTIONSMITTEL, INSTRUMENT UND PATIENTENDATEN UNTER EINHALTUNG DER DSGVO

FÜHRT DIE BENUTZER DER 3T-APP DURCH DIE EINZELNEN AUFBEREITUNGSSCHRITTE, INDEMN AUF WUNSCH KURZE VIDEOS ABGESPIELT WERDEN

ERSTELLT EIN 3T-LOGBUCH, DAS EINEN DIGITALEN DATUMS- & ZEITSTEMPEL SOWIE EINEN EINZIGARTIGEN BESTÄTIGUNGSCODE ZUR EINFACHEN NACHVERFOLGUNG ENTHÄLT

SYNCHRONISIERT DIE AUFBEREITUNGS-AUFZEICHNUNGEN MIT DEM 3T-PORTAL, WENN EINE WLAN-VERBINDUNG BESTEHT



### SICHER

Datenspeicherung innerhalb der EU - Microsoft Azure Cloud



### SCHNELL

Beschleunigt jeden manuellen Nachverfolgungsprozess



### PRÄZISE

Papierloses Dokumentationsverfahren - keine handschriftlichen Aufzeichnungen mehr



### SMART

Das erste und einzige App-basierte Nachverfolgungssystem für die Aufbereitung mit Tristel-Produkten



### EINRICHTUNG IHRES BENUTZERKONTOS



### AUFZEICHNUNG VON BENUTZER, TRISTEL-PRODUKT, INSTRUMENT & PATIENTENDATEN



### AUFBEREITUNG IHRES INSTRUMENTS



### NACHVERFOLGUNG DES AUFBEREITUNGSPROZESSES



### ÜBERPRÜFUNG UND ERSTELLUNG VON BERICHTEN ZU AUFGEZEICHNETEN DATEN

# NACHVERFOLGBARKEIT DIGITAL

Tristel 3T wurde entwickelt, um Nachverfolgbarkeit und Compliance auf intelligente und effiziente Weise zu ermöglichen. Das Tool umfasst ein Portal zur Einrichtung, Datenverwaltung und Berichterstellung und eine App zum Aufzeichnen von Aufbereitungsprozessen mit Tristel.



### ERFASSUNG DES GESAMTEN PROZESSES

Die 3T-App erfasst den Benutzer, die verwendeten Tristel-Produkte (Chargennummer und Verfallsdatum) sowie Angaben zum Instrument und bei Bedarf auch eine Patientenreferenz. Angaben zum Tristel-Produkt können manuell eingegeben werden, oder indem der 2D-Matrix-Barcode auf den Tristel-Sachets eingescannt wird.



### OPTIONALE SCHULUNG

Kurze Videos in der 3T-App leiten die Benutzer bei jeder Aufbereitung an, um sicherzustellen, dass die Anwendungshinweise befolgt werden. Wenn ein Benutzer sich mit der Verwendung des Tristel-Produkts bereits gut auskennt, kann der 3T-Administrator diese Videos für diesen Benutzer deaktivieren, indem er einfach das Häkchen an dem Videokästchen im Portal wegklickt. Falls eine Auffrischung nötig ist, können die Videos mit nur einem Klick wieder aktiviert werden.



### BERÜHRUNGSLOSE BEDIENUNG

Wenn die Option „Schulungsvideos“ aktiviert ist, können die Benutzer der 3T-App durch das Abdunkeln der Frontkamera am 3T-Gerät (also durch „Winken“) durch die einzelnen Schritte navigieren.

So ist keinerlei Kontakt zwischen den behandschuhten Händen der Benutzer und dem 3T-Gerät während des Aufbereitungsprozesses erforderlich.



### SICHERHEIT & DATENSCHUTZ

3T wird von Tristel auf einem EU-Server der Microsoft Azure Cloud gehostet. Microsoft hat Maßnahmen zur Datensicherung ergriffen und verfügt über 20 Sicherheitszertifikate zum Cloud-Computing darunter auch ISO 27001 (Informationssicherheit) und ISO 27018 (persönlicher Datenschutz). Microsoft hält sich zudem an internationale sowie branchenspezifische Compliance-Normen und unterzieht sich strengen Prüfungen durch Dritte, die die Sicherheitskontrollen verifizieren. Außerdem wurde 3T gemäß der aktuellen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entwickelt, die am 25. Mai 2018 in Kraft trat.



### PAPIERLOSE DOKUMENTATION

Von der 3T-App erstellte Aufbereitungsaufzeichnungen sind digital. Die Synchronisation zwischen App und Portal erfolgt, wenn eine WLAN-Verbindung besteht. Nach Abschluss eines Aufbereitungsvorgangs erstellt die 3T-App eine digitale Aufbereitungsaufzeichnung mit Datums- & Zeitstempel und einem einzigartigen Bestätigungscode.

Jede Aufzeichnung wird in das Logbuch der 3T-App geladen und mit dem 3T-Portal synchronisiert, sofern eine WLAN-Verbindung besteht. 3T-Administratoren können über das Portal auf alle Aufbereitungsaufzeichnungen zugreifen und sie in eine CSV-Datei exportieren.

### WAS IST IM PREIS INBEGRIFFEN:

- 3T-Gerät mit vorinstallierter 3T-App zur Aufzeichnung von Aufbereitungsprozessen mit Tristel
- Zugriff auf das 3T-Portal
- Ladezubehör
- Kundendienst (2 Jahre)
- Garantie (1 Jahr)



### ENTWICKELT VON:

# Tristel™

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Tristel-Außendienstmitarbeiter oder senden Sie uns eine E-Mail an: [3Tsupport@tristel.com](mailto:3Tsupport@tristel.com)

**Erstellt von:** Tristel Solutions Limited  
Lynx Business Park, CB8 7NY Cambs, UK  
T +44 (0)1638 721500 - W [www.tristel.com](http://www.tristel.com)

**Deutschland, Österreich:** Tristel GmbH,  
Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Deutschland  
T +49 (0)30 54844226 - E [berlin@tristel.com](mailto:berlin@tristel.com) - W [www.tristel.de](http://www.tristel.de)

**Schweiz:** Tristel AG,  
Sandgrube 29, 9050 Appenzell, Schweiz  
T +41 (0)71 5670658 - E [schweiz@tristel.com](mailto:schweiz@tristel.com) - W [www.tristel.com](http://www.tristel.com)