

MOUSSE DE NETTOYAGE TRI-ENZYMATIQUE POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Tristel Clean est spécialement conçu pour le nettoyage des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs sans canal opérateur.

Tristel Clean peut être utilisé comme un produit de nettoyage seul, ou avant une désinfection.

La désinfection n'est efficace que lorsque le dispositif médical a fait l'objet d'un nettoyage minutieux.

Aucun rinçage n'est nécessaire après l'utilisation de Tristel Clean seul, ou avant l'utilisation d'un désinfectant Tristel.



TristelTM
Clean

TRISTEL CLEAN EST MOBILE, PRATIQUE & COMPATIBLE



TRI-ENZYMATIQUE
CONFORME AUX NORMES
DE NETTOYAGE



LONGUE DURÉE
SE CONSERVE 2 ANS



MOBILE
POIDS LÉGER &
MANIPULATION SIMPLE



COMPATIBLE
APPROUVÉ PAR LES
PRINCIPAUX FABRICANTS



PRATIQUE
PAS DE TREMPAGE
NÉCESSAIRE



MOUSSE
NE S'APPLIQUE PAS COMME
UN AÉROSOL

TRISTEL CLEAN EST CONFORME AUX DERNIÈRES EXIGENCES DE LA SF2H RECOMMANDANT
UNE PHASE DE NETTOYAGE SUIVIE D'UNE PHASE DE DÉSINFECTION

TRISTEL CLEAN EST FACILE À UTILISER: IL SUFFIT DE L'APPLIQUER ET DE L'ESSUYER



1
RÉPARTISSEZ TRISTEL CLEAN SUR UNE LINGETTE SÈCHE.

Nous recommandons l'utilisation des lingettes Duo Wipes.



2
NETTOYEZ L'APPAREIL JUSQU'À L'ÉLIMINATION VISIBLE DE TOUTE SOUILLURE ET MATIÈRE ORGANIQUE.

Si l'appareil est fortement encrassé, répétez l'opération.



3
SI NÉCESSAIRE, DÉSINFECTEZ LE DISPOSITIF MÉDICAL CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE DÉSINFECTION.

Consultez le mode d'emploi du produit désinfectant Tristel pour des instructions complètes.

APPROUVÉ PAR LES FABRICANTS ET ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION RÉGIONAUX

Tristel Clean est conçu pour être utilisé sur les dispositifs médicaux avant la désinfection avec Tristel Duo, Tristel Fuse for Stella ou Tristel Trio Wipes System. Il peut également être utilisé comme produit de nettoyage autonome pour des procédures telles que les échographies non critiques.

La formule Tristel Clean est utilisée depuis plus de vingt ans dans les lingettes Tristel Pre-Clean et son utilisation est approuvée par les principaux fabricants tels que :

- Advanced Tactile Imaging, Inc.
- Arthrex
- ATMOS MedizinTechnik
- Becton Dickinson (Bard Access, CareFusion)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon (Toshiba)
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- Crystal Photonics
- DWL Compumedics
- Echosens
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- FUJIFILM (Fujinon)
- FUJIFILM (Hitachi)
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Haag-Streit
- Karl Storz
- Laborie (Cogentix Medical, MMS)
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Medtronic (Aircraft Medical, Given Imaging/Covidien)
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orvision
- Pentax
- Philips
- Polydiagnost
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- Southern Scientific/Care Wise
- tic Medizintechnik
- Unisensor
- Verathon
- XION Medical

DUO WIPES

- 6 packs de 320 lingettes sèches par carton



TRISTEL CLEAN

- Pour un nettoyage en profondeur avant tout processus de désinfection
- 6 flacons de 310 doses par carton