

Tristel Duo™

ORL

TRISTEL DUO ORL EST CONFORME AUX EXIGENCES NORMATIVES IMPOSÉES PAR LA SF2H

DÉTRUIT LE HPV SUR LES DISPOSITIFS
MÉDICAUX EN CONDITIONS RÉELLES¹



LA DÉSINFECTION GRÂCE À LA CHIMIE ClO₂ : LE DIOXYDE DE CHLORE

- Désinfectant de haut niveau
- Efficace contre le spectre complet de micro-organismes préoccupants
- Rapide: temps de contact court et uniforme (30 secondes)
- Solution de travail classée comme non-toxique selon le CLP
- Peu corrosive
- Faible concentration (100 à 200 ppm)

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR LA DÉSINFECTION DES DISPOSITIFS EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Tristel Duo ORL, Tristel Clean et les Duo Wipes permettent de réaliser une procédure de désinfection conforme aux dernières exigences de la SF2H sur la désinfection des dispositifs médicaux en oto-rhino-laryngologie (ORL).

Tristel Clean

Les salissures importantes peuvent réduire l'efficacité d'une procédure de désinfection. Par conséquent, le nettoyage en profondeur des dispositifs médicaux est une étape essentielle. Tristel Clean est une mousse tri-enzymatique spécifiquement conçue pour le nettoyage des dispositifs médicaux tels que ceux utilisés en ORL.

Tristel Duo ORL

Tristel Duo ORL est une mousse désinfectante de haut niveau qui permet de réaliser, grâce à la chimie Tristel ClO₂, une désinfection des nasofibrosopes flexibles et rigides sans canal opérateur, des lames de vidéo-laryngoscopes, des embouts oculaires, des moniteurs et des écrans. Tristel Duo ORL permet de réaliser une désinfection des dispositifs médicaux en ORL telle que recommandée par la SF2H en un temps de contact court et uniforme de 30 secondes.

Duo Wipes

Les lingettes Duo Wipes sont des lingettes sèches non tissées, douces, durables, peu pelucheuses et destinées à l'application de Tristel Duo ORL : nul besoin de les déchirer pour les séparer, faiblement absorbantes pour une distribution maximale de désinfectant, adaptées aux doses délivrées par Tristel Duo ORL et conditionnées dans un emballage facile à refermer, stocker et recycler.

Lors de l'utilisation de Tristel Clean pour le nettoyage et de Tristel Duo ORL pour la désinfection de haut niveau, aucun rinçage intermédiaire n'est nécessaire entre les deux opérations.

Après la désinfection, essuyez ou rincez le dispositif médical avec de l'eau bactériologiquement contrôlée.



COMMENT UTILISER CETTE SOLUTION POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION ?




APPLIQUEZ TRISTEL CLEAN SUR UNE LINGETTE SÈCHE ET ÉTALEZ LA MOUSSE SUR LA SURFACE DU DISPOSITIF. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES ZONES SOIENT HUMIDES ET QUE TOUTES LES SALISSURES VISIBLES SOIENT ENLEVÉES.

Nous recommandons l'utilisation des lingettes Duo Wipes.



APPLIQUEZ DEUX DOSES DE TRISTEL DUO ORL SUR UNE LINGETTE SÈCHE. ÉTALEZ LA MOUSSE SUR LA SURFACE DU DISPOSITIF ET ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES ZONES SOIENT RECOUVERTES.


Nous recommandons l'utilisation des lingettes Duo Wipes.

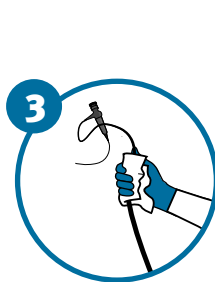

UTILISEZ TRISTEL DUO ORL POUR LA DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU DES SURFACES POUVANT ENTRER EN CONTACT AVEC LE DISPOSITIF, TELLES QUE LES SUPPORTS, LES CÂBLES ET LES BOÎTIERS DE CONNECTEURS.



ASSUREZ UN TEMPS DE CONTACT MINIMUM DE 30 SECONDES.

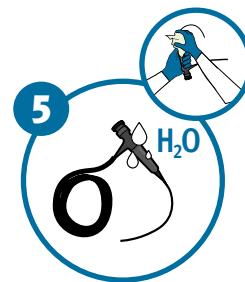

RINCEZ LE DISPOSITIF À L'EAU BACTÉRIOLOGIQUEMENT CONTRÔLÉE OU ESSUYEZ-LE AVEC UNE COMPRESSE SÈCHE.

Conservez le dispositif médical conformément aux protocoles hospitaliers.

EFFICACE

Sporicide, mycobactéricide, virucide, fongicide et bactéricide

RAPIDE

Temps de contact de 30 secondes seulement

TRAÇABLE

Tristel 3T numérise la traçabilité pour une approche plus efficace, précise et intelligente

MOBILE


Toujours à portée de main : peut être déplacé conjointement avec le dispositif médical, le clinicien et être transféré près du patient pour réaliser une désinfection de haut niveau sur les lieux de soins

CONFORME

À l'EN 14885:2018, l'EN 17126:2018, aux dernières normes européennes applicables publiées & aux exigences de la SF2H

APPLICATIONS

Tristel Duo ORL est conçu spécifiquement pour la désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux invasifs sans canal opérateur utilisés en ORL.

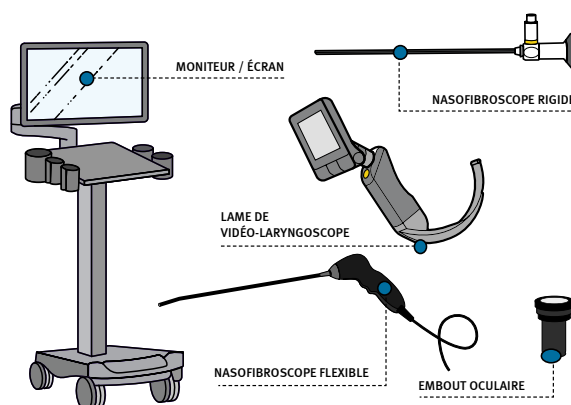

Les lingettes Duo Wipes sont spécifiquement conçues pour l'application de Tristel Duo ORL

Les Duo Wipes sont des lingettes sèches non tissées, douces, durables et peu pelucheuses.

Nul besoin de les déchirer pour les séparer, faiblement absorbantes pour une distribution maximale de désinfectant, adaptées aux doses délivrées par Tristel Duo ORL et conditionnées dans un emballage facile à refermer, stocker et recycler.



DUO DOK

- Conçu pour garder Tristel Duo ORL à portée de main/ 5 Duo DOK par carton

TRISTEL DUO ORL

- 125 ml de solution de base Tristel (acide citrique) + 125 ml de solution d'activation Tristel (chlorite de sodium)

La composition de ClO₂, brevetée par Tristel est produite par mélange de ces deux solutions sur simple pression de la pompe à mousse (génère 0,8 ml de mousse par dose)

- 6 flacons de 310 doses par carton

TRISTEL CLEAN

- Pour un nettoyage en profondeur avant tout processus de désinfection
- 6 flacons de 310 doses par carton

DUO WIPES

- 6 packs de 320 lingettes sèches par carton

1. Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) 'The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jmv.25666. De plus amples informations sur Tristel Duo ORL, telles que des fiches de données de sécurité, des rapports, des publications de matériaux et des études sont disponibles sur demande ou en ligne à l'adresse www.tristel.com/fr-fr/