



### PULSATION JET NON PAS UN AEROSOL

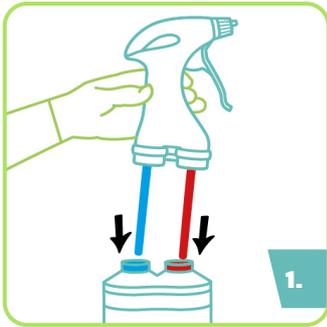

1. Pour assembler le système JET, prenez un pulvérisateur de type gâchette et repérez les indicateurs rouges et bleus sur l'étiquette du flacon ; suivez alors ces indicateurs pour insérer les tubes dans les goulots respectifs des flacons.

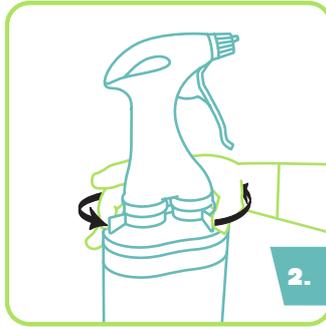

2. Serrez les leviers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de chaque côté du pulvérisateur pour bien le fixer.



3. Le système JET est prêt à l'emploi.

**Note:** Réutilisez le pulvérisateur à gâchette avec un autre flacon de JET. Dévissez les leviers dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le pulvérisateur et suivez à nouveau les instructions qui précèdent pour le nouvel assemblage. Rincez les éléments avant de les réutiliser.



4. Appliquez deux doses directement sur la surface, ou sur une lingette sèche.



5. Appliquez de manière à humidifier la surface.



6. Veillez à ce que toutes les zones restent humides pendant le temps de contact d'une minute. Laissez sécher à l'air libre.

#### NOTES:

- Ce mode d'emploi doit être utilisé conjointement avec la notice du produit, la fiche de données de sécurité et les instructions du fabricant du dispositif.
- Désinfectez vos mains et portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous manipulez des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Ne pas utiliser sur des matériaux tels que le laiton ou le cuivre.
- Pour un usage professionnel uniquement.
- Éliminez le récipient vide et les lingettes usagées conformément aux réglementations sanitaires locales. Ne réutilisez pas le récipient vide. Ne réutilisez pas les lingettes.
- Si vous utilisez JET régulièrement, il peut être nécessaire de parfois rincer les surfaces pour éliminer toute accumulation de résidus.
- Ne pas utiliser sur des dispositifs médicaux invasifs ou des équipements chirurgicaux.



Consultez le guide de l'utilisateur pour obtenir des instructions complètes.