

Tristel Trio™

Wipes System

Une solution complète pour une désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux sans canal opérateur.

 Se référer au guide d'utilisation pour des instructions complètes.


NOTES :

- Toujours suivre les protocoles hospitaliers et les instructions du fabricant.
- Désinfectez-vous les mains et portez des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Un pré-nettoyage initial doit être effectué immédiatement après l'utilisation du dispositif médical, conformément au protocole hospitalier.
- Veillez à ne pas froter ou plier l'instrument et portez une attention particulière aux bords, arêtes, rainures et zones où différents éléments se rejoignent.
- Préparez-vous pour la procédure de décontamination en prenant une lingette de chaque et la mousse activatrice de la boîte.
- Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration. La date d'expiration et le numéro de lot figurent sur une des faces de la boîte d'emballage.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et/ou si les lingettes sont sèches.
- Utilisez plusieurs lingettes si nécessaire pour assurer une propreté visible du dispositif.
- Gardez les sachets des lingettes utilisées à côté du livret de traçabilité pour que les détails puissent être complétés à la fin de la procédure.
- Jetez les lingettes et les gants conformément aux consignes de l'hôpital.
- Uniquement pour utilisation professionnelle.

INFORMATIONS SUR LES VIDÉO-LARYNGOSCOPES C-MAC®

- Le protocole suivant peut être appliqué à tous les composants du système C-MAC® sans canal opérateur. Cela inclut, sans s'y limiter, le vidéo-laryngoscope C-MAC®, le câble de connexion, l'imageur C-MAC® S, le C-MAC® VS (stylet vidéo) et le C-MAC® PM (moniteur de poche) après le retrait de la batterie.
- Scellez les contacts électroniques avec le capuchon de protection C-MAC®. Si le capuchon de protection n'est pas utilisé, les contacts doivent être rincés et re-séchés.

POUR LES C-MAC®
VIDÉO-LARYNGOSCOPES

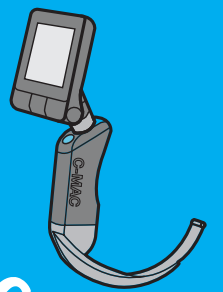

ÉTAPE 1 : NETTOYAGE



Retirez la lingette pré-nettoyante de son sachet et étalez-la dans la paume de votre main.

Essuyez la surface du dispositif C-MAC® jusqu'à ce que la saleté et les matières organiques soient visiblement retirées.

Jetez la lingette et les gants conformément aux consignes locales.

Désinfectez-vous les mains et mettez de nouveaux gants.

ÉTAPE 2a + 2b : ACTIVATION



Retirez la lingette sporicide de son sachet et étalez-la dans la paume de votre main.

Prenez le flacon de mousse activatrice et appliquez deux doses de mousse activatrice sur la lingette.

Pliez la lingette sur elle-même et malaxez-la pendant **15 secondes** pour générer le dioxyde de chlore.

Assurez-vous que la lingette soit complètement recouverte de mousse.

Utilisez immédiatement la lingette activée.

ÉTAPE 2 : DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU



Essuyez la surface du dispositif C-MAC® en un mouvement de manière à le recouvrir de mousse, en veillant que toutes les parties rentrent en contact avec la lingette.

Jetez la lingette conformément aux consignes locales.

Observez un temps de contact de **30 secondes**.

ÉTAPE 3 : RINÇAGE



Retirez la lingette de rinçage de son sachet et étalez-la dans la paume de votre main.

Rincez le dispositif C-MAC® pour retirer l'excès de désinfectant.

Jetez la lingette conformément aux consignes locales.

ÉTAPE 4 : TRAÇABILITÉ



Référez-vous aux sachets des lingettes utilisées et au flacon de mousse activatrice pour compléter le livret de traçabilité.

Tristel

Établi par: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Informations sur les brevets sous : <http://www.our-patents.info/tristel>

France: Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com - W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique: Tristel SA, 14 B, Smalldaan, B-2660 Anvers
T +32 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-fr/

Suisse: Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell
T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com - W www.tristel.com/de

C-MAC® **STORZ**
KARL STORZ - ENDOSKOPIE

KARL STORZ Endoscopie France S.A.S.,
Quartier de l'Europe 12, rue Georges Guynemer, 78280 Guyancourt
T +33 (0) 1304 84200 - F +33 (0) 1304 84201 - E info@karlstorz.com
E marketing-fr@karlstorz.com