

Tristel Duo™

ULT

POUR LES SONDES
D'ÉCHOGRAPHIE ENDOCAVITAIRE



Mousse de désinfection de haut niveau

Notes:

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Désinfectez-vous les mains et portez des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Si Tristel Duo ULT est utilisé pour la première fois, appuyez entre deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Nous préconisons pour l'étape de nettoyage notre détergent Tristel Clean (mousse tri-enzymatique) compatible avec le désinfectant Tristel Duo ULT. Pas de rinçage entre les deux étapes (2 doses de mousse Tristel Clean permettent de couvrir et de nettoyer une surface de 50cm x 20cm).
- Quand la sonde est visuellement propre, appliquez la mousse désinfectante Tristel Duo ULT.
- Uniquement pour une utilisation professionnelle.
- La date de péremption mentionnée ne change pas quelle que soit la date d'ouverture des flacons.
- Ces instructions d'utilisation doivent être utilisées conjointement avec le guide d'utilisation, l'étiquette du produit, la Fiche de Données de Sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.

ÉTAPE 1



Enlevez la gaine, enlevez le gel à ultrasons du dispositif médical avec une lingette neutre, puis appliquez la mousse détergente Tristel Clean sur une lingette sèche (de préférence, Duo Wipes) pour effectuer le nettoyage.

ÉTAPE 2



Appliquez deux doses de Tristel Duo ULT sur une lingette sèche (de préférence, Duo Wipes).


ÉTAPE 3



Utilisez la lingette pour étaler la mousse sur toute la surface de la sonde et assurez-vous que toutes les zones soient couvertes. L'essuyage continu de la surface n'est pas nécessaire et doit être évité pour ne pas endommager la lingette. Si nécessaire, utilisez un coton-tige pour faire pénétrer la mousse dans les rainures.

Note: jetez la lingette utilisée conformément aux réglementations locales. Ne pas laisser macérer. Ne pas réutiliser.

ÉTAPE 4

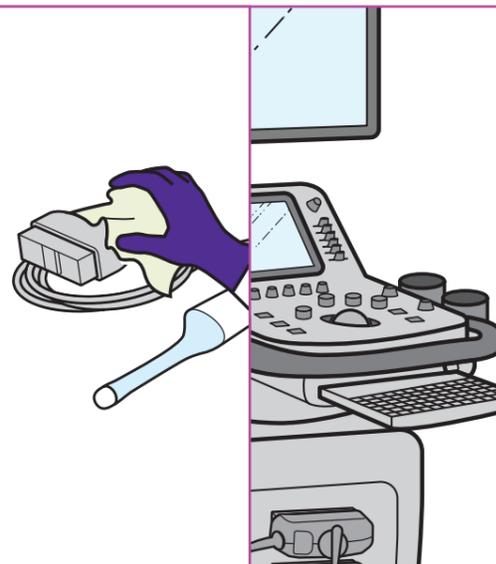

Utilisez Tristel Duo ULT pour une désinfection de haut niveau des surfaces pouvant entrer en contact avec la sonde, telles que les supports, les câbles et les boîtiers de connecteurs.

ÉTAPE 5



Laissez agir le produit sur la surface pendant au moins **30 secondes**.

Note: stockez le dispositif médical conformément aux protocoles hospitaliers pour éviter tout dommage ou recontamination.