


# Tristel Trio™

## Wipes System

Une solution complète pour une désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux.

 Se référer au guide d'utilisation pour des instructions complètes.

### Notes :

- Toujours suivre les protocoles hospitaliers et les instructions du fabricant.
- Désinfectez-vous les mains et portez des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Retirez la gaine/housse et le gel à ultrasons de l'instrument avec une lingette et jetez-la dans les déchets à risque infectieux.
- Un pré-nettoyage initial doit être effectué immédiatement après l'utilisation du dispositif médical, conformément au protocole hospitalier.
- Veillez à ne pas froter ou plier l'instrument et portez une attention particulière aux bords, arêtes, rainures et zones où différents éléments se rejoignent.
- Préparez-vous pour la procédure de décontamination en prenant une lingette de chaque et la mousse activatrice de la boîte.
- Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration. La date d'expiration et le numéro de lot figurent sur une des faces de la boîte d'emballage.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et/ou si les lingettes sont sèches.
- Utilisez plusieurs lingettes si nécessaire pour assurer une propreté visible du dispositif.
- Gardez les sachets des lingettes utilisées à côté du livret de traçabilité pour que les détails puissent être complétés à la fin de la procédure.
- Jetez les lingettes et les gants conformément aux consignes de l'hôpital.
- Uniquement pour utilisation professionnelle.
- Ce protocole doit être utilisé conjointement avec le guide d'utilisation, l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.

**POUR LES CYSTOSCOPES FLEXIBLES SANS CANAL OPÉRATEUR**



### ÉTAPE 1 : NETTOYAGE



Retirez la lingette pré-nettoyante de son sachet et étalez-la dans la paume de votre main.

Essayez la surface du dispositif médical jusqu'à ce que la saleté et les matières organiques soient visiblement retirées.

Jetez la lingette et les gants conformément aux consignes locales.

Désinfectez-vous les mains et mettez de nouveaux gants.

### ÉTAPE 2a + 2b : ACTIVATION



Retirez la lingette sporicide de son sachet et étalez-la dans la paume de votre main.

Prenez le flacon de mousse activatrice et appliquez deux doses de mousse activatrice sur la lingette.

Pliez la lingette sur elle-même et malaxez-la pendant **15 secondes** pour générer le dioxyde de chlore.

Assurez-vous que la lingette soit complètement recouverte de mousse.

Utilisez immédiatement la lingette activée.

### ÉTAPE 2 : DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU



Essayez la surface du dispositif en un mouvement de manière à le recouvrir de mousse en veillant que toutes les parties entrent en contact avec la lingette.

Jetez la lingette conformément aux consignes locales.

Observez un temps de contact de **30 secondes**.

### ÉTAPE 3 : RINÇAGE



Retirez la lingette de rinçage de son sachet et étalez-la dans la paume de votre main.

Rincez l'instrument pour retirer l'excès de désinfectant.

Jetez la lingette conformément aux consignes locales.

### ÉTAPE 4 : TRAÇABILITÉ



Référez-vous aux sachets des lingettes utilisées et au flacon de mousse activatrice pour compléter le livret de traçabilité.

**Tristel™**

Établi par: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY  
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Pour des informations sur les brevets, visitez: <http://www.our-patents.info/tristel>

France: Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille  
T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com - W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique et GD Luxembourg: Tristel SA, Smalandaan 14 B, 2660 Anvers, Belgique  
T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-fr/

Suisse: Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell  
T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com - W tristel.com/de

Copyright © Tristel Solutions  
Mkt-Wal-4004-4  
04/NOV/2021