


Une solution complète pour une désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux sans canal opérateur.

 Se référer au guide d'utilisation pour des instructions complètes.


### Notes:

- Toujours suivre les protocoles hospitaliers et les instructions du fabricant.
- Désinfectez-vous les mains et portez des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Retirez la gaine/housse et le gel à ultrasons de la sonde avec une lingette et jetez-la dans les déchets à risque infectieux.
- Un pré-nettoyage initial doit être effectué immédiatement après l'utilisation du dispositif médical, conformément au protocole hospitalier.
- Veillez à ne pas froter ou plier le dispositif médical et portez une attention particulière aux bords, arêtes, rainures et zones où différents éléments se rejoignent.
- Préparez-vous pour la procédure de décontamination en prenant une lingette de chaque et la mousse activatrice de la boîte.
- La sonde peut être suspendue pour faciliter la procédure de décontamination.
- Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration. La date d'expiration et le numéro de lot figurent sur une des faces de la boîte d'emballage.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et/ou si les lingettes sont sèches.
- Utilisez plusieurs lingettes si nécessaire pour assurer une propreté visible du dispositif.
- Gardez les sachets des lingettes utilisées à côté du livret de traçabilité pour que les détails puissent être complétés à la fin de la procédure.
- Jetez les lingettes et les gants conformément aux consignes de l'hôpital.
- Uniquement pour utilisation professionnelle.
- Ce protocole doit être utilisé conjointement avec le guide d'utilisation, l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.

POUR LES SONDES  
D'ÉCHOGRAPHIE  
TRANSCÉSOPHAGIENNE (ETO)



### ÉTAPE 1 : NETTOYAGE

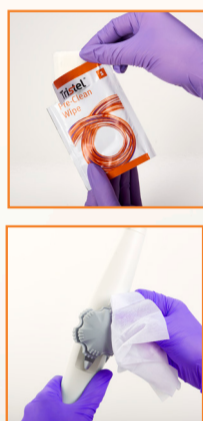

Retirez la lingette pré-nettoyante de son sachet et étalez-la dans la paume de votre main.

Essuyez la surface du dispositif médical jusqu'à ce que la saleté et les matières organiques soient visiblement retirées.

Jetez la lingette et les gants conformément aux consignes locales.

Désinfectez-vous les mains et mettez de nouveaux gants.

### ÉTAPE 2a + 2b : ACTIVATION



Retirez la lingette sporicide de son sachet et étalez-la dans la paume de votre main.


Prenez le flacon de mousse activatrice et appliquez deux doses de mousse activatrice sur la lingette sporicide.

Pliez la lingette sur elle-même et malaxez-la pendant **15 secondes** pour générer le dioxyde de chlore.

Assurez-vous que la lingette soit complètement recouverte de mousse.

Utilisez immédiatement la lingette activée.

### ÉTAPE 2 : DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU

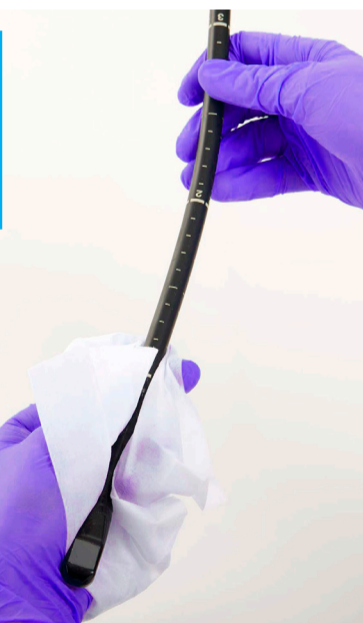


Essuyez la surface du dispositif médical en un mouvement de manière à le recouvrir de mousse en veillant que toutes les parties entrent en contact avec la lingette.

Jetez la lingette conformément aux consignes locales.

Observez un temps de contact de **30 secondes**.

### ÉTAPE 3 : RINÇAGE

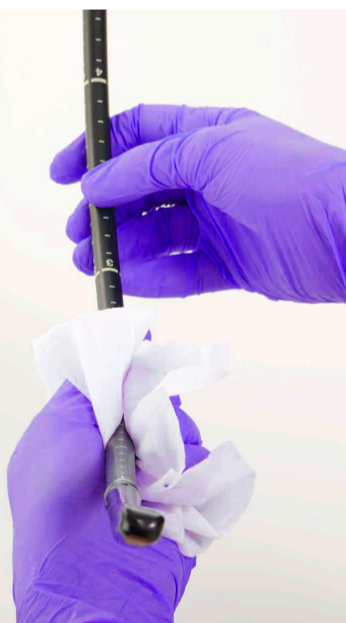

Retirez la lingette de rinçage de son sachet et étalez-la dans la paume de votre main.

Rincez la surface du dispositif médical pour retirer l'excès de mousse.

Jetez la lingette et les gants conformément aux consignes locales.

### ÉTAPE 4 : TRAÇABILITÉ



Référez-vous aux sachets des lingettes utilisées et au flacon de mousse activatrice pour compléter le livret de traçabilité.