

Tristel Fuse™

for Surfaces

Solution de désinfection de haut niveau et sporicide pour éviter les épidémies et les fermetures de service



1 Versez cinq litres d'eau à température ambiante dans un récipient.

Note: ne pas utiliser d'eau chaude.



2 Prenez un sachet, pliez-le à la moitié et pressez fortement un des côtés pour faire passer le contenu vers le centre du sachet et éclater le joint central. Le contenu prendra une couleur jaune.



3 Déchirez ou découpez le sachet avec une paire de ciseaux.



4 Versez le contenu du sachet dans les cinq litres d'eau.



5 Appliquez le désinfectant à l'aide d'une serpillière pour les sols ou un chiffon pour un dépoussiérage humide et laissez sécher.



6 Respectez un temps de contact de **5 minutes**.

Notes:

- Préparez la solution dans un endroit bien ventilé.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés. Suivez toujours les protocoles hospitaliers et les instructions de la fiche de données de sécurité.
- Stockez dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, sans exposition directe au soleil.
- Après dilution, la solution peut être conservée pendant 24 heures dans un récipient hermétiquement fermé.
- Éliminez l'emballage vide conformément aux directives locales et nationales.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Le contact avec le désinfectant peut causer des irritations. Lavez, si nécessaire, avec beaucoup d'eau et du savon.
- Après utilisation, rincez le matériel avec de l'eau.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Usage professionnel uniquement.
- Ce protocole doit être utilisé conjointement avec le guide d'utilisation, l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.

Tristel™

Établi par: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com
Informations sur les brevets sous : <http://www.our-patents.info/tristel>

France : Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille - T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com - W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique et GD de Luxembourg : Tristel SA, Smalandlaan 14 B, 2660 Anvers - T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-fr/

Suisse : Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell - T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com - W tristel.com/de

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-594-2
09/NOV/2021