

# COSA PUOI FARE IN 30 SECONDI?



**ELIMINARE  
L'ACANTHAMOEBA CASTELLANII\***

Schiuma disinfettante di alto livello per dispositivi medici oculistici.

**TRISTEL DUO OPH É FACILE DA USARE. APPLICA, STROFINA, ASPETTA E RISCIAQUA!**




APPLICA DUE DOSI DI DUO OPH SU UNA SALVIETTA ASCIUTTA O DIRETTAMENTE SUL DISPOSITIVO



DISTRIBUISCI LA SCHIUMA SULLA SUPERFICIE DELLO STRUMENTO



LASCIA AGIRE LA SCHIUMA PER 30 SECONDI

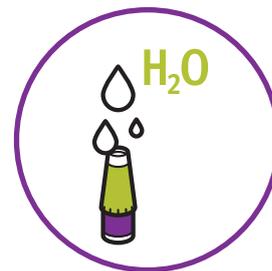

RISCIAQUA IL DISPOSITIVO CON ACQUA DI QUALITÀ ADEGUATA

**Tristel Duo**<sup>TM</sup>  
**OPH**

Tristel Duo OPH è un dispositivo medico di Classe IIa a marchio CE conformemente alla Direttiva europea sui dispositivi medici 93/42/CEE e ai suoi relativi emendamenti 2007/47/CE.

Le Salviette Asciutte Duo Wipes sono un dispositivo medico di Classe I conformemente al Regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR 2017/745).



## EFFICACE

A base della tecnologia brevettata da Tristel, il diossido di cloro, Tristel Duo OPH è efficace in 30 secondi contro agenti patogeni di interesse in oculistica, tra i quali:

- *Acanthamoeba castellanii* (uno dei patogeni che causano l'*Acanthamoeba keratitis*)
- Adenovirus Tipo 5
- *Aspergillus flavus*
- *Aspergillus brasiliensis*
- *Candida albicans*
- *Fusarium solani*
- *Staphylococcus aureus*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Enterobacteriaceae* resistenti ai carbapenemi (CRE) *Klebsiella pneumoniae*
- *Enterococchi* resistenti alla vancomicina (VRE) *Enterococcus faecium*



## CONVENIENTE

L'utilizzo del Tristel Duo OPH elimina la necessità di strumenti ad uso singolo, permettendo risparmi notevoli. Inoltre, consentendo di riprocessare il dispositivo in pochi secondi, evita di dover acquistare più dispositivi e ridurre l'investimento in strumentazione costosa.



## SEMPLICE

La formazione e la certificazione sono elementi fondamentali del servizio clienti di Tristel. Il nostro portale di formazione online offre formazione agli utilizzatori del Tristel Duo OPH nel momento e nel luogo a loro più conveniente.



## COMPATIBILE

Tristel Duo OPH è stato testato e confermato compatibile con i dispositivi medici dei produttori più importanti, tra cui:

- Accutome/Keeler
- Clarity Medical Systems
- Haag Streit
- Quantel Medical
- Reichert
- Volk



## VELOCE

Efficace in soli 30 secondi, Tristel Duo OPH permette di eseguire la disinfezione di alto livello senza intaccare l'attività clinica tra un paziente e l'altro.

## Diossido di cloro

Tristel Duo OPH è a base di diossido di cloro (ClO<sub>2</sub>), una tecnologia brevettata Tristel e un documentato biocida ad elevata efficacia. Il ClO<sub>2</sub> è un potente ossidante le cui caratteristiche germicide sono molto conosciute. Può ossidare i lipidi e le proteine presenti nelle membrane cellulari batteriche e fungine, compromettendo l'integrità della membrana, causando la distruzione della cellula. Il ClO<sub>2</sub> è inoltre in grado di penetrare nelle cellule e deteriorare gli acidi nucleici attraverso un processo ossidativo.

## APPLICAZIONI

Tristel Duo OPH è studiato specificatamente per la disinfezione di alto livello dei dispositivi oculistici, tra i quali:



LENTI A CONTATTO DIAGNOSTICHE



TONOMETRI RIUTILIZZABILI



SONDE ECOGRAFICHE OFTALMICHE (A-SCAN E B-SCAN)



LAMPADINE A FESSURA



PACHIMETRI

## Le Salviette Asciutte Duo Wipes sono studiate per l'applicazione di Tristel Duo OPH.

Le salviette asciutte Duo Wipes sono realizzate al 100% in tessuto non tessuto, in polipropilene (18 gsm) che non lascia residui e sono pretagliate per facilitarne l'estrazione dalla confezione.

L'uso delle Duo Wipes consente il rilascio efficace del disinfettante sulla superficie dello strumento.



### DUO WIPES

- 200 salviette per barattolo/6 barattoli per confezione.

### TRISTEL DUO OPH

- Soluzione Base Tristel (acido citrico) da 125ml + Soluzione di Attivazione Tristel (clorito di sodio) da 125ml.

La formula chimica a base di diossido di cloro brevettata da Tristel si genera quando queste due soluzioni vengono miscelate mediante l'azionamento della testa del flacone.

- 310 dosi per flacone/ 155 procedure di disinfezione/6 flaconi per confezione.

### DUO DOK

- Progettato per tenere a portata di mano Tristel Duo ULT.
- 5 per confezione.

**Tristel**

Decontaminazione di strumenti medici

#### Prodotto da:

Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY  
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

#### Distributore esclusivo in Italia:

Tristel Italia S.r.l., Via E. Collamarini, 14 40138 Bologna  
T 051 0014912 - E infoitalia@tristel.com - W www.tristel.it

\*Un tipo di ameba, causa spesso di cheratiti ed encefaliti, testato in conformità con la norma europea EN 13704 in condizioni di pulito. Per le informazioni sui brevetti Tristel, visitare la pagina: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions  
Mkt-Bro-1974-1  
27/MAY/2022

Pagina 2 di 2

**Tristel**  
WE HAVE CHEMISTRY.