

Una soluzione completa per la disinfezione di alto livello dei dispositivi medici invasivi senza canale.

 Fare riferimento al manuale utente per le istruzioni complete.

Note:

- Queste istruzioni sono da utilizzarsi insieme al manuale dell'utente, le etichette del prodotto, le schede di sicurezza e le istruzioni del dispositivo medico.
- Seguire i protocolli ospedalieri e le istruzioni dei produttori dei dispositivi medici.
- Igienizzare le mani e indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati quando si utilizzano disinfettanti e dispositivi medici.
- Una pulizia preliminare deve essere eseguita immediatamente dopo l'utilizzo del dispositivo medico, come da protocollo ospedaliero.
- Accertarsi di non frizionare o piegare lo strumento. Prestare attenzione alle sporgenze e alle rientranze.
- Prepararsi al ciclo di decontaminazione prendendo dalla scatola una salvietta di ciascun tipo e la schiuma di Attivazione.
- Per facilitare la procedura, appendere la sonda ad un supporto.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza. La data di scadenza e il numero di lotto sono riportati sul retro della scatola.
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata e/o le salviette sono asciutte.
- Se necessario, usare più di una salvietta per assicurarsi che lo strumento sia visibilmente pulito.
- Tenere i sacchetti delle salviette fino al termine del processo di decontaminazione, serviranno a compilare il registro di tracciabilità Tristel.
- Smaltire le salviette e i guanti conformemente alle linee guida dell'ospedale.
- Solo per uso professionale.
- Seguire il protocollo ospedaliero per designare un'area pulita e un'area sporca.

PER SONDE
TRANSESOFAGEE (TEE)



STEP 1 PULIZIA



Rimuovere la Salvietta Detergente dal suo sacchetto e aprirla nel palmo della mano.

Pulire la sonda per rimuovere lo sporco visibile.

Adagiare lo strumento nell'area sporca.

Smaltire le salviette e i guanti conformemente alle linee guida dell'ospedale.

Igienizzare le mani e indossare un nuovo paio di guanti.

STEP 2a + 2b ATTIVAZIONE



Estrarre la Salvietta Sporidica dal sacchetto e aprirla sul palmo della mano.

Prendere la Schiuma di Attivazione e applicare due dosi sulla Salvietta Sporidica.

Ripiegare la salvietta su se stessa e stropicciarla per **15 secondi** per generare il diossido di cloro.

Assicurarsi che la salvietta sia completamente coperta di schiuma.

Utilizzare la salvietta attivata immediatamente.

STEP 2 DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO



Strofinare la superficie della sonda in un unico movimento unidirezionale per coprirla con la schiuma, assicurando così che tutta la superficie entri in contatto con la salvietta.

Smaltire la salvietta usata tra i rifiuti sanitari.

Lasciar agire per **30 secondi**.

Adagiare lo strumento nell'area pulita.

STEP 3 RISCIACQUO



Estrarre la Salvietta Risciacquante dal suo sacchetto e aprirla sul palmo della mano.

Pulire la sonda per rimuovere la schiuma in eccesso.

Smaltire la salvietta usata tra i rifiuti sanitari.

STEP 4 TRACCIABILITÀ



Il Sistema di Salviette Trio consente la tracciabilità cartacea o digitale.

- Il Registro di Tracciabilità Tristel è utilizzato per documentare i cicli di decontaminazione effettuati con il Sistema di Salviette Trio.
- Tristel 3T è un sistema di tracciabilità digitale composto dal portale online per la gestione dei dati e la compilazione dei report, e una App per registrare le procedure di decontaminazione del Sistema di Salviette Trio. L'App 3T include un'opzione per visualizzare i training di formazione per facilitare lo svolgimento della procedura.

Entrambi i sistemi di tracciabilità includono gli step per compilare i dati correttamente.