

# DAS AM UMFANGREICHSTEN VALIDIERTE, EMPFOHLENE UND VERWENDETE **TUCHSYSTEM** ZUR AUFBEREITUNG VON MEDIZINPRODUKTEN WELTWEIT

**Tristel Trio™**  
**Wipes System**

## Anwendungsgebiete:

- TEE-Sonden
- Nasopharyngoskope
- Videolaryngoskope
- Stablinsoptiken
- Kontaktgläser
- Manometriekatheter
- Transvaginal- und Transrektalsonden



**DAS TRISTEL TRIO  
WIPES SYSTEM**  
**INAKTIVIERT HPV**  
AUF REALEN MEDIZINPRODUKTEN\*

## AUCH BEI IHNEN VOR ORT VALIDIERBAR



### REINIGUNG

Das Tristel Pre-Clean Wipe

dient der gründlichen Reinigung des Instruments von Verschmutzungen und organischem Material mittels einer dreifach enzymatischen Tensidlösung.



### HIGH-LEVEL-DESINFEKTION

Das Tristel Sporidical Wipe und Activator Foam

erzeugen in Kombination den hochwirksamen Wirkstoff Chlordioxid. Dieser ist innerhalb von 30 Sekunden wirksam gegen Bakterien, Hefen/ Pilze, Viren, Mykobakterien und Sporen.



### SPÜLUNG

Das Tristel Rinse Wipe

dient der abschließenden Spülung des Instruments mittels sterilem Tuch getränkt mit entionisiertem Wasser und Antioxidantien.



### DOKUMENTATION

Das Protokollbuch / die 3T-App

erlaubt die einfache Aufzeichnung aller Verfahrensschritte bis hin zur Prüfung und Freigabe durch die aufbereitende Person.

\* Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) 'The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes' DOI: 10.1002/jmv.25666

## WIRKSAM

- Allumfassend geprüft anhand allen auf europäischer Ebene geforderten Prüfungen (EN 14885:2022) und deutschen Normen.
- Wirksam gegen Sporen, Mykobakterien, gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen und Pilze, behüllte und unbehüllte Viren.
- **Viruzid PLUS** gemäß Suspensionstest DVV/RKI (2014) und DVV 2012-Carriertest.

## SICHER

Das Tristel Sporicidal Wipe ist nicht toxisch gegenüber Embryonen und kann deshalb in IVF-Umgebungen eingesetzt werden.

## NACHWEISBAR

Unkomplizierte Aufzeichnung und Freigabe aller Aufbereitungsprozesse mittels Protokollbuch oder 3T-App.

## ÖKONOMISCH

- Keine Investition in Maschinen.
- Keine Wartungsverträge.

## FLEXIBEL

Kann als stationäre oder mobile Aufbereitungslösung genutzt werden.

## SCHNELL

Erlaubt die komplette Aufbereitung innerhalb von Minuten.

## KOMPATIBEL

Das Tristel Trio Wipes System wurde von führenden Herstellern von Medizinprodukten als materialverträglich freigegeben:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advanced Tactile Imaging</li> <li>• Airtraq*</li> <li>• Arthrex</li> <li>• ATMOS MedizinTechnik</li> <li>• BD (Bard Access, CareFusion)</li> <li>• BK Medical</li> <li>• Butterfly Network</li> <li>• Canon Medical Systems</li> <li>• Carestream</li> <li>• Clarius Mobile Health</li> <li>• Clarus Medical</li> <li>• DWL Compumedics</li> <li>• Echosens</li> <li>• Ecleris</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esaote</li> <li>• Exact Imaging</li> <li>• Fisher &amp; Paykel</li> <li>• FUJIFILM Healthcare</li> <li>• FUJIFILM SonoSite</li> <li>• GE Healthcare</li> <li>• Haag-Streit*</li> <li>• Happersberger</li> <li>• Otopront</li> <li>• Karl Storz</li> <li>• Koelis</li> <li>• Laborie</li> <li>• Machida Endoscope Co.</li> <li>• MCube</li> <li>• Medcom</li> <li>• Mindray</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neoplas Tools</li> <li>• Ocular Instruments Inc</li> <li>• Optim LLC</li> <li>• Orvision</li> <li>• Pentax</li> <li>• Philips</li> <li>• Polydiagnost</li> <li>• Samsung Healthcare</li> <li>• SapiMed</li> <li>• Siemens Healthineers</li> <li>• Southern Scientific / Care Wise</li> <li>• tic Medizintechnik</li> <li>• SonoScape*</li> <li>• Verathon</li> <li>• Xion Medical</li> </ul> |
|--|--|---|

\* Freigabe für das Tristel Sporicidal Wipe, als Teil des Tristel Trio Wipes Systems

## VOLLSTÄNDIGE UND VALIDIERTE AUFBEREITUNG

Tristel Trio ist ein einzigartiges Komplettsystem zur manuellen Aufbereitung bestehend aus den Schritten Reinigung, High-Level-Desinfektion, Spülung und Dokumentation. Es erfüllt die Anforderungen der KRINKO/BfArM-Empfehlung an die Aufbereitung für semikritische Medizinprodukte ohne Lumen:

- Reinigung mit einem nicht fixierenden Reiniger
- Aufeinander abgestimmte Prozesschemikalien
- Desinfektionsleistung geeignet zur abschließenden Desinfektion
- Mikrobiologisch einwandfreies Schlusspülwasser
- Dokumentation des Aufbereitungsprozesses

Das Tristel Trio Wipes System wurde als geeignetes Verfahren zur Aufbereitung von z.B. TEE-Sonden, TV/TR-Sonden, Nasopharyngoskopen, Fiberskopen und Videolaryngoskopen an realen Medizinprodukten validiert.

Das Tristel Sporicidal Wipe, als Teil des Tristel Trio, ist in der VAH-Desinfektionsmittelliste und im Expertenverzeichnis der ÖGHMP gelistet.



### MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

	Europäische Normen	Einheitliche Einwirkzeit
Bakterien	EN 13727	
	EN 14561	
	EN 16615	
Hefen/Pilze	EN 13624	
	EN 14562	
	EN 16615	
Viren	EN 14476	
Mykobakterien	EN 14348	
	EN 14563	
	EN 16615	
Sporen	EN 17126	
	EN 17846	

### TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM 50

- 50 Aufbereitungen, inkl. Protokollbuch
- TRIO50

### TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM 5

- 5 Aufbereitungen
- TRIO5

### 3T-APP

- auf Anfrage

### TRISTEL TRIO WIPES SYSTEM 100

- 2 x Trio 50
- TRIO100

### TRIO WANDHALTERUNG

- WM/TRIO

### TRISTEL PROTOKOLLBUCH

- für 50 Aufbereitungen
- PB/TSW



**Tristel**  
We have chemistry

Beachten Sie die vollständige Gebrauchsanleitung.

Erstellt von: Tristel Solutions Limited, Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK - T +44 (0) 1638 721500  
E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Deutschland: Tristel GmbH, Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Deutschland - T +49 (0)30 54844226  
E deutschland@tristel.com - W www.tristel.de

Österreich: Tristel Hygiene GmbH, Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien, Österreich - T +43 (0)676 4863656  
E oesterreich@tristel.com - W www.tristel.at

Schweiz: Tristel AG, Sandgrube 29, 9050 Appenzell, Schweiz  
T +41 (0)71 5670658 - E schweiz@tristel.com - W www.tristel.com

Informationen zu Tristels Patenten unter: <http://www.our-patents.info/tristel>

Tristel ist Mitglied im:



Copyright © Tristel Solutions Limited  
MKT-Bro-320 - 13/MAY/2025 - V9

Seite 2 von 2