

Tristel Trio™

Wipes System

Die Komplettlösung für die Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten ohne Lumen



Beachten Sie vor Benutzung die detaillierte Gebrauchsanleitung.

Hinweise bezüglich der Tristel Trio Wipes:

- Folgen Sie den Standardarbeitsanweisungen und beachten Sie die Angaben des Instrumentenherstellers.
- Desinfizieren Sie Ihre Hände und tragen Sie geeignete PSA wenn Sie mit Desinfektionsmitteln oder Medizinprodukten hantieren.
- Behandeln Sie das Instrument stets mit Sorgfalt: Keine übermäßige Kraft ausüben.
- Nehmen Sie zur Vorbereitung der Aufbereitung je ein Tuch und die Aktivatorschaumflasche aus dem Karton.
- Verwenden Sie Tücher oder Aktivatorschaum nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist und/oder die Tücher trocken sind.
- Eine erste Vorreinigung sollte unmittelbar nach Benutzung des Medizinprodukts gemäß Standardarbeitsanweisung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie die Tuchverpackungen bis zum Ende der Aufbereitung auf, um das Protokollbuch auszufüllen.
- Entsorgen Sie Tücher und Handschuhe gemäß regulatorischer Vorgaben.
- Nur für den professionellen Gebrauch.

Hinweise bezüglich der C-MAC® Videolaryngoskope:

- Die folgende Aufbereitung kann an allen C-MAC® Systemkomponenten ohne Lumen angewendet werden. Dazu gehören unter anderem die C-MAC® Videolaryngoskope, das Anschlusskabel, die C-MAC® S Imager, das C-MAC® VS (Video Stylet) und der C-MAC® PM (Pocket Monitor) nach entfernter Batterie.
- Verschließen Sie die elektronischen Kontakte mit der C-MAC® Schutzkappe. Falls die Schutzkappe nicht verwendet wird, müssen die Kontakte gespült und nachgetrocknet werden.

SCHRITT 1: REINIGUNG



Nehmen Sie ein Pre-Clean Wipe aus der Tuchverpackung und breiten Sie es auf Ihrer Handfläche aus.

Reinigen Sie die C-MAC® Komponente gründlich. Stellen Sie sicher, dass sämtliche sichtbaren Verunreinigungen entfernt werden. Achten Sie insbesondere auf Unebenheiten.

Entsorgen Sie das genutzte Tuch.

Führen Sie einen Handschuhwechsel durch.

SCHRITT 2a + 2b: AKTIVIERUNG



Nehmen Sie ein Sporidical Wipe aus der Tuchverpackung und breiten Sie es auf Ihrer Handfläche aus.

Geben Sie zwei vollständige Hübe des Aktivatorschaums auf das Tuch.

Falten Sie die Ecken des Tuchs zur Mitte in den Schaum und drücken Sie das Tuch für **15 Sekunden** zusammen, so dass es vollständig mit Schaum bedeckt ist.

SCHRITT 2: HIGH-LEVEL-DESINFEKTION



Wischen Sie über die Oberflächen der C-MAC® Komponente gründlich in eine Richtung, um den Schaum zu übertragen und stellen Sie eine vollständige Benetzung sicher. Achten Sie insbesondere auf Unebenheiten. Massieren Sie ggf. den Schaum ein oder drücken Sie etwas Flüssigkeit aus dem Tuch auf die Stelle.

Stellen Sie eine Einwirkzeit von mindestens **30 Sekunden** sicher.

Entsorgen Sie das genutzte Tuch.

SCHRITT 3: SPÜLUNG



Nehmen Sie ein Rinse Wipe aus der Tuchverpackung und breiten Sie es auf Ihrer Handfläche aus.

Wischen Sie die C-MAC® Komponente gründlich ab, um Schaumrückstände zu entfernen.

Entsorgen Sie das genutzte Tuch.

SCHRITT 4: DOKUMENTATION



Nutzen Sie die benutzen Tuchverpackungen, um den Aufbereitungsprozess zu protokollieren.

Für weitere Informationen nutzen Sie die Anleitung im Protokollbuch.

Tristel™

Erstellt von: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, CB8 7NY, UK
T +44 (0)1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Informationen zu Tristels Patenten unter: <http://www.our-patents.info/tristel>

Deutschland, Österreich: Tristel GmbH, Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226 - F +49 (0)30 54819232 - E berlin@tristel.com - W www.tristel.de
Schweiz: Tristel AG, Sandgrube 29, 9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658 - E schweiz@tristel.com

STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOP

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Deutschland
T +49 (0) 7461 708-0 - F +49 (0) 7461 708-105 - E info@karl-storz.com
W www.karl-storz.com

C-MAC®
KARL STORZ - ENDOSKOP

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-643-2
March 2020

FÜR C-MAC®
VIDEOLARYNGOSKOPE

