



VIRUZIDE & SPORIZIDE DESINFEKTION IN 1 MINUTE


JET ist ein sporizider Chlordioxid-Schaum und VAH-gelistet als viruzid PLUS. **JET** ist zudem sehr effektiv in der Bekämpfung von Schimmelpilzen.

Verwenden Sie **JET** für die Flächendesinfektion in patientennahen und Risikobereichen, Behandlungsräumen und Nasszellen. Auch geeignet zur Anwendung in medizinischen Laboren.


Beachten Sie die Gebrauchsanleitung. Nicht zur Verwendung an invasiven Medizinprodukten.




**SCHNELL
WIRKSAM IN
1 MINUTE**

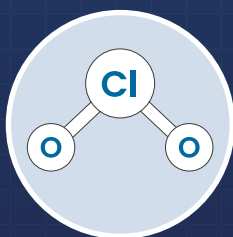

**SPORIZIDE
DESINFEKTION MIT
DER KRAFT VON
TRISTEL'S ClO₂**

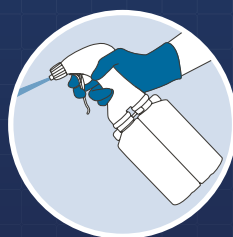

**EIN
SCHAUMSTRAHL,
KEINE AEROSOLE**

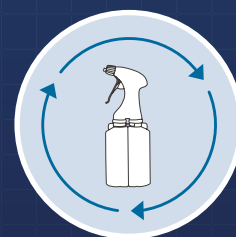

**RECYCELBARE
FLASCHEN &
WIEDERVER-
WENDBARE
SCHAUMKÖPFE**

TRISTELS SPEZIELLES CHLORDIOXID (ClO₂)

JET basiert auf dem gleichen Wirkstoff, Chlordioxid, wie die Tristel-Produkte zur Aufbereitung von Medizinprodukten. **JET** verfügt über zwei getrennte Kammern, die die Basislösung (Zitronensäure) und die Aktivatorlösung (Natriumchlorit) enthalten.

Beim Betätigen des Schaumkopfs wird Chlordioxid erzeugt.

ClO₂ beseitigt Mikroorganismen, indem es ihre molekulare Strukturen zerstört. Dadurch können schädliche Mikroorganismen keine Resistenz gegen ClO₂ entwickeln. **JET** enthält zudem ein amphoter Tensid für zusätzliche Reinigungsleistung.



NACHWEISLICH WIRKSAM IN 1 MINUTE GEGEN:



SPOREN	EN 17126
SPORIZID GEGEN C. DIFF	EN 17846
MYKOBAKTERIEN	EN 14348
VIREN	EN 14476
	DVV/RKI (2014)
	DVV 2012*
HEFEN/ PILZE	EN 13624
	EN 16615
BAKTERIEN	EN 13727
	EN 16615

<i>Bacillus cereus</i>	<i>Enterococcus hirae</i>
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Proteus vulgaris</i>
<i>Clostridioides difficile</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
Adenovirus Typ 5	<i>Streptococcus pyogenes</i>
Hepatitis-B-Virus (HBV)	Carbapenem-resistente <i>Enterobacteriaceae</i> (CRE)
Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)	
Influenza A-Virus (H1N1)	ESBL-bildende <i>Klebsiella pneumoniae</i>
Murines Norovirus	Methicillin-resistenter <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)
Poliovirus Typ 1	
Bovines Coronavirus	Multiresistenter <i>Acinetobacter baumannii</i> (MDRAB)
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	
<i>Candida albicans</i>	Vancomycin-resistenter <i>Enterococcus faecium</i> (VRE)
<i>Candida auris</i>	

*Viruzid in 1 Min. Viruzid PLUS in 3 Min.

EINFACH AUF DAS TUCH GEBEN, VERTEILEN UND TROCKNEN LASSEN.

Jede Flasche **JET** liefert 570 Hübe sporiziden Chlordioxid-Schaum.

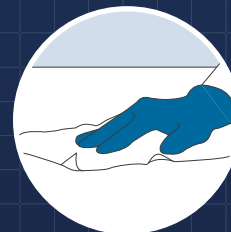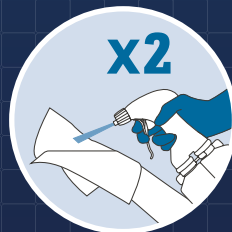

Tristel™

Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Bro-3402 - V1
13/JAN/2026

Deutschland:
Tristel GmbH
Karl-Marx-Allee 90A,
10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226
E deutschland@tristel.com
W www.tristel.de

Schweiz:
Tristel AG
Sandgrube 29,
9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658
E schweiz@tristel.com
W www.tristel.com

Österreich:
Tristel Hygiene GmbH
Kohlmarkt 8-10,
1010 Wien, Österreich
T +43 (0)676 4863656
E oesterreich@tristel.com
W www.tristel.at

