



HINWEISE

- Schütteln Sie die Tristel CLEAN- oder Tristel DUO ULT-Flasche **nicht vor** dem Gebrauch.
- **Desinfizieren Sie Ihre Hände** und **tragen Sie geeignete Handschuhe** und persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie Desinfektionsmittel und Medizinprodukte handhaben.
- **Nicht** mit Weichmetallen oder Edelstahl mit niedrigem Härtegrad verwenden.
- Mit Tupfern lassen sich Tristel CLEAN und Tristel DUO ULT auch in schwer zugänglichen Bereichen wie Vertiefungen oder Spalten auftragen.
- Deckel nach Tristel DRY WIPES Gebrauch **schließen**. Spenderdose nicht wiederbefüllen oder für andere Zwecke verwenden.
- Nur für die Nutzung durch medizinische Fachkräfte.
- Diese Gebrauchsanleitung sollte in Verbindung mit dem Produktetikett, dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) und den Anweisungen des Medizinprodukteherstellers verwendet werden.


GEBRAUCHSANLEITUNG

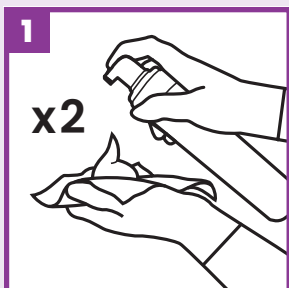

Reinigen Sie Ihre Hände und ziehen Sie saubere Handschuhe an. Geben Sie dann **mindestens zwei Hübe** Tristel CLEAN auf ein Tristel DRY WIPE.

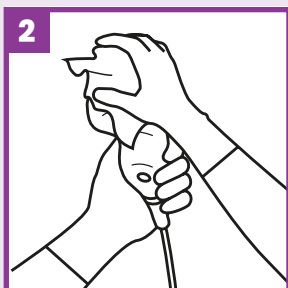


Wischen Sie die gesamten Oberflächen des Geräts und des Sondenhalters **ab, bis sie sichtbar sauber sind**. Achten Sie dabei besonders auf die Vertiefungen und Fugen entlang des Geräts. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzlichen Schaum und Tücher.

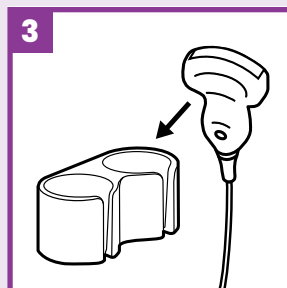


Legen Sie die Sonde zurück in die **Sondenhalterung**, während Sie sich auf den nächsten Schritt vorbereiten. Entsorgen Sie das benutzte Tuch und die Handschuhe entsprechend den örtlichen Vorschriften. Nicht wiederverwenden.




Reinigen Sie Ihre Hände und ziehen Sie neue Handschuhe an.

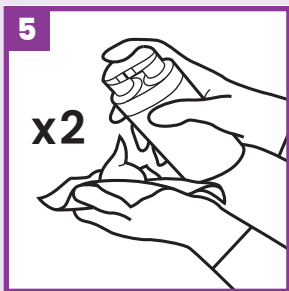


Geben Sie **zwei Hübe** Tristel DUO ULT auf ein neues Tristel DRY WIPE.

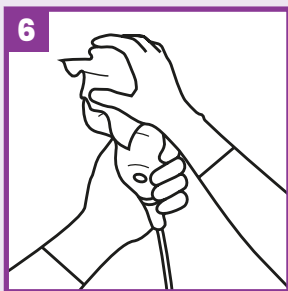

Verteilen Sie den Schaum mit dem Wischtuch über die **gesamte Oberfläche des Geräts und des Sondenhalters**, und achten Sie darauf, dass alle Flächen bedeckt sind. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Tupfer, um den Schaum in die Vertiefungen zu verteilen. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzlichen Schaum und Tücher.

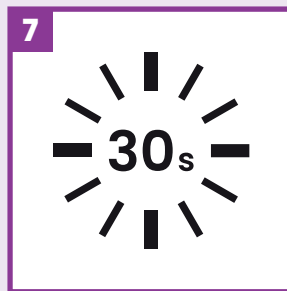

Platzieren Sie die Sonde in der **Sondenhalterung** und stellen Sie sicher, dass das Medizinprodukt mindestens für die **30-sekündige Einwirkzeit*** feucht bleibt. Entsorgen Sie das benutzte Tuch und die Handschuhe gemäß den örtlichen Vorschriften. Nicht wiederverwenden.

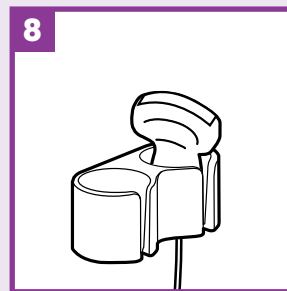

Lassen Sie das Medizinprodukt an der Luft trocknen und lagern Sie es gemäß der Standardarbeitsanweisung, um eine Beschädigung oder Rekontamination zu vermeiden.

*Tristel DUO ULT ist gemäß der nach EN 14885:2022 zur Ausübung der Wirksamkeit durchzuführenden Testungen bakterizid, fungizid, viruzid, mykobakterizid und sporizid mit einer Einwirkzeit von 30 Sekunden. Die viruzide Wirksamkeit nach EN 14476, aber auch im DVV/RKI:2014 Suspensionstest ist in 30 Sekunden gegeben. Gemäß Prüfung auf Viruswirksamkeit von Flächendesinfektionsmitteln ohne Mechanik (DVV 2012) ist Tristel DUO ULT viruzid mit einer Einwirkzeit von 1 Minute. Praxisnahe Validierungen mit Tristel DUO ULT an realen Medizinprodukten analog EN 14885:2022 Anhang C und klinische Studien zeigen, dass Tristel DUO ULT gegen relevante Erreger, wie Viren, innerhalb von 30 Sekunden wirksam ist.