


DAS MATERIAL- SCHONENDE HIGH-LEVEL- DESINFEKTIONSMITTEL, DAS NACHWEISLICH IN 30 SEKUNDEN GEGEN HPV WIRKT

Tristel
**DUO
ULT™**


Tristel DUO ULT wirkt nachweislich sporizid, mykobakterizid, viruzid, fungizid, levurozid und bakterizid. Damit ermöglicht es eine schnelle, umfassende und dennoch mobile Desinfektion, ideal für Ultraschallsonden.




WARUM TRISTEL DUO ULT?

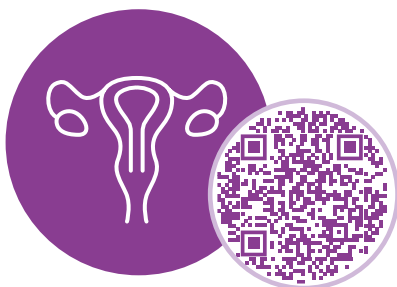

Sicher für Spermien, Embryonen
und die Reproduktionsmedizin
(ohne QAVs)

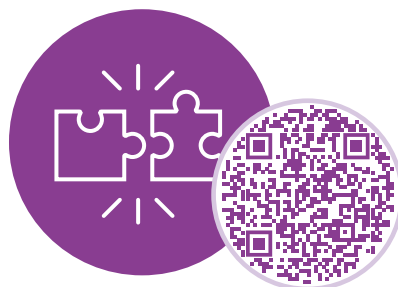

Erhält die **Herstellergarantie**
Ihrer Ultraschallsonde

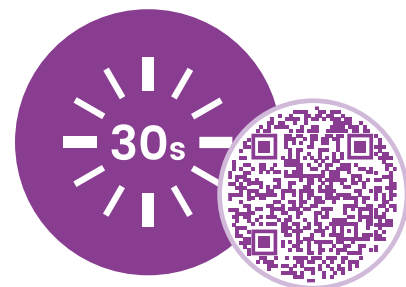

Einheitliche Einwirkzeit
von **30 Sekunden** für alle
relevanten Keime

WIRKSAM

Tristel DUO ULT nutzt Tristels patentierte Technologie auf Basis von Chlordioxid (ClO_2), ein gut dokumentiertes und hochwirksames Biozid. Tristel DUO zerstört wirkungsvoll DNA/RNA. Tristel DUO ULT ist wirksam gegen Sporen, Mykobakterien, behüllte und unbehüllte Viren, Hefen und Pilze sowie gramnegative und grampositive Bakterien, inklusive:

- Humane Papillomaviren (HPV)
- Hepatitis-B-Virus (HBV)
- Humanes Immundefizienz Virus (HIV)
- Herpes-simplex-Virus (HSV)
- *Candidoyma auris*
- *Staphylococcus aureus*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Gardnerella vaginalis*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Escherichia coli*
- *Staphylococcus aureus* (MRSA)



ÖKONOMISCH

Tristel DUO ULT erfordert keine Investitionen in Maschinen oder Wartungsverträge und reduziert dadurch nachhaltig die Betriebskosten.

Die schnelle und einfache Anwendung spart wertvolle Zeit und erlaubt einen höheren Patientendurchlauf.

Der standardisierte Ablauf minimiert das Risiko von Fehlern.



EINFACH

Die Handhabung von Tristel DUO ULT ist einfach. Der Prozess ist klar und verständlich vorgegeben, um die Wirksamkeit und Regelkonformität konstant zu gewährleisten.



KOMPATIBEL

Tristel DUO ULT wurde von führenden Herstellern von Medizinprodukten als materialverträglich freigegeben.

- Alpinion Medical
- BD (Bard Access)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- EchoNous
- Esaote
- E-Scopics
- Exact Imaging
- FUJIFILM SonoSite
- FUJIFILM Healthcare (Hitachi)
- GE Healthcare
- Healcerion
- Koelis
- Konica Minolta
- Liger Medical
- Mindray
- Philips
- Quantel Medical
- Samsung Healthcare
- Siemens Healthineers
- SonoScape
- Supersonic Imagine
- Terason
- The Prometheus Group




ANWENDUNGEN

Tristel DUO ULT ist das einzige High-Level-Desinfektionsmittel, das für alle Teile einer Ultraschalleinheit geeignet ist.

STECKER

KABEL

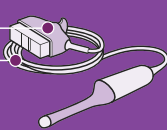


MONITOR

HALTER

TASTATUR



DISPLAYS

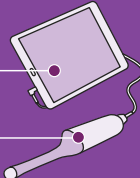

SMARTPHONES



INVASIVE SONDEN

TRANSKUTANE SONDEN

Tristel DUO ULT wurde umfangreich an Sonden als geeignetes Desinfektionsverfahren validiert; z.B. Validierung der viruziden Aufbereitung (SV40/HPV) an transvaginalen Ultraschallsonden PD Dr. rer. nat. M. Eggers, Stuttgart

Validierung der Aufbereitung transvaginaler Ultraschallsonden i.A.a. 4-Felder-Test (EN 16615) Dr. rer. nat. F. Brill, Hamburg

Tristel DUO ULT inaktiviert echten HPV auf realen Medizinprodukten Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to inactivate Human

Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes DOI: 10.1002/jmv.25666

Tristel DUO ULT wurde unter anderem von folgenden Herstellern als Aufbereitungsverfahren gemäß ISO 17664 validiert:

- Alpinion
- Esaote
- GE Healthcare
- Mindray
- Samsung Healthcare
- SonoScape

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

	EUROPÄISCHE NORMEN	EINHEITLICHE EINWIRKZEIT
Bakterien	EN 13727	
	EN 14561	
	EN 16615	
Hefen/Pilze	EN 13624	
	EN 14562	
	EN 16615	
Viren	EN 14476	
	EN 17111	
Mykobakterien	EN 14348	
	EN 14563	
	EN 16615	
Sporen	EN 17126	
	EN 17846	

*Tristel DUO erfüllt die Anforderungen zur Deklaration viruzid PLUS in 3 Minuten.

Tristel DUO ist in der VAH-Desinfektionsmittelliste und im Expertenverzeichnis der ÖGHMP gelistet.




DUO WIPES

- Trockene Vliestücher zur Verwendung mit Tristel DUO ULT
- 100% Polypropylen (18g/m²)
- 200 Tücher/Dose
- DRY/W

WANDHALTERUNG

- für DUO WIPES
- WM/DW

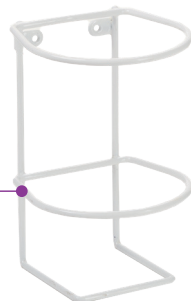

TRISTEL DUO ULT

- 125ml Tristel Basislösung (Zitronensäure) + 125ml Tristel Aktivatorlösung (Natriumchlorit)
- Bei Betätigung des Schäumers werden beide Komponenten miteinander vermischt und generieren Chlordioxid (ClO_2).
- 310 Hübe pro Schaumspender
- 2DUO/ULT (2er-Karton)
- 6DUO/ULT (6er-Karton)

Weitere Informationen zum Tristel DUO ULT wie Sicherheitsdatenblätter, Gutachten, Materialfreigaben und Studien sind auf Nachfrage oder online auf www.tristel.de erhältlich.

Tristel™

Beachten Sie die vollständige Gebrauchsanleitung.

Informationen zu Tristels Patenten unter: <http://www.our-patents.info/tristel>

Deutschland: Tristel GmbH
Karl-Marx-Allee 90A,
10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226
E deutschland@tristel.com
W www.tristel.de

Schweiz: Tristel AG
Sandgrube 29,
9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658
E schweiz@tristel.com
W www.tristel.com

Österreich: Tristel Hygiene GmbH
Kohlmarkt 8-10,
1010 Wien, Österreich
T +43 (0)676 4863656
E oesterreich@tristel.com
W www.tristel.at

Tristel ist Mitglied im:



Verbindung der Hygienefachkräfte der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Bro-3677 - 28/AUG/2026 - VI