

Tristel **VISICLEAN** macht die manuelle Aufbereitung von Ultraschallsonden sichtbar, intuitiv und zuverlässig.

VISICLEAN verbindet eine effektive Reinigung mit einem Farbindikator, der auf Tristels spezielles Chlordioxid reagiert. So entstehen klare, reproduzierbare Schritte, die Anwenden Sicherheit und Innovation vermitteln.



DIE KRAFT DER REINIGUNG

Die Aufbereitung von Ultraschallsonden hängt von einem entscheidenden Schritt ab: der manuellen Reinigung. Sie entfernt sichtbare Verschmutzungen sowie organisches Material, die die Wirksamkeit der anschließenden Desinfektion beeinträchtigen und das Überleben schädlicher Mikroorganismen ermöglichen können. Unabhängig davon, ob die High-Level-Desinfektion manuell oder automatisiert erfolgt, muss der Prozess stets mit einer gründlichen manuellen Reinigung beginnen.

DIE KRAFT VON VISICLEAN


Tristel VISICLEAN vereint eine nicht-enzymatische Reinigungsformulierung mit innovativer Farbtechnologie, die sichtbar bestätigt, wo Reinigung und Desinfektion durchgeführt wurden. Dieser visuelle Hinweis macht den Reinigungsschritt ausdrücklich sichtbar und stärkt das Bewusstsein für seine zentrale Rolle im Gesamtprozess. Gleichzeitig schafft er zusätzliches Vertrauen, dass organisches Material vor der High-Level-Desinfektion wirksam entfernt wurde.

DIE ROSA FARBE VON VISICLEAN STAMMT AUS EINEM NATÜRLICHEN FARBSTOFF, DER SPEZIELL DAFÜR ENTWICKELT WURDE, OPTIMAL AUF TRISTELS CHLORDIOXID ZU REAGIEREN.



BESTELLINFORMATION

Tristel **VISICLEAN** ist als Bestandteil des **Tristel VISI Combination Pack** erhältlich, das die Durchführung von 155 Aufbereitungen ermöglicht.

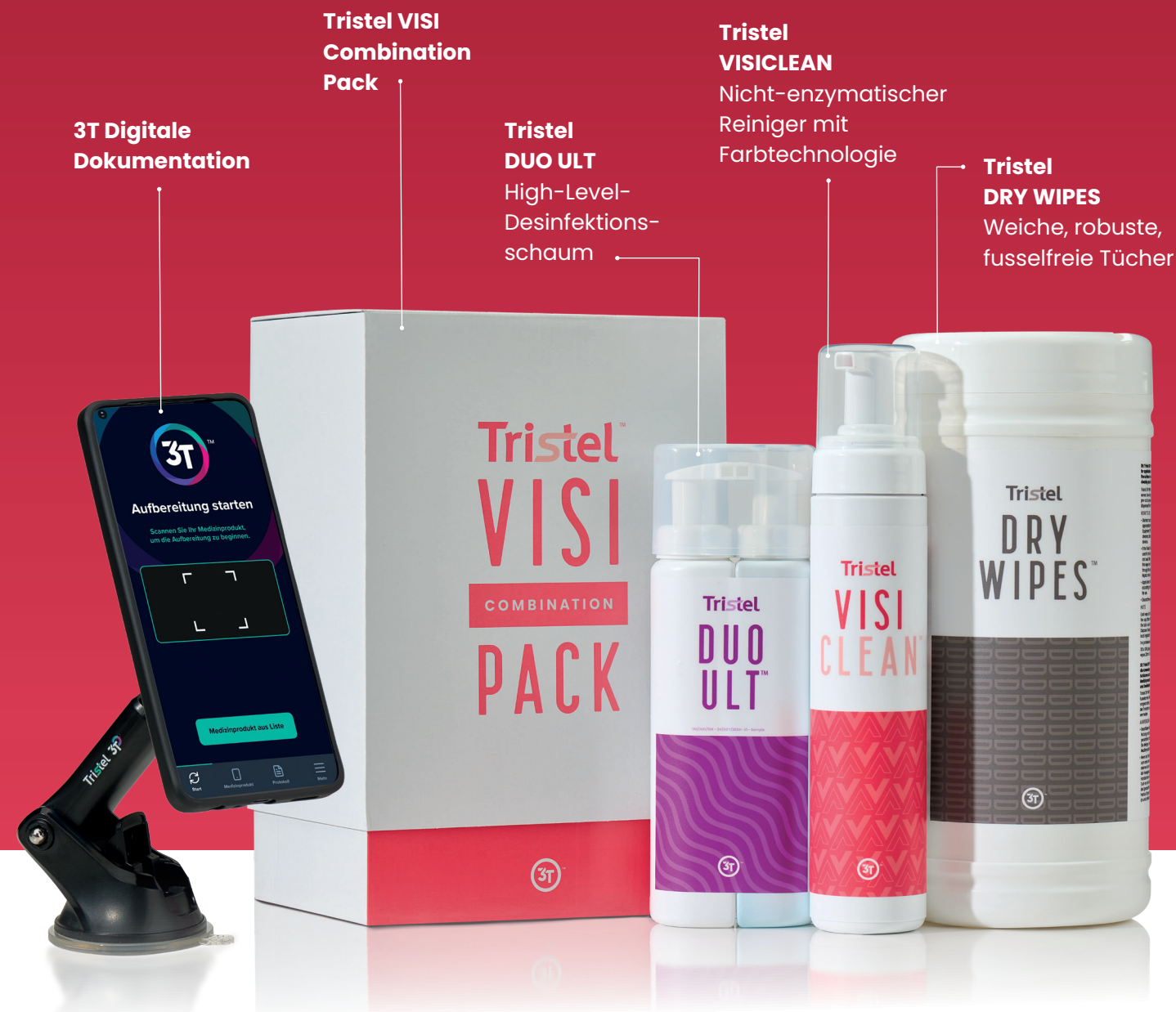

3T Digitale Dokumentation

Tristel VISI Combination Pack

Tristel DUO ULT
High-Level-Desinfektions-schaum

Tristel VISICLEAN
Nicht-enzymatischer Reiniger mit Farbtechnologie

Tristel DRY WIPES
Weiche, robuste, fusselfreie Tücher



Kostenfrei testen

Art.-Nr.: VISI/COM

Tristel **VISICLEAN** und Tristel **DRY WIPES** sind gemäß UK und EU MDR als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.

Tristel **DUO ULT** ist gemäß UK und EU MDR als Medizinprodukt der Klasse IIb eingestuft.

Materialverträglichkeit

VISICLEAN wurde gründlichen Prüfungen an repräsentativen Ultraschallgeräten unterzogen und absolvierte auf jedem Medizinprodukt 2.500 wischbasierte Reinigungszyklen.

Selbst unter Dauerbelastung zeigten die Medizinprodukte keinerlei Verfärbungen, Flecken oder Beschädigungen.

Copyright © Tristel Solutions Limited - Mai 2023 - 20/05/2023 - VI

Tristel™

DAS UNSICHTBARE SICHTBAR MACHEN

Benetzung, die man sieht.
Aufbereitung, der man vertraut.



DER FARBIGE
SCHAUM VERMITTELT
DIE SICHERHEIT, DASS
DIE SONDE GEREINIGT UND VOLL-
STÄNDIG DESINFIZIERT WURDE.



WIE FUNKTIONIERT'S?

VISICLEAN verwandelt die manuelle Aufbereitung in einen validierbaren, prüfbar und reproduzierbaren Prozess und stellt sicher, dass jeder Schritt **korrekt ausgeführt** wird. Jedes Mal.

01

TRISTEL VISICLEAN



Reinigung der Sonde mit Farbindikator, der die Benetzung sichtbar macht.

02

TRISTEL DUO ULT



High-Level-Desinfektion oxidiert VISICLEAN und entfernt die Farbe.

SIND SIE
SCHON
DIGITAL?



Die Dokumentation erfolgt berührungslos während des Aufbereitungsprozesses mittels der 3T-App.

Beachten Sie die vollständige Gebrauchsanleitung.

Farbe, die verschwindet.
VERTRAUEN, DAS BLEIBT.



DIE KRAFT
DER HÄNDE:
STÄRKEN,
WORAN WIR
SCHON IMMER
GEGLAUBT HABEN.



IM GESUNDHEITSWESEN SIND HÄNDE DAS WERTVOLLSTE WERKZEUG

Sie heilen, schützen und schaffen Sicherheit. Von lebensrettenden Injektionen bis hin zu hochpräzisen Operationen: Menschliche Hände liefern unvergleichliche Präzision und Urteilsfähigkeit. Keine Maschine kann ihre Sensibilität oder Entscheidungsfähigkeit nachbilden.

TRISTEL VERTRAUT AUF DIE INTELLIGENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT MENSCHLICHER HÄNDE

VISICLEAN stärkt Fachkräfte in dem, was sie am besten können: jeden Schritt der manuellen Aufbereitung mit Klarheit, Kontrolle und Vertrauen umzusetzen.


Durch sichtbare und intuitive Schritte ermöglicht VISICLEAN Reinigung und Desinfektion mit höchster Präzision und Sicherheit.

Manuelle Aufbereitung – neu definiert. Nicht, um menschliches Können zu ersetzen, sondern um es zu stärken. So können Fachkräfte im Gesundheitswesen sich weiterhin auf das verlassen, was sie seit jeher leitet: die Kraft ihrer eigenen Hände.


95% der Kliniker gaben an, dass VISICLEAN ihnen mehr Sicherheit bei ihren Aufbereitungsverfahren geben würde.*

ANWENDUNGEN


Tristel VISICLEAN ist für Ultraschalluntersuchungen, auch am Point-of-Care, geeignet, bei denen Schnelligkeit, Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

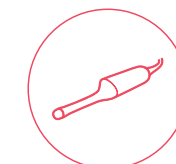

Endokavitäre
Ultraschallsonde

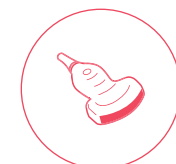

Abdominale
Ultraschallsonden

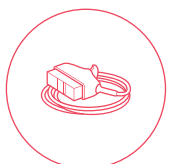

Kabel und
Stecker

*Basierend auf Rückmeldungen, die während Fokusgruppensitzungen und praktischen Produktbewertungen gesammelt wurden.