

NEU

TRISTEL VISI COMBINATION PACK

Sichtbarmachung des Unsichtbaren.

Farbige Aufbereitung
von Ultraschallsonden.



✓
Weltweit erste
Farbtechnologie in
der Instrumenten-
aufbereitung

✓
Sichtbare
Benetzung und
Wirksamkeit bei
Reinigung und
Desinfektion

✓
Validierbarkeit
jedes
Aufbereitungs-
prozesses

WIE FUNKTIONIERT'S?

Tristel VISICLEAN ist ein potenter Reiniger mit Farbtechnologie. Eine fehlende Anfärbung der Sonde zeigt Stellen auf, die noch gereinigt werden müssen.

Wenn die Sonde komplett gereinigt wurde, wird Tristel DUO ULT aufgetragen. Chlordioxid oxidiert dabei auch die Farbe und gibt somit eine sichtbare Bestätigung, dass keine Benetzungslücken vorhanden sind und die High-Level-Desinfektion begonnen hat.

Tristel DUO ULT wirkt innerhalb von 30 Sekunden und ist bakterizid, fungizid, viruzid, mykobakterizid und sporizid.

Validierbare Aufbereitung von Ultraschallsonden durch Sichtbarmachung – Zweifelsfrei!

01

REINIGUNG MIT FARBAUFTRAG



Tristel VISICLEAN wird mittels Tristel DRY WIPE zur Reinigung der Sonde genutzt. Dabei wird pinke Farbe aufgetragen. Somit können Stellen, die noch nicht gereinigt wurden, identifiziert und die komplette Reinigung aller Oberflächen validierbar sichergestellt werden.

02

DESINFEKTION MIT ENTFÄRBUNG



Tristel DUO ULT wird zur High-Level-Desinfektion genutzt. Der Schaum wird mittels Tristel DRY WIPE auf die Sonde aufgetragen. Dabei oxidiert es auch die pinke Farbe. Somit können Benetzungslücken erkannt und behoben werden. Sobald die Sonde entfärbt ist und 30 Sekunden Einwirkzeit eingehalten wurden, ist die Desinfektion zweifelsfrei und validierbar abgeschlossen.

SIND SIE
SCHON
DIGITAL?



Die Dokumentation erfolgt berührungslos während des Aufbereitungsprozesses mittels der 3T-App.

Kontaktieren Sie Ihren Tristel-Ansprechpartner, um eine Probestellung zu vereinbaren. Sehen Sie mit eigenen Augen, wie Sie mit Tristel das Unsichtbare sichtbar machen!

Tristel™

Deutschland: Tristel GmbH
Karl-Marx-Allee 90A,
10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226
E deutschland@tristel.com
W www.tristel.de

Österreich: Tristel Hygiene GmbH
Kohlmarkt 8-10,
1010 Wien, Österreich
T +43 (0)676 4863656
E oesterreich@tristel.com
W www.tristel.at

Schweiz: Tristel AG
Sandgrube 29,
9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658
E schweiz@tristel.com
W www.tristel.com