



HINWEISE

- Verwenden Sie Tristel VISICLEAN oder Tristel DUO ULT nicht, wenn eine der Flaschen beschädigt oder unbeabsichtigt geöffnet wurde.
- Desinfizieren Sie Ihre Hände und tragen Sie geeignete Handschuhe und persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie Desinfektionsmittel und Medizinprodukte handhaben.
- Nicht mit Weichmetallen oder Edelstahl mit geringer Güte verwenden.
- Mit Tupfern lassen sich Tristel VISICLEAN und Tristel DUO ULT auch in schwer zugänglichen Bereichen wie Vertiefungen oder Spalten auftragen.
- Schließen Sie den Verschluss von Tristel DRY WIPES nach jedem Gebrauch, füllen Sie die Spenderdose nicht nach und verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke.
- Nur für die Nutzung durch medizinische Fachkräfte.
- Diese Gebrauchsanleitung sollte in Verbindung mit dem Produktetikett, dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) und den Anweisungen des Medizinproduktherstellers verwendet werden.
- Tristel VISICLEAN und Tristel DUO ULT können auch für das Sondenkabel und den Stecker verwendet werden. Wiederholen Sie die Anweisungen unten mit einem neuen Tristel DRY WIPE.


GEBRAUCHSANLEITUNG

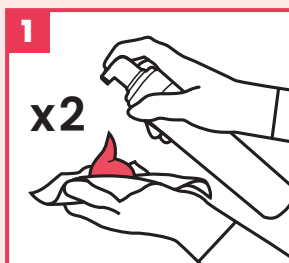

Geben Sie mit sauberen Handschuhen **zwei Hübe** Tristel VISICLEAN auf ein Tristel DRY WIPE.

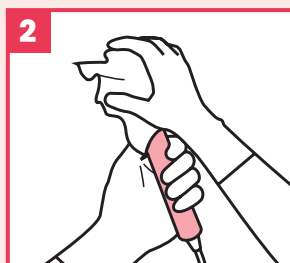


Wischen Sie die gesamte Oberfläche der Sonde ab, bis alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt sind und die gesamte Oberfläche der Sonde angefärbt ist. Achten Sie dabei besonders auf die Vertiefungen und Fugen entlang der Sonde. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzlichen Schaum und Tücher.

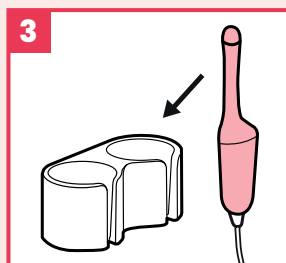


Legen Sie die Sonde zurück in die **Sondenhalterung**, während Sie sich auf den nächsten Schritt vorbereiten. Entsorgen Sie das benutzte Tuch und die Handschuhe entsprechend den örtlichen Vorschriften. Nicht wiederverwenden.




Desinfizieren Sie Ihre Hände und ziehen Sie neue Handschuhe an.

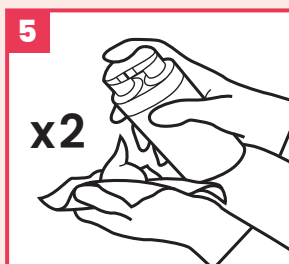


Geben Sie **zwei Hübe** Tristel DUO ULT auf ein neues Tristel DRY WIPE.

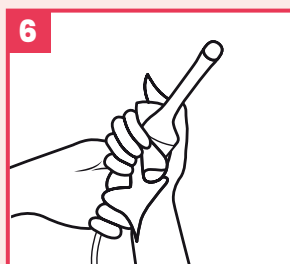

Verwenden Sie das Tuch, um den Schaum über die Oberfläche der **Sonde und des Sondenhalters** zu verteilen und sicherzustellen, dass alle Färbungen entfernt sind. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Tupfer, um den Schaum in Vertiefungen zu verteilen. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzlichen Schaum und Tücher.

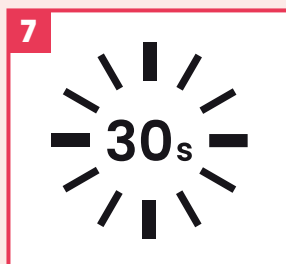

Platzieren Sie die Sonde in der **Sondenhalterung** und stellen Sie sicher, dass das Medizinprodukt mindestens für die **30-sekündige Einwirkzeit*** feucht bleibt. Entsorgen Sie das benutzte Tuch und die Handschuhe gemäß den örtlichen Vorschriften. Nicht wiederverwenden.

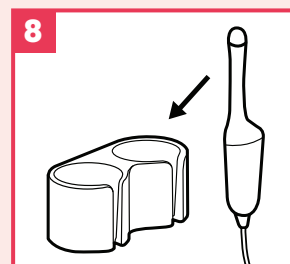

Lassen Sie das Medizinprodukt an der Luft trocknen und lagern Sie es gemäß der Standardarbeitsanweisung, um eine Beschädigung oder Rekontamination zu vermeiden.

*Tristel DUO ULT ist gemäß der nach EN 14885:2022 zur Ausübung der Wirksamkeit durchzuführenden Testungen bakterizid, fungizid, viruzid, mykobakterizid und sporizid mit einer Einwirkzeit von 30 Sekunden. Die viruzide Wirksamkeit nach EN 14476, aber auch im DVV/RKI:2014 Suspensionstest ist in 30 Sekunden gegeben. Gemäß Prüfung auf Viruswirksamkeit von Flächendesinfektionsmitteln ohne Mechanik (DVV 2012) ist Tristel DUO ULT viruzid mit einer Einwirkzeit von 1 Minute. Praxisnahe Validierungen mit Tristel DUO ULT an realen Medizinprodukten analog EN 14885:2022 Anhang C und klinische Studien zeigen, dass Tristel DUO ULT gegen relevante Erreger, wie Viren, innerhalb von 30 Sekunden wirksam ist.