


# Tristel Duo™

# ULT

PARA SONDAS DE  
ULTRASONIDOS NO INVASIVAS

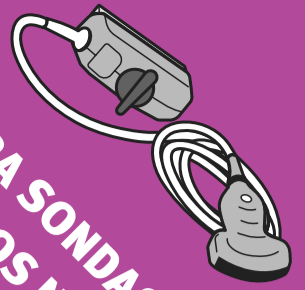

Espuma desinfectante de alto nivel

## Notas:

- No utilizar si la botella está dañada.
- Desinfectese las manos y utilice el Equipo de Protección Individual (EPI) adecuado cuando manipule desinfectantes y productos sanitarios.
- Si se utiliza Tristel Duo ULT por primera vez, presione la bomba de dos a cuatro veces para cebarla.
- Utilice Tristel Duo ULT en superficies que no tengan gel de ultrasonidos.
- Si la superficie está visiblemente sucia, siga el protocolo del hospital para las instrucciones de limpieza.
- Para uso profesional.
- Este gráfico mural debe utilizarse junto con las instrucciones de uso (IFU), la etiqueta del producto, la ficha de datos de seguridad (SDS) y las instrucciones del fabricante del dispositivo.

### PASO 1



Dispense dos dosis de Tristel Duo en una toallita seca (se recomienda usar Duo Wipes).

### PASO 2



Utilice la toallita para extender la espuma sobre la superficie de la sonda y asegúrese de que todas las zonas están cubiertas. No es necesario limpiar continuamente la superficie y debe evitarse para evitar el desprendimiento de la toallita.

**Nota:** Deseche la toallita usada de acuerdo con la normativa local. No macerar. No reutilizar.

### PASO 3



Deje secar las superficies para garantizar un tiempo de contacto mínimo de **30 segundos**.

**Nota:** Almacene el dispositivo médico de acuerdo con los protocolos del hospital para evitar daños o recontaminación.

**Tristel™**

Fabricante del Reino Unido: Tristel Solutions Limited, Unit 1B, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY  
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Para leer la información de patentes de Tristel, visite: <http://www.our-patents.info/tristel>