

ESPUMA ESPORICIDA DE DIÓXIDO DE CLORO (ClO₂) PARA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES MÉDICAS NO POROSAS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS.

No está destinada para su uso con sondas de ultrasonido ni dispositivos médicos invasivos.

CÓMO USAR



1 Ensamble JET, tome un gatillo, desenrosque las tapas de las botellas y, siguiendo los indicadores rojos A y azules B en la etiqueta de la botella, inserte los tubos en los respectivos cuellos de botella.



2 Gire las palancas en sentido anti-horario en cada lado de su gatillo para asegurar. Asegúrese de que la boquilla esté alineada con la línea superior en la cabeza del gatillo. JET está ahora listo para usar.



3 Aplique al menos 2 dosis en una toallita.



4 Limpie sobre la superficie.



5 Asegúrese de que la superficie permanezca húmeda durante 1 minuto de tiempo de contacto.



6 Deje secar al aire. Cuando no pueda reciclar, ¡reutilícelo! Lea la sección 'GRAN IMPACTO' a continuación para obtener más información.

VERIFICACIONES ANTES DEL USO

Algunos recordatorios importantes antes de comenzar:

- Siempre lea la etiqueta, las hojas de datos de seguridad (SDS) y la información del producto antes de usar.
- Use el equipo de protección personal (PPE) adecuado.
- No utilice el producto si está dañado.
- JET es solo para uso profesional.
- No aplicar en superficies de latón, cobre, aluminio, acero suave o plata.
- Limpie, enjuague y seque cuidadosamente la superficie antes de usar.



Consulte la Guía del Usuario para obtener instrucciones completas.

GRAN IMPACTO

El gatillo de su JET debe reutilizarse con la segunda botella de JET.

Para hacer esto, desenganche las palancas en sentido horario para quitar el gatillo.

Antes de seguir las instrucciones de ensamblaje anteriores, enjuague los tubos de inmersión con agua del grifo y séquelos con una toalla de papel.

Después de su uso, las botellas y tapas vacías de JET pueden enviarse para reciclaje.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

JET puede conservarse durante 2 años antes de su uso y debe almacenarse en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa, entre 10°C y 35°C.

Una vez abierto, JET tiene una vida útil de 6 meses. Puede rastrear esto anotando el día de apertura de JET en la etiqueta de la botella.