

# QUE PUEDES HACER EN 30 SEGUNDOS?



**MATA ACANTHAMOEBA CASTELLANII\***

Espuma desinfectante de alto nivel  
para dispositivos oftálmicos

**TRISTEL DUO OPH ESTÁ LISTO PARA SU USO. SIMPLEMENTE APLIQUE, LIMPIE Y ENJUAGUE!**




DISPENSE DOS DOSIS EN UNA  
TOALLITA TRISTEL DUO SECA O  
DIRECTAMENTE EN EL  
DISPOSITIVO



ESPARZA LA ESPUMA SOBRE  
LA SUPERFICIE DEL  
DISPOSITIVO



ESPERE UN TIEMPO DE  
CONTACTO MÍNIMO DE  
30 SEGUNDOS

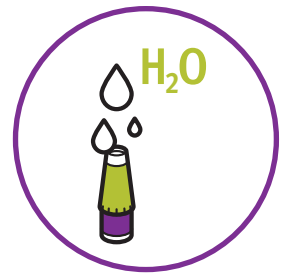

ENJUAGUE EL DISPOSITIVO  
CON AGUA DE SUFICIENTE  
CALIDAD

**Tristel Duo™**  
**OPH**



## EFFECTIVO

Tristel Duo OPH, basado en la química patentada de dióxido de cloro de Tristel, es efectivo en 30 segundos contra microorganismos preocupantes, incluidos:

- *Acanthamoeba castellanii* (uno de los organismos causantes de la queratitis por *Acanthamoeba keratitis*)
- Adenovirus Tipo 5
- *Aspergillus flavus*
- *Aspergillus brasiliensis*
- *Candida albicans*
- *Fusarium solani*
- *Staphylococcus aureus*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos (CRE) *Klebsiella pneumoniae*
- Enterococos resistentes a vancomicina (VRE) *Enterococcus faecium*



## ECONÓMICO

El uso de Tristel Duo OPH elimina la necesidad de dispositivos médicos de un solo uso, lo que permite un ahorro de costos significativo. Tristel permite que los dispositivos sean reprocesados rápidamente, disminuyendo la necesidad de comprar muchos dispositivos y reduciendo el gasto de capital.



## RÁPIDO

Con un tiempo de contacto de 30 segundos, Tristel Duo OPH proporciona desinfección de dispositivos de alto nivel rápidamente, permitiéndole pasar al siguiente paciente. Este enfoque no solo mejora la eficiencia en entornos de atención médica, sino que también apoya prácticas de sostenibilidad al reducir la dependencia de dispositivos de un solo uso.



## COMPATIBLE

Tristel Duo OPH ha sido probado y confirmado como compatible por los principales fabricantes incluyendo:

- Accutome (Keeler)
- Clarity Medical Systems (Natus)
- DGH Technologies
- Ellex
- Haag-Streit
- Nidek
- Quantel Medical
- Reichert / Ametek
- Takagi
- Tomey
- Volk



## SIMPLE

El entrenamiento y certificación son una parte esencial del servicio al cliente de Tristel. Nuestro Portal de entrenamiento en Línea ofrece formación para usuarios de Tristel Duo OPH en un momento y lugar convenientes para usted.

## Dióxido de cloro

Tristel Duo OPH utiliza la química de dióxido de cloro (ClO<sub>2</sub>) propia de Tristel, un biocida ampliamente documentado y muy eficaz. El ClO<sub>2</sub> es un fuerte oxidante cuyas características germicidas son bien conocidas. Puede oxidar lípidos y proteínas presentes en las membranas celulares de bacterias y hongos, lo que lleva a una pérdida de la integridad de la membrana y, finalmente, a la muerte celular. El ClO<sub>2</sub> también puede penetrar en las células y degradar los ácidos nucleicos mediante una vía oxidativa. Mecanismos similares son responsables de la capacidad del ClO<sub>2</sub> para inactivar partículas virales. Los organismos no pueden desarrollar resistencia al ClO<sub>2</sub> ya que reacciona con los tioles biológicos (antioxidantes que protegen a las células del daño oxidativo), que juegan un papel vital en todos los organismos vivos.

## APLICACIONES

Tristel DUO OPH ha sido diseñado específicamente para la desinfección a alto nivel de dispositivos médicos oftálmicos, como:



LENTES DE DIAGNÓSTICO



PRISMAS DE TONÓMETRO REUTILIZABLES



ULTRASONIDOS OFTÁLMICOS (A-SCAN O B-SCAN)



LÁMPARA DE HENDIDURA



PAQUÍMETROS

## Duo Wipes están diseñadas específicamente para la aplicación de Tristel DUO OPH

Las toallitas Duo Wipes están fabricadas con 100% polipropileno (18 g/m<sup>2</sup>).

El uso de Duo Wipes permite la liberación eficaz del desinfectante sobre la superficie.



### TRISTEL DUO OPH

- 125ml Tristel Solución Base (ácido cítrico) + 125ml de solución activadora Tristel

Cuando se mezcla al presionar la bomba de espuma, se genera la química de dióxido de cloro de Tristel.

- 310 dosis por botella/ 2 botellas por caja

### DUO WIPES

- 160 toallitas por bolsa/ 320 toallitas por bolsa
- 2 bolsas por cartón/ 6 bolsas por cartón

### DUO DOK

- Diseñado para tener a mano Tristel Duo OPH
- 5 por paquete.